

Protokollblatt bitte kopieren und Kopie verwenden

Kunde:

	Rotege Rollator B Rollator B XL	RL-Smart Capero RL-120 RL-120 Vario	Delta B	SRL 100	Rezi Gebo	VFG GS - L/R			
Baugruppe 1 - Rahmen - Gehäuse									
Standprüfung (Montage- Richtplatte)	X	X	X	X	X	X			
Sichtprüfung (Lack / Chrom / Polster)	X	X	X	X	X	X			
Falt- / Klappmechanismus überprüfen	X	X	X	X	X	X			
Kontrolle der Konstruktion (Schweißnähte, Lötstellen etc.)	X	X	X	X	X	X			
Federstifte kontrollieren					X	X			
Baugruppe 4 - Räder vorne									
Spiel Radlager überprüfen	X	X	X	X					
Spiel Lenklager überprüfen	X	X	X	X					
Position der Castorbuchse überprüfen	X		X	X					
bei Luftbereifung Druck überprüfen	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar					
Baugruppe 5 - Räder hinten									
Spiel Radlager überprüfen	X	X	X	X					
bei Luftbereifung Druck überprüfen	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar					
Baugruppe 6 - Bremsen									
Bremsspiel einstellen	10mm	5mm	5mm	10mm					
Bremsprüfung (gebremste Räder oder Rollen)	X	X	X	X					
Allgemeine Maßnahmen									
Scharfe Kanten / Grate beseitigen	X	X	X	X	X	X			
Schrauben* und Anbauteile (Schiebegriffe etc.) auf festen Sitz und Grate überprüfen *Anziehdrehmomente nach VDI Richtlinie 2230	X	X	X	X	X	X			
Sauberheitskontrolle	X	X	X	X	X	X			
Bedienungsanleitung vorhanden?	X	X	X	X	X	X			

Ergänzend sind die Anweisungen in der Gebrauchsanleitung zu berücksichtigen !

Ausfüllanleitung:	in Ordnung =	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Beschädigung =	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Austausch / Ersatz =	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Wartung durchgeführt von:
Stempel und Unterschrift
Nächster Service:
Ort / Datum: