

Protokollblatt bitte kopieren und Kopie verwenden

Kunde:	TS - 1 TS - 200	TS - Care	TS - Aqua	TSE - A/O TSE Easy 10 TS- sense	DH - 40 / L* DH - 40 R* BB - 80	Aruba BDS-40 Barbados Curacao	Haiti** Trinidad* Varadero*		
Baugruppe 1 - Rahmen - Gehäuse									
Standprüfung (Montage- Richtplatte)	X	X	X		X*		X*		
Sichtprüfung (Lack / Chrom / Polster)	X	X	X	X	X	X	X		
Falt- / Klappmechanismus überprüfen							X**		
Kontrolle der Konstruktion (Schweißnähte, Lötstellen etc.)	X	X	X	X	X	X	X		
Sichtprüfung Kunststoffqualität (Farbeinschlüsse oder -abweichungen)	X			X	X	X	X		
Federstifte kontrollieren		X			X				
Baugruppe 2 - Seitenteile									
Klappmechanismus überprüfen	X		X	X					
Einrastmechanismus überprüfen	X		X	X					
Federstifte kontrollieren	X			X					
Baugruppe 3 - Beinstützen									
Funktion und Leichtgängigkeit überprüfen	X		X						
Montage / Demontage überprüfen	X		X						
Einrastmechanismus überprüfen	X		X						
Baugruppe 4 - Räder vorne									
Spiel Radlager überprüfen	X		X						
Spiel Lenklager überprüfen	X		X						
Baugruppe 5 - Räder hinten									
Spiel Radlager überprüfen	X		X						
Spiel Lenklager überprüfen	X		X						

Baugruppe 6 - Bremsen									
Bremsprüfung (gebremste Räder oder Rollen)	X		X						
Baugruppe 7 - Antriebe / Batterien									
Motoren- und Antriebs- Gehäuseprüfung									
Endabschaltung der Antriebe überprüfen									
Geräuschprüfung Motoren und Antriebe									
Zugentlastungen überprüfen									
Typenschild vorhanden?									
Baugruppe 8 - Elektrosteuerung									
Kabel- und Steckverbindungen überprüfen									
Handsteuerung Funktionsprüfung									
Handsteuerung auf Beschädigungen überprüfen									
Sicherungsgehäuse auf Beschädigung überprüfen									
Netzstecker und Netzzuleitung überprüfen									
Zugentlastungen überprüfen									
Kompressor Funktionsprüfung									
Typenschild vorhanden?									
Baugruppe 9 - Sitz- / Rückeneinheit									
Passung Rückenlehne überprüfen	X		X						
Matratze auf Dichtigkeit überprüfen									
Schlauchzuleitungen überprüfen									
Aufrichter überprüfen									
Triangelgriff und Gurt überprüfen									
Allgemeine Maßnahmen									
Scharfe Kanten / Grate beseitigen	X	X	X	X	X	X	X		
Schrauben* und Anbauteile (Schiebegriffe etc.) auf festen Sitz und Grate überprüfen *Anziehdrehmomente nach VDI Richtlinie 2230	X	X	X	X	X	X	X		
Sauberheitskontrolle	X	X	X	X	X	X	X		
Bedienungsanleitung vorhanden?	X	X	X	X	X	X	X		

Ergänzend sind die Anweisungen in der Gebrauchsanleitung zu berücksichtigen !

Ausfüllanleitung:	in Ordnung =	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Beschädigung =	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Austausch / Ersatz =	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Wartung durchgeführt von:
Stempel und Unterschrift
Nächster Service:
Ort / Datum: