


Bischoff & Bischoff


Bedienungsanleitung

BB-80



Enjoy mobility.

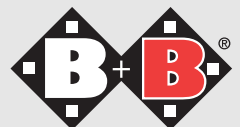

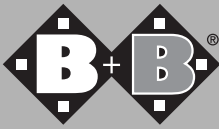

Lieber Benutzer,
mit dem Erwerb dieser B+B
Badehilfe verfügen Sie über
ein deutsches Spitzenpro-
dukt, das sich schon tau-
sendfach im professionel-
len Einsatz bewährt hat.
Die Ihnen vorliegende Be-
triebsanleitung soll Ihnen
dazu dienen, sich mit der
Bedienung und Handha-
bung Ihrer Badehilfe ver-
traut zu machen.

Duschkopfaufnahmen

Haltegriff
Seifenschale

1. Achtung - Sicherheitshinweis - Risikoanalyse nach DIN EN ISO 13485


- Max Belastbarkeit 100 kg
- Das Badebrett nur im Temperaturbereich von +3°-+70° einsetzen.
- Nicht auf die Vorderkante des Badebrettes setzen, Sturzgefahr



Beachten Sie bitte die Aufbauanleitung auf den
Seiten 2 und 3, sowie die Sicherheitshinweise
auf Seite 4



Bitte lesen Sie diese Bedienungs- und
Montageanleitung sorgfältig! Beachten Sie
speziell die Sicherheitshinweise auf Seite 6!

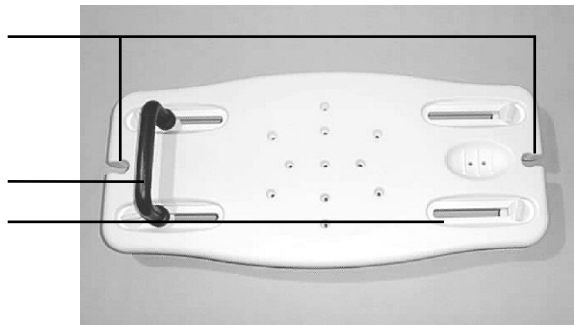

Das Badebrett BB-80 ermöglicht Ihnen komfortables
Baden im Sitzen. Die integrierte Seifenschale und die
Duschkopfaufnahmen an beiden Seiten des Badebrettes
unterstützen ebenfalls das praktische Handling.

1. Abbildung von unten

Die Anti-Rutsch-Pads sichern das Badebrett gegen Verrutschen und den Badewannenrand gegen Beschädigungen.

Anti- Rutsch- Pad- Aufnahme

Drücken Sie die Pads gerade in die dafür vorgesehenen Aufnahmen.

2. Abstand zwischen den Fußstützen

Vor dem Befestigen stellen Sie den Abstand der Fußstützen auf den Abstand der Badewannen-Innenseite ein. Der Abstand läßt sich für alle handelsüblichen Badewannen korrekt einstellen. Anschließend Schrauben fest anziehen!

Min. Abstand: A = 45 cm

Max. Abstand: B = 72 cm

B/H/T: 78,5 / 4 / 37 cm

Gewicht: 2,4 kg



Abb. 1


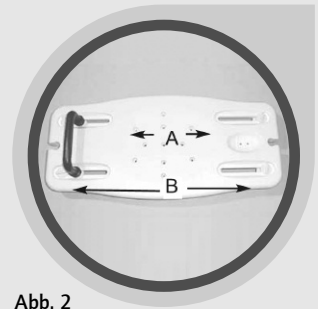


Abb. 2

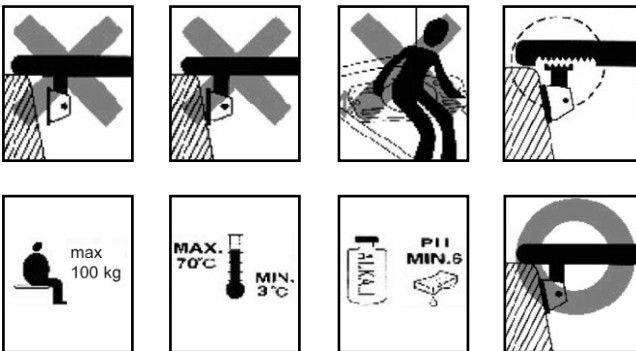

Garantie-Abschnitt

(Achten Sie auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen)

Typ: Badebrett BB-80

Seriennummer:*

(vom Fachhandel einzutragen)

Fachhändler:

Datum und Stempel

*Hinweisschilder befinden sich auf dem Seitenrahmen

Bischoff & Bischoff GmbH

Becker-Goering-Strasse 13 • D-76307 Karlsbad

Tel.: +49 700/6000 7070 • Fax: +49 700/6000 8080

www.bischoff-bischoff.com

info@bischoff-bischoff.de

