


Bischoff & Bischoff

Bedienungsanleitung

Delta B



Enjoy mobility.

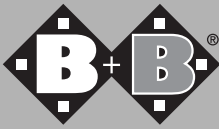

Delta B (Gehhilfe)

Sehr geehrter Kunde,

mit dem Erwerb dieser B+B Gehhilfe verfügen Sie über ein deutsches Spitzenprodukt, das sich schon tausendfach im professionellen Einsatz bewährt hat.

Die Ihnen vorliegende Bedienungsanleitung soll Sie mit der Bedienung und Handhabung Ihrer B+B Gehhilfe besser vertraut und somit sicherer machen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und mehr Mobilität mit unserem Produkt.


1. Achtung - Sicherheitshinweise! (Risikoanalyse nach DIN EN ISO 13485)

- Max. Belastbarkeit 100 kg!
- Fahren nur auf ebenem und horizontalem Untergrund!
- Bei Luftbereifung auf korrekten Druck (2-2,5 bar) achten!
- Mindesteinstecktiefe der Griffrohre (Markierung) beachten!
- Jede Bremse wirkt nur auf ein Laufrad!
- Zur Reinigung keine aggressiven oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden!
- Bremsen vom Fachhändler alle 6 Monate überprüfen lassen!



Handgriff
Bremse mit Feststeller
Utensilienkorb
Schnellverschluss
Faltmechanismus

Bremse
Bremsbügel
Lenkrad
Laufrad

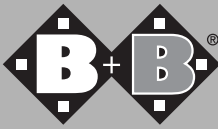

2. Entfalten

- Positionieren Sie den B+B DGW in Fahrtrichtung vor sich.
- Halten Sie den B+B DGW an beiden Handgriffen fest und ziehen Sie diese nach außen.
- Um den faltmechanismus zu arretieren, drücken Sie mit dem Daumen den Schnellverschluß bis zum Anschlag nach unten.

3. Falten

- Positionieren Sie den B+B DGW in Fahrtrichtung vor sich.
- Halten Sie mit einer Hand einen Handgriff und ziehen Sie mit der anderen Hand den Schnellverschluss leicht nach oben.
- Durch Zusammendrücken der Handgriffe wird der DGW gefaltet. Achten Sie darauf, dass bei den faltvorgängen weder Körperteile noch Kleidungsstücke eingeklemmt werden.

4. Utensilienkorb

Der Utensilienkorb wird am Griffrohr in Fahrtrichtung angehängt.

5. Schiebegriffe einstellen

Der B+B DGW ist entfaltet.

- Betätigen Sie die Feststellbremse (siehe Punkt 6.2).
- Öffnen Sie die Kunststoff-schraube an den Griffrohren bis sich die Handgriffe frei bewegen lassen.

- Positionieren Sie sich hinter dem B+B DGW und lassen Sie Ihre Arme locker nach unten hängen.
- Stellen Sie nun die Schiebegriffe so ein, dass sie sich in Höhe Ihrer Handgelenke befinden.
- Ziehen Sie nach dem Einstellvorgang die Kunststoffschrauben wieder fest an.

Beachten Sie die Mindesteinstecktiefe der Griffrohre (min. 8 cm)

6. Bremsbetätigung und Einstellung

6.1. Betriebsbremse

Die Betriebsbremse wird mit den beiden Handbremshebeln an den Schiebegriffen durch ziehen nach oben betätigt.

6.2. Feststellbremse


T- Drücken Sie die Bremshebel nach unten, bis diese spürbar einrasten.

- Um die Feststellbremse wieder zu öffnen, ziehen Sie einfach die Handbremshebel nach oben, die Bremse entriegelt selbsttätig.



Achtung,

jede Bremse wirkt nur auf ein Laufrad.

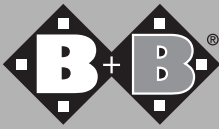

6.3. Bremseinstellung

Die Bremsen können direkt am Bremshebel und/oder am Bowdenzug eingestellt werden. Die Bremse ist richtig eingestellt, wenn der Bremshebel kein Spiel hat. Der Bremsbacken darf dabei, ohne Betätigung des Bremshebels, das Laufrad nicht berühren.

- Um die Bremse härter einzustellen, ist die Rändelschraube an den Bremsvorrichtungen aufzudrehen und die Rändelmutter entgegengesetzt zu kontern.

7. Räder und Bereifung

Auf den 8" Rädern sind PU-Reifen montiert.

8. Technische Daten

Typ:	Delta B (DGW)
Farbe:	Rot- oder Blau-metallic
Länge:	56 cm
Breite:	68 cm
Gefaltet:	26 cm
Gewicht:	6,6 kg ohne Korb

- Anatomisch geformte Handgriffe.
- Kombinierte Betriebs- und Feststellbremse.
- Stabile Stahlkonstruktion, korrosionsfeste Beschichtung.
- Verdrehsichere Griffrohre, stufenlos von 80-94 cm einstellbar.
- 8" Bereifung.

Garantie-Abschnitt

(Achten Sie auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen)

Typ: Delta B

Seriennummer:*

(vom Fachhandel einzutragen)

Fachhändler:

Datum und Stempel

* Hinweisschilder befinden sich auf dem Seitenrahmen

Bischoff & Bischoff GmbH

Becker-Göring-Straße 13 • D-76307 Karlsbad

Tel.: 0700/6000 7070 • Fax: 0700/6000 8080

www.bischoff-bischoff.com

info@bischoff-bischoff.de

