


Bischoff & Bischoff


Bedienungsanleitung

Varadero



Enjoy mobility.

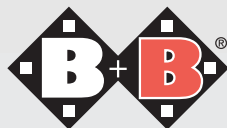

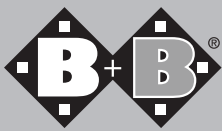

Duschhocker „Varadero“ (ohne Rückenlehne)

Sehr geehrter Kunde,

Mit dem Erwerb dieser B+B Duschhilfe verfügen Sie über ein deutsches Spitzenprodukt, das die Pflege zu Hause vereinfachen wird.

Die Ihnen vorliegende Bedienungsanleitung soll Sie mit der Bedienung und Handhabung Ihrer B+B Duschhilfe besser vertraut und sicherer machen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Produkt!

1. Konformitätserklärung

B+B erklärt als Hersteller des Produktes, dass der Duschhocker „Varadero“ vollständig den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG entspricht.

2. Angaben zur Benutzung des Produktes


Der Duschhocker „Varadero“ ist ausschließlich für das Sitzen beim Duschen konzipiert.

3. Verwendungszweck - Indikationen

Standunsicherheit / Stehunsicherheit bei
Gebrauchsminderung/fehlender Funktionsfähigkeit der
unteren Extremitäten, (z.B. bei Kraftverlust bei bösartigen
Erkrankungen, chronische, fortgeschrittene Herz-Kreislauf-
und Lungenerkrankungen) kombiniert mit einer Rumpf-
haltungsschwäche.

4. Achtung - Sicherheitshinweise - Risikoanalyse nach DIN EN ISO 14971

- Für das Einsteigen und Aussteigen ist eine Begleitperson erforderlich
- Alle 4 Hockerfüße auf die gleiche Höhe einstellen
- Auf korrekten Sitz der Arretierklammern achten
- Bei fester Anbringung der Sitzfläche auf dem Sitzrahmen achten: Einklemmgefahr.
- Sitzfläche lediglich zum Sitzen.

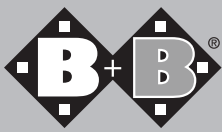

5. Zusammenbau und Montage

Seitenteil in den Sitzrahmen einstecken und von unten mit den Blechschrauben befestigen (siehe Abb. 1 und 2).

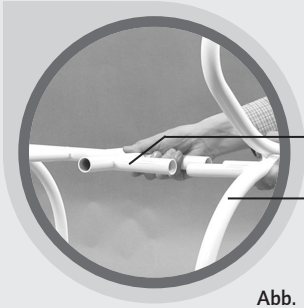


Abb. 1

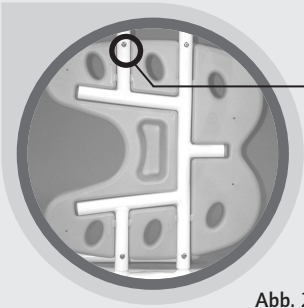


Abb. 2

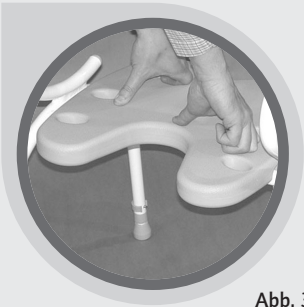


Abb. 3

Der Sitz wird auf den Sitzrahmen durch kräftigen Druck eingerastet (siehe Abb. 3).

Für einen korrekten Sitz müssen sowohl die Griffbögen wie auch die Aussparung des Sitzes nach vorne ausgerichtet sein! (siehe Abb. 3).

Um den Sitz zu entnehmen, halten Sie diesen am Seitenrahmen fest und ziehen Sie den Sitz vom Rahmen ab (siehe Abb. 4).

Achtung!

6. Einstellen der Sitzhöhe

Beide Fußteile sind 5-fach höhenverstellbar (Einstellbereich 10 cm). Ziehen Sie dafür die Arretierung heraus und stellen Sie die gewünschte Position ein.

Arretierklemme

Nach Einstellung der gewünschten Höhe arretieren Sie die Klemme in der vorgesehenen Bohrung (siehe Abb.5 und 6).

Alle vier Außenfüße müssen auf die gleiche Höhe eingestellt werden!

7. Reinigung und Desinfizierung des Duschockers

Die Reinigung und Desinfizierung nur mit handelsüblichen Mitteln vornehmen.

8. Einstellung-Reparaturwerkzeug

- 1x Kreuzschraubenzieher
- 1x Sechskantwinkelschlüssel Nr.5



Abb. 4



Abb. 5


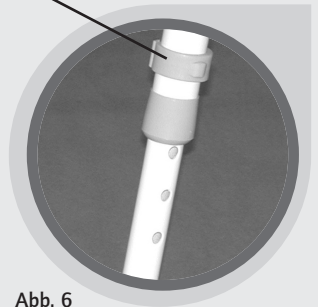


Abb. 6

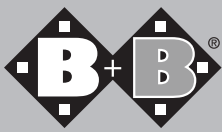

9. Technische Daten

- Max. Belastbarkeit 120 kg.
- B/T/H (in mm): 510 / 520-540 / 661-761
- Gewicht: 3,5 kg.
- Sitzhöhe: 455-555 mm 5-fach über Clip
- Sitzfläche Breite / Tiefe: 400/400 mm
- Hitzebeständigkeit: bis zu 125°C
- Farbe: blau oder weiß

10. Kennzeichnung des Produktes

Auf den Rahmen des Produktes ist einen Kennzeichenaufkleber angebracht wo Sie die Produktbezeichnung/ Seriennummer/ max. Benutzergewicht/ Firmenadresse noch mal finden.

11. Garantie

Eine Gewährleistung kann nur übernommen werden, wenn das Produkt unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird. Eine Rücksendung des Produktes muss in der Originalverpackung erfolgen.

12. Lieferung der Serienausstattung

- 1/1 x Seitenrahmen links/ rechts
- 1x Sitzrahmen
- 1x B+B Sitzfläche (Kunststoff)
- 4x Teleskopröhre
- 4x Sicherungsstifte
- 1x Schraubensatz

Garantie-Abschnitt

(Achten Sie auf unsere allgemeinen
Geschäftsbedingungen)

Typ: Varadero Duschhocker

Seriennummer: *

(vom Fachhandel einzutragen)

Fachhändler:

Datum und Stempel

* Hinweisschilder befinden sich auf dem Seitenrahmen

Bischoff & Bischoff GmbH

Becker-Göring-Straße 13 • D-76307 Karlsbad

Tel.: 0700/6000 7070 • Fax: 0700/6000 8080

www.bischoff-bischoff.com

info@bischoff-bischoff.de

