



**Enjoy mobility.**

## Bedienungs- und Pflegehinweis für Dreh-Übersetzhilfe

Mit der Dreh- Übersetzhilfe haben Sie ein hochwertiges Hilfsmittel für die Krankenpflege im Innenbereich erworben, das in der Praxis unter hohen Dauerbelastungen getestet wurde.

Die Dreh- Übersetzhilfe hat einen Durchmesser von 320mm und eine Höhe von 19mm. Der Drehteller ist durch Silikonstopper auf der Unterseite auf ebenem Boden im Innenbereich weitestgehend rutschfest. Er ist sowohl im Trocken- als auch im Nassbereich einsetzbar.

Legen Sie die Dreh- Übersetzhilfe auf die für die optimale Nutzung richtige Stelle und vermeiden Sie ein Verschieben mit den Füßen, da sich so wegen der guten Stoppwirkung, die Silikonstopper der Unterseite lösen könnten. Sie ist 18- fach kugelgelagert und durch ein in sich zusätzlich drehendes System auch bei schweren Patienten leichtgängig.

**Die Dreh- Übersetzhilfe ist nicht allein zu benutzen! Benutzen Sie die Dreh- Übersetzhilfe immer mit Hilfe einer Pflegeperson, die beim Umsetzen des Patienten durch einfaches Aufstellen des Fußes ein unbeabsichtigtes Drehen und Verrutschen verhindert.**

Die Belastbarkeit beträgt bei gleichmäßiger Belastung 100kg. Die Dreh- Übersetzhilfe kann mit geeigneten handelsüblichen Haushaltsreinigern oder Flächendesinfektionsmitteln für ABS leicht gereinigt werden (Bitter abwischen, nicht eintauchen!).