

**FEHLERDIAGNOSE SCOOTER MIT PG CONTROLLER*****Blinkende Diagnose LED / Symbol***

| Blinkanzahl | Bedeutung/Grund |
|--------------------|---|
| 1 | niedrige Batterispannung oder Ladegerät angeschlossen |
| 2 | Motorverbindung - prüfen der Kabelverbindung oder ob Motor eingekoppelt ist |
| 3 | Motor hat einen Kurzschluss - Kabelverbindung prüfen |
| 4 | Schiebebetrieb oder Kabelverbindung prüfen |
| 5 | nicht belegt |
| 6 | Ladegerät angeschlossen |
| 7 | Fahrwippe - stellen Sie sicher das sich FW in neutraler Stellung befindet |
| 8 | Möglicher Controller Fehler - prüfen der Kabelverbindung |
| 9 | Motorbremse deaktiviert bzw. defekt - prüfen ob Motor eingekoppelt ist |
| 10 | zu hohe Batteriespannung - prüfen der Anschlüsse |