


Bischoff & Bischoff


Bedienungsanleitung

Rezi Gebo



Enjoy mobility.

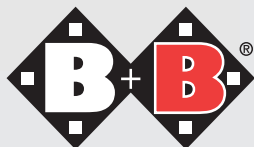

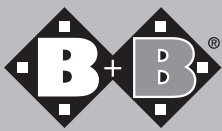

Rezi (Reziprokes Gehgestell)

Gebo (Starres Gehgestell, faltbar)

Sehr geehrter Kunde,

die Ihnen vorliegende Bedienungsanleitung soll Sie mit der Bedienung und Handhabung Ihrer B+B Gehhilfe besser vertraut und somit sicherer machen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und mehr Mobilität mit unserem Produkt!

1. Entfalten

Seitenteile mit Griffen nach aussen schwenken, bis sie hörbar einrasten.

2. Falten

Teleskopverriegelung drücken und gleichzeitig erst das rechte, dann das linke Seitenteil nach innen schwenken.

3. Rahmenhöhe einstellen

Federstift drücken und das Standrohr in der orthopädisch korrekten Position einrasten lassen.

4. Achtung - Sicherheitshinweise - Risikoanalyse nach DIN EN ISO 13485

- Max. Belastbarkeit 120 kg!
- Beim Faltvorgang auf Quetschgefahr achten!
- Hinweise nach der Höheneinstellung:
 - auf korrekten Sitz der Federstifte achten!
 - alle 4 Standfüße auf die gleiche Höhe einstellen!
 - nur auf festem, ebenen Untergrund einsetzen!

5. Technische Daten

	Rezi	Gebo
Gewicht	2,5 kg	2,2 kg
Rahmenhöhe	82-92 cm	82-92 cm
Querstreben	3	2
Höhenverstellung	5-fach	5-fach
Farbe	Bronze	Bronze
Maße (gefaltet)		
Breite	53 cm	58 cm
Tiefe	10 cm	10 cm
Höhe	variabel	variabel

Garantie-Abschnitt

(Achten Sie auf unsere allgemeinen
Geschäftsbedingungen)

Typ: Rezi / Gebo

Seriennummer:*

(vom Fachhandel einzutragen)

Fachhändler:

Datum und Stempel

* Hinweisschilder befinden sich auf dem Seitenrahmen

Bischoff & Bischoff GmbH

Becker-Göring-Straße 13 • D-76307 Karlsbad

Tel.: 0700/6000 7070 • Fax: 0700/6000 8080

www.bischoff-bischoff.com

info@bischoff-bischoff.de

