


Bischoff & Bischoff


Bedienungsanleitung

TS-Care



Enjoy mobility.

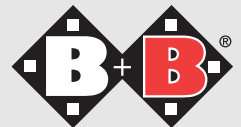

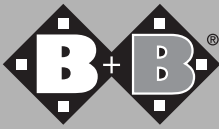

Toilettenrollstuhl „TS-Care“ (ohne Rollen)

Sehr geehrter Kunde,

Mit dem Erwerb dieses B+B Toilettenstuhles verfügen Sie über ein deutsches Spitzenprodukt, das sich schon tausendfach im professionellen Einsatz bewährt hat.

Die Ihnen vorliegende Bedienungsanleitung soll Sie mit der Bedienung und Handhabung Ihres B+B Toilettenstuhles besser vertraut und somit sicherer machen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Produkt!

1. Achtung - Sicherheitshinweise - Risikoanalyse nach DIN EN ISO 13485

- Max. Benutzergewicht 120 kg!
- Benutzung des Toilettenstuhles nur mit einer Begleitperson!

2. Verwendungszweck - Indikationen

Fehlende Rumpfkontrolle, Gleichgewichtsstörungen, Funktionsausfälle an den unteren Extremitäten, Hüft- und Wirbelsäulenversteifung, Einhänder, Tetraplegiker, Armgeschädigte mit erheblicher Störung der Greiffunktion.

3. Anlieferung

Sie bekommen Ihren TS-Care komplett zusammengebaut angeliefert.

4. Gesamtübersicht

- Rückenlehne
- Armpolster
- gepolsterte Sitzplatte
- Sitzpolsterung mit Öffnung
- Toiletteneimer
- Arretierung zur Einstellung der Sitzhöhe



Abb. 1

5. Sitz

Die Sitzpolsterung kann zum einfachen Reinigen des Stuhls abgenommen werden. Überzeugen Sie sich vor jedem Gebrauch, dass die Sitzfläche gut auf dem Rahmen befestigt ist (durch deutliches Einrasten der 3 Arretierklammern).



Achtung!
Einklemmgefahr.

6. Toiletteneimer

Den Toiletteneimer können Sie einfach wechseln bzw. leeren indem Sie ihn von der Rückseite des Toilettenstuhles aus der vorgesehenen Halterung entfernen.

Der Toiletteneimer ist bei geschlossenem Deckel geruchsdicht.

7. Sitzhöhenverstellung

Um die Sitzhöhe Ihres Toilettenstuhles zu verstellen, lösen Sie bei den 4 Füßen die Arretierstifte und stellen Sie die gewünschte Position ein. Die Sitzhöhe ist 5-fach verstellbar.



Achtung!
Alle 4 Füße auf die gleiche Höhe einstellen.



Abb. 2



Abb. 3


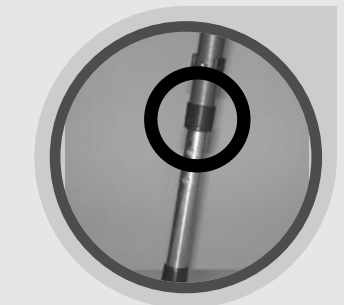


Abb. 4

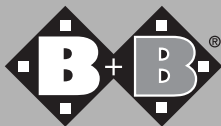

8. Pflege

Durch regelmäßige Pflege behält Ihr B+B Toilettenstuhl für Jahre sein gutes Aussehen. Bei starker Verschmutzung ist es ratsam, ein handelsübliches Putzmittel oder ein Desinfektionsmittel zu verwenden.

Bei der Reinigung dürfen keine aggressiven oder ätzenden Reinigungsmittel verwendet werden!

9. Technische Daten

- Sitzbreite: 40 cm
- Sitztiefe: 42 cm
- Sitzhöhe: 50-60 cm (5 fach verst.)
- Armlehnenhöhe: 19,5 cm
(16 cm mit Sitzplatte)
- Rückenlehnenhöhe: 32 cm
(29 cm mit Sitzplatte)
- Gesamtdaten (L/B/H): 54-55 cm/ 56,5 cm/
81,5-91,5 cm
- Gesamtgewicht 6 kg (7,7 kg mit Sitzplatte)
- Max. Benutzergewicht: 120 kg

10. Garantie

Eine Gewährleistung kann nur übernommen werden, wenn das Produkt unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird. Eine Rücksendung des Produktes muss in der Originalverpackung erfolgen.

Garantie-Abschnitt

(Achten Sie auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen)

Typ: TS-Care

Seriennummer:*

(vom Fachhandel einzutragen)

Fachhändler:

Datum und Stempel

* Hinweisschilder befinden sich auf dem Seitenrahmen

Bischoff & Bischoff GmbH

Becker-Göring-Straße 13 • D-76307 Karlsbad

Tel.: 0700/6000 7070 • Fax: 0700/6000 8080

www.bischoff-bischoff.com

info@bischoff-bischoff.de

