

SCHNELLEINSTIEG* **SCHIEBEHILFE TOGO**



1 Inhalt auf Vollständigkeit prüfen.



5 Togo nun in die obere Führung hineinheben. Verriegelungshebel ziehen und nach oben schwenken. Verriegelung erfolgt rechts und links separat.



2 Durch Betätigung des Hebels nach links unten, wird der elektrische Antrieb ausgekoppelt. Schiebehilfe kann ohne elektrischen Zusatzantrieb geschoben werden.



6 Hebel nach rechts unten drücken. Die Togo ist nun im Fahrbetrieb.



3 Schiebehilfe bis zum Anschlag in die untere Führung fahren. Togo dabei leicht ankippen.



7 Schiebehilfe am Schlüsselhalter einschalten. Die Togo ist nun durch Betätigen des Fahrhebels einsatzbereit.



4 Togo in die untere Führung vollständig hineinheben.

* Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise in Ihrer Bedienungsanleitung