


ALEVO - 4040/4041/4042




BG1 – Rahmen

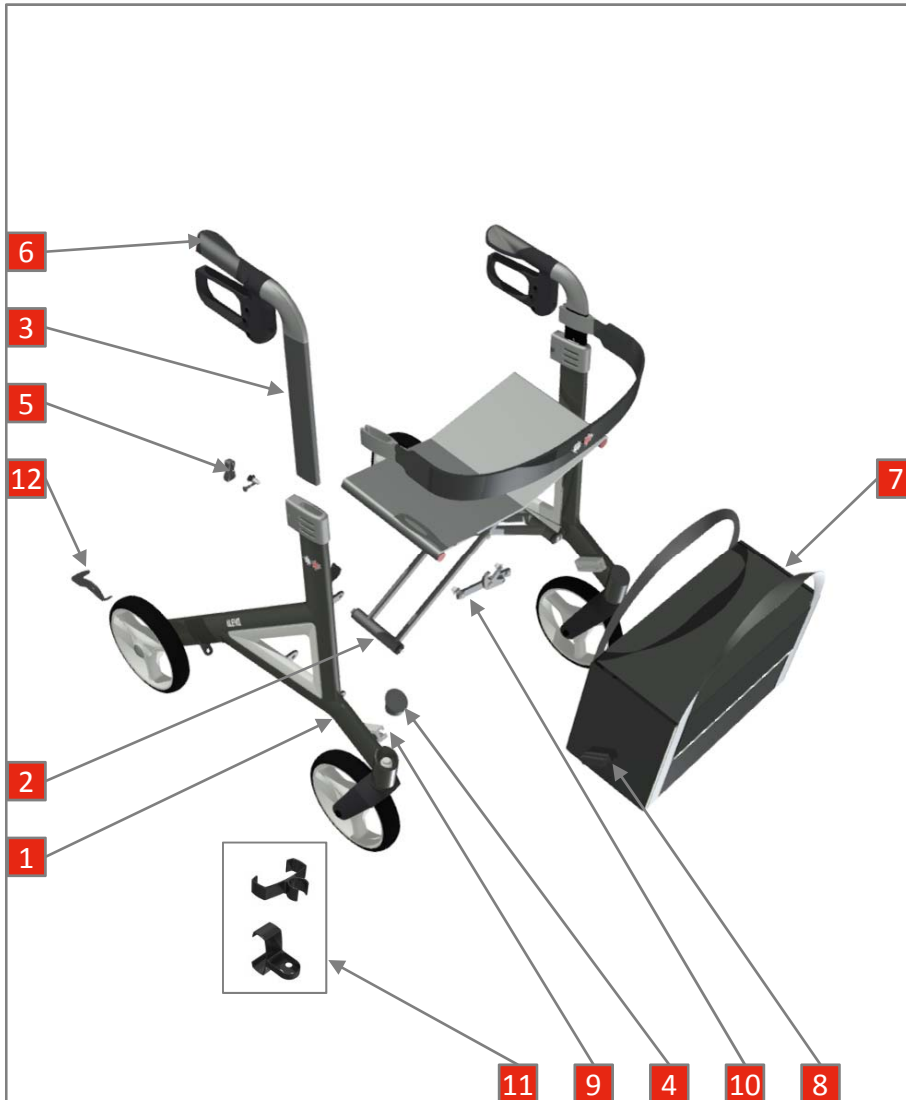

Stückliste - BG1 - Rahmen		
Objekt	AN	Bezeichnung
1	kein Verkauf	Carbon Rahmenteil rechts mokka Alevo
1	kein Verkauf	Carbon Rahmenteil links mokka Alevo
1	kein Verkauf	Carbon Rahmenteil rechts aubergine Alevo
1	kein Verkauf	Carbon Rahmenteil links aubergine Alevo
1	kein Verkauf	Carbon Rahmenteil rechts silber Alevo
1	kein Verkauf	Carbon Rahmenteil links silber Alevo
2	4040108000	Kreuzstrebe komplett Alevo
3	4040112000	Schieberohr rechts Alevo
3	4040113000	Schieberohr links Alevo
4	4040114000	Abdeckkappe Castorbuchse Alevo
5	4040115000	Arretierstift Schieberohr Alevo
6	4040130000	Handgriff rechts Alevo
6	4040131000	Handgriff links Alevo
7	4040146000	Tasche Alevo
8	4040147000	Gleitprofil Tasche Alevo
9	4040148000	Taschenhalter Alevo
10	4040151000	Befestigungshebel inkl. Rastmech. links Alevo
10	4040152000	Befestigungshebel inkl. Rastmech. rechts Alevo
11	4040155000	Halteklammer Stockhalter Alevo
12	4040180000	Ankipphilfe rechts Alevo
12	4040181000	Ankipphilfe links Alevo

BG1 – Rahmen

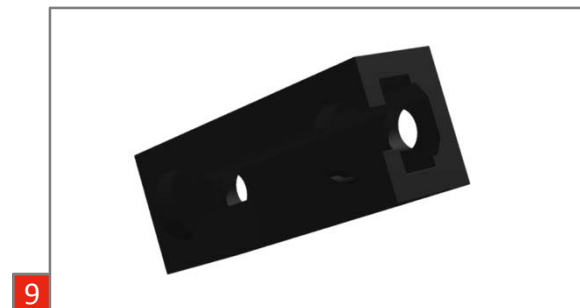

BG1 – Rahmen



BG4 - Vorderrad



Stückliste - BG4 - Vorderräder

Objekt	AN	Bezeichnung
1	404040000	Rad vorne 8" PU inkl. Lager Alevo
2	404040100	Distanzhülse 6mm Profilbereifung Alevo
3	404040200	Achsschraube vorne M8x75mm komplett Alevo
4	404041000	Radgabel inkl. Lager und Lenkbolzen Alevo

BG4 - Vorderrad





BG5 - Hinterrad




Stückliste - BG5 - Hinterräder

Objekt	AN	Bezeichnung
1	4040500000	Rad hinten 8" PU inkl. Lager Alevo
2	4040502000	Achsschraube hinten M8x80mm komplett Alevo
3	4040505000	Abdeckung Radschraube hinten Alevo
4	4040580000	Profilbereifung Alevo
5	4040581000	Umbausatz Profilbereifung Alevo

BG5 - Hinterrad

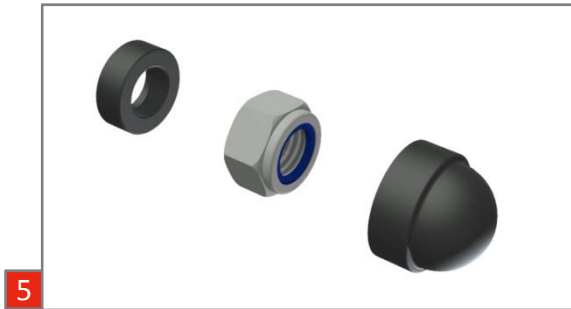
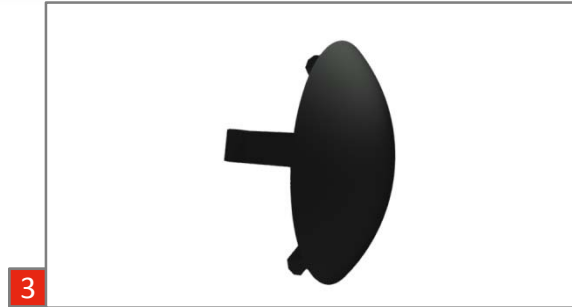


BG6 - Bremse

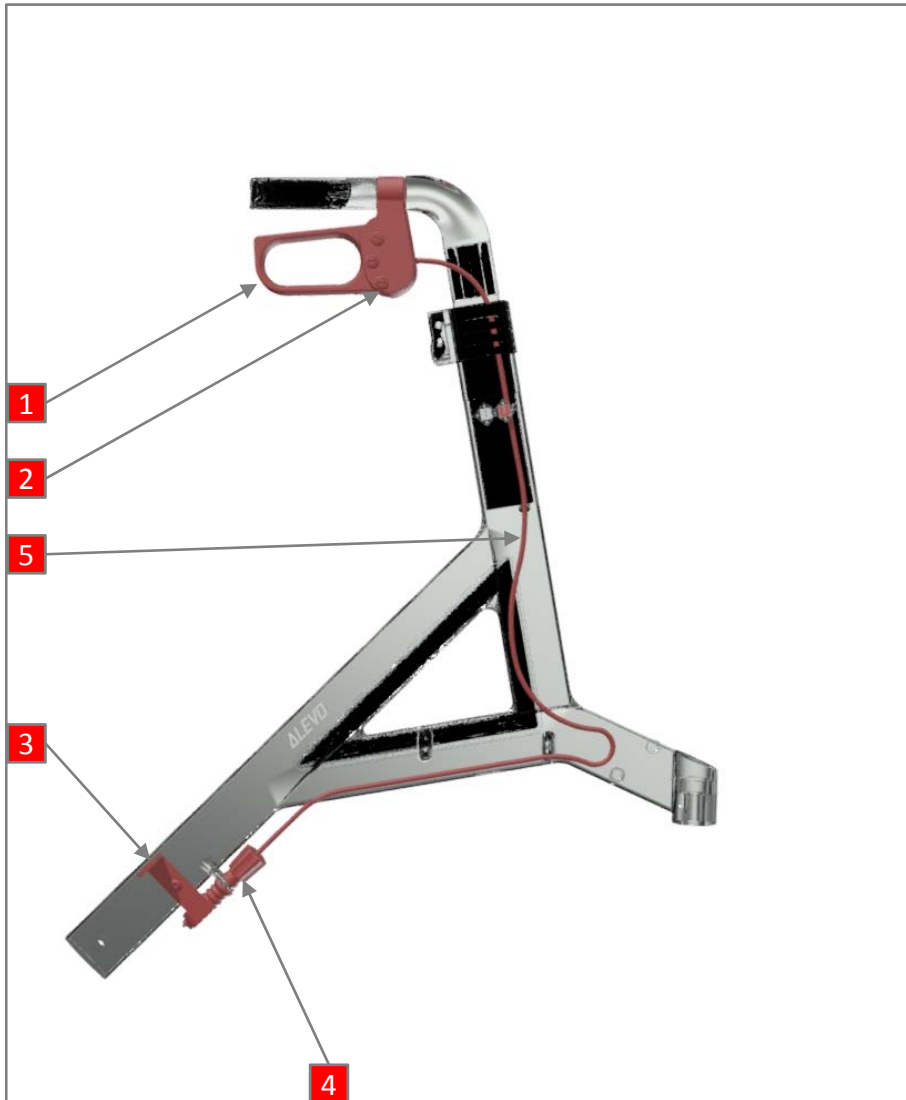

Stückliste - BG6 - Bremse		
Objekt	AN	Bezeichnung
1	4040622000	Bremse rechts Alevo
1	4040623000	Bremse links Alevo
2	4040624000	Schraube Bremshebel Alevo
3	4040625000	Bremsblech links komplett Alevo
3	4040628000	Bremsblech rechts komplett Alevo
4	4040626000	Bremszubehör-Set Alevo
5	4040627000	Bowdenzug komplett Alevo

BG6 - Bremse

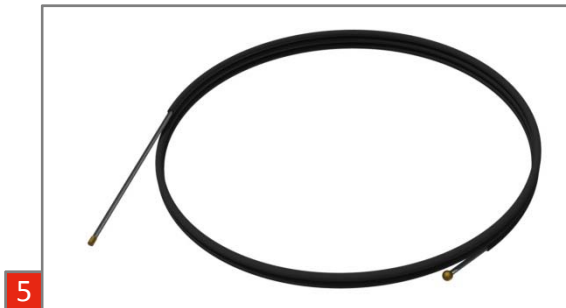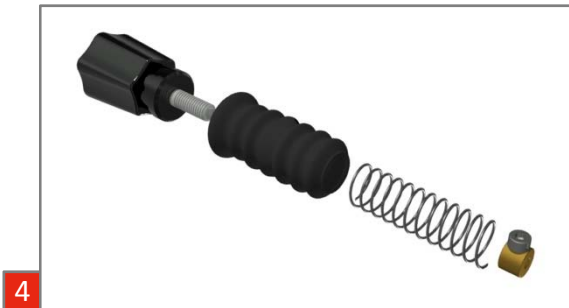

BG9 - Sitz- und Rückenbespannung


Enjoy mobility.



Stückliste - BG9 - Sitz und Rücken

Objekt	AN	Bezeichnung
1	4040902000	Rückengurt inkl. Sterngriffschraube Alevo
2	4040903000	Sterngriffschraube Rückengurt Alevo
3	4040905000	Sitzbespannung komplett Alevo

BG9 - Sitz- und Rückenbespannung

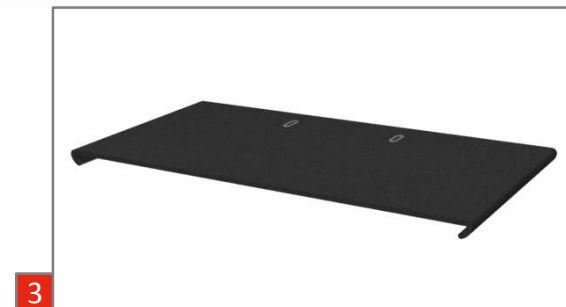



Stückliste - BG8 - Zubehör

Objekt	AN	Bezeichnung
1	4040801000	Flaschenhalter Alevo
2	4040803000	Regenschirm Alevo
3	4040805000	Stockhalter Alevo

Zubehör

