

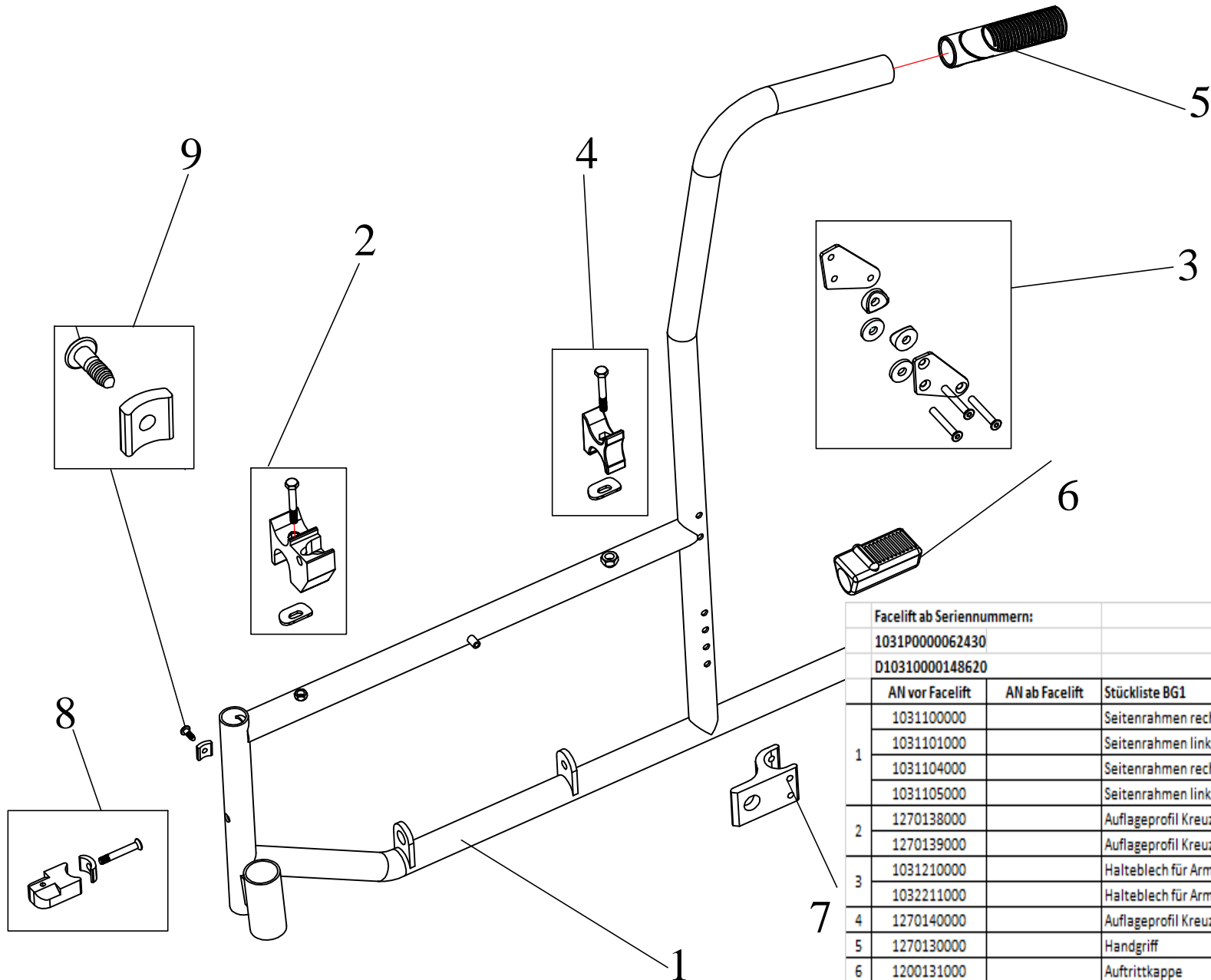
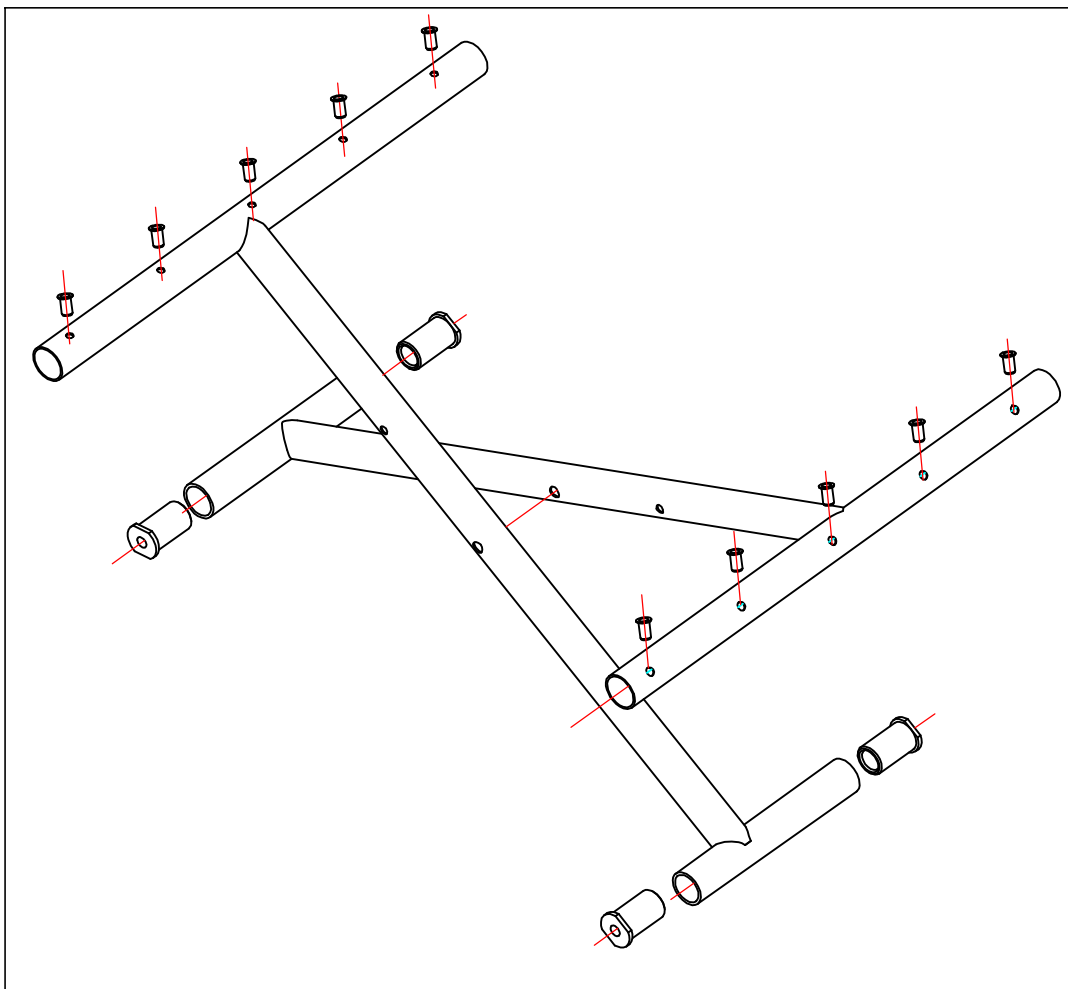
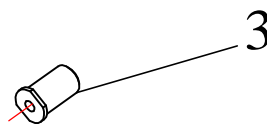





S - Eco 300 Modell 1031

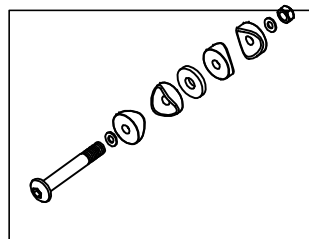


Facelift ab Seriennummern:				
1031P0000062430				
D10310000148620				
	AN vor Facelift	AN ab Facelift	Stückliste BG1	Bezeichnung 2
1	1031100000		Seitenrahmen rechts silber SB 37-49cm	für S-Eco 300
	1031101000		Seitenrahmen links silber SB 37-49cm	für S-Eco 300
	1031104000		Seitenrahmen rechts silber SB 52cm	für S-Eco 300
	1031105000		Seitenrahmen links silber SB 52cm	für S-Eco 300
2	1270138000		Auflageprofil Kreuzstrebe	vorne links für S-Eco 300
	1270139000		Auflageprofil Kreuzstrebe	vorne rechts für S-Eco 300
3	1031210000		Halteblech für Armlehnscharnier rechts	komplett für S-Eco 300
	1032211000		Halteblech für Armlehnscharnier links	komplett für S-Eco 300
4	1270140000		Auflageprofil Kreuzstrebe	hinten für S-Eco 300
5	1270130000		Handgriff	für S-Eco 300
6	1200131000		Auftrittskappe	für S-Eco 300
7	1330142000		Adapterblock	für Profilrohr S-Eco 300
8	1352138000		Arretierprofil Beinstütze	für S-Eco 300
9	1030316000		Sicherungs-Aluprofil für Beinstütze	für S-Eco 300

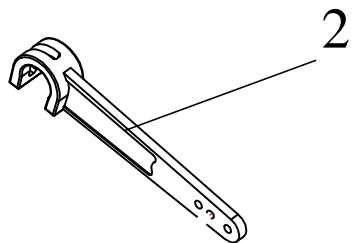



Facelift ab Seriennummern:				
1031P0000062430				
D10310000148620				
	AN vor Facelift	AN ab Facelift	Stückliste BG1.1	Bezeichnung 2
1	1031115000		Kreuzstrebe schwarz SB 37cm komplett	für S-Eco 300
	1031116000		Kreuzstrebe schwarz SB 40cm komplett	für S-Eco 300
	1031117000		Kreuzstrebe schwarz SB 43cm komplett	für S-Eco 300
	1031118000		Kreuzstrebe schwarz SB 46cm komplett	für S-Eco 300
	1031119000		Kreuzstrebe schwarz SB 49cm komplett	für S-Eco 300
	1031120000		Kreuzstrebe schwarz SB 52cm komplett	für S-Eco 300
2	1030125000		Befestigungshebel für Kreuzstrebe	SB 37-43cm für S-Eco 300
	1030126000		Befestigungshebel für Kreuzstrebe	SB 46-52cm für S-Eco 300
3	1270136000		Gewindebuchse für Kreuzstrebe	für S-Eco 300
4	1270115000		Schraube für Kreuzstrebe komplett	für S-Eco 300

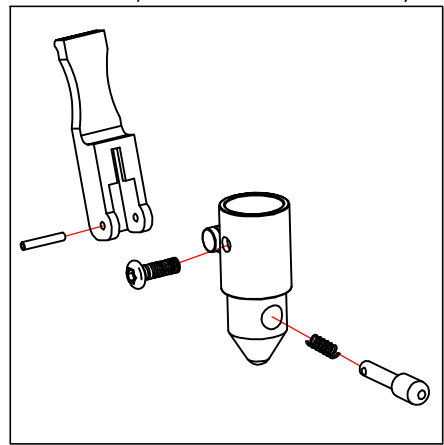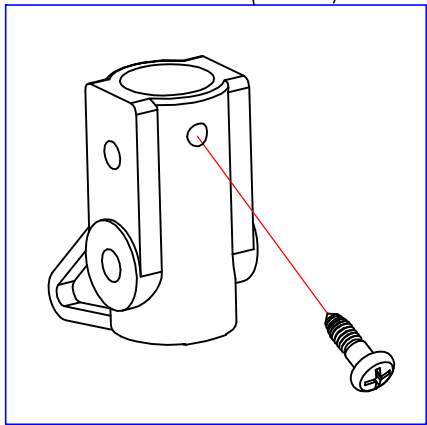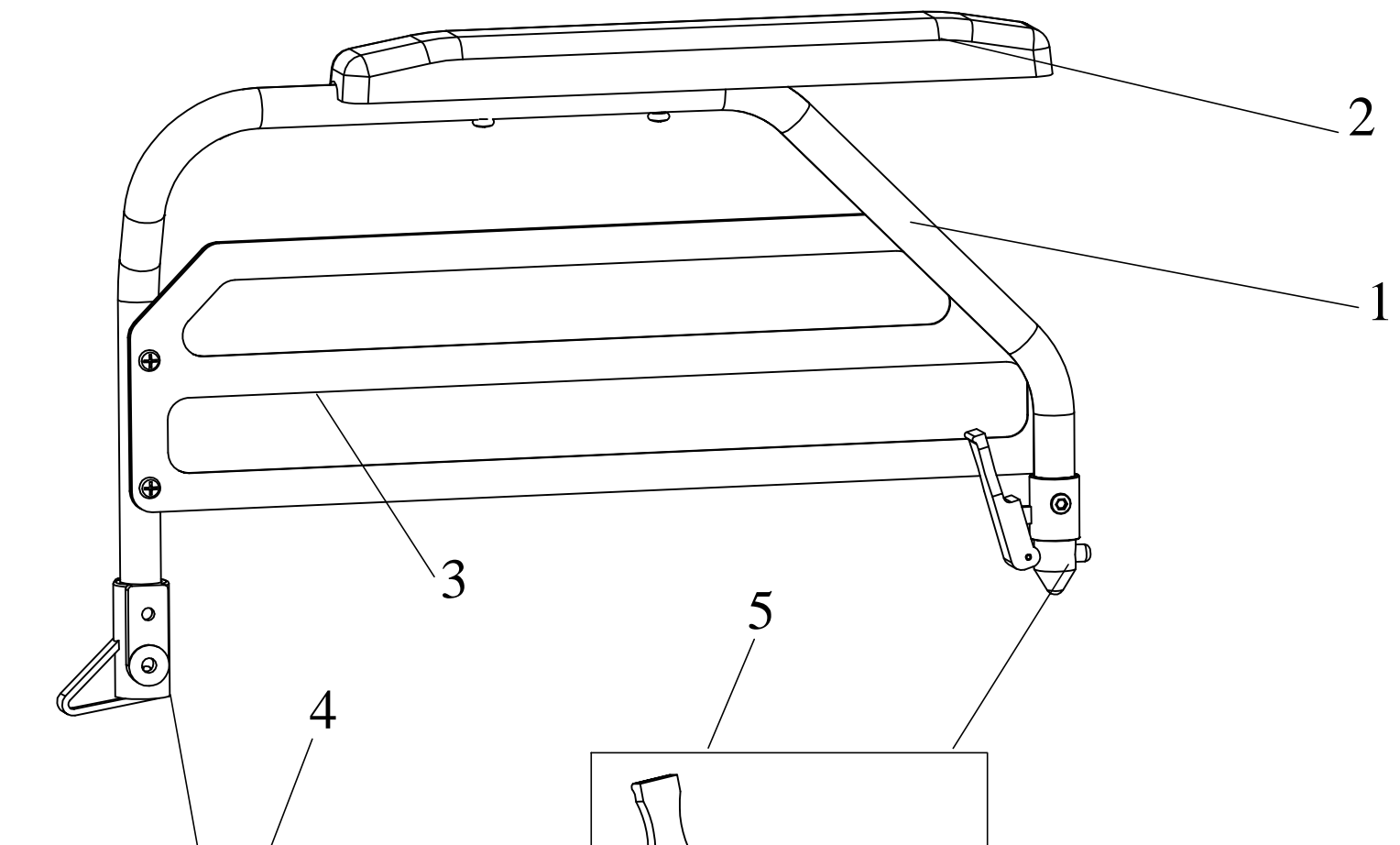

Facelift ab Seriennummern:				
1031P0000062430				
D10310000148620				
	AN vor Facelift	AN ab Facelift	Stückliste BG2	Bezeichnung 2
1	1031201000	0009213000	Seitenteil links silber	für S-Eco 300
	1031202000	0009214000	Seitenteil rechts silber	für S-Eco 300
2	1030220000	1352210000	Armlehnenpolster Duo	für S-Eco 300
3	1270210000	0009212000	Kleiderschutz rechts, Kunststoff	für S-Eco 300
	1270210001	0009211000	Kleiderschutz links, Kunststoff	für S-Eco 300
4	1260212000		Armlehnscharnier	für S-Eco 300
5	1270217000		Federsystem für Seitenteil	links komplett für S-Eco 300
	1270218000		Federsystem für Seitenteil	rechts komplett für S-Eco 300

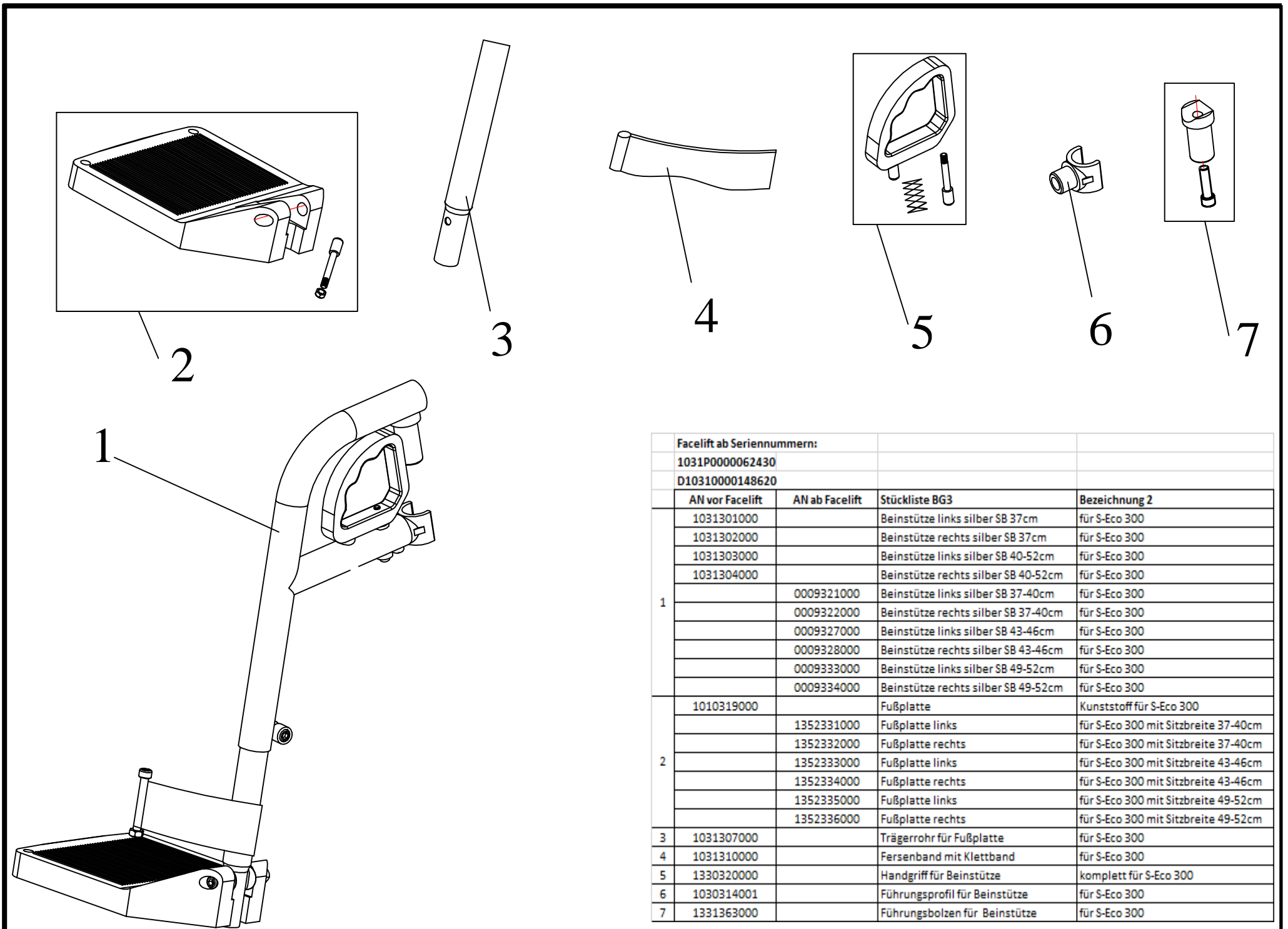


Facelift ab Seriennummern:				
1031P0000062430				
D10310000148620				
	AN vor Facelift	AN ab Facelift	Stückliste BG3	Bezeichnung 2
1	1031301000		Beinstütze links silber SB 37cm	für S-Eco 300
	1031302000		Beinstütze rechts silber SB 37cm	für S-Eco 300
	1031303000		Beinstütze links silber SB 40-52cm	für S-Eco 300
	1031304000		Beinstütze rechts silber SB 40-52cm	für S-Eco 300
		0009321000	Beinstütze links silber SB 37-40cm	für S-Eco 300
		0009322000	Beinstütze rechts silber SB 37-40cm	für S-Eco 300
		0009327000	Beinstütze links silber SB 43-46cm	für S-Eco 300
		0009328000	Beinstütze rechts silber SB 43-46cm	für S-Eco 300
		0009333000	Beinstütze links silber SB 49-52cm	für S-Eco 300
		0009334000	Beinstütze rechts silber SB 49-52cm	für S-Eco 300
2	1010319000		Fußplatte	Kunststoff für S-Eco 300
		1352331000	Fußplatte links	für S-Eco 300 mit Sitzbreite 37-40cm
		1352332000	Fußplatte rechts	für S-Eco 300 mit Sitzbreite 37-40cm
		1352333000	Fußplatte links	für S-Eco 300 mit Sitzbreite 43-46cm
		1352334000	Fußplatte rechts	für S-Eco 300 mit Sitzbreite 43-46cm
		1352335000	Fußplatte links	für S-Eco 300 mit Sitzbreite 49-52cm
	1352336000	Fußplatte rechts	für S-Eco 300 mit Sitzbreite 49-52cm	
3	1031307000		Trägerrohr für Fußplatte	für S-Eco 300
4	1031310000		Fersenband mit Klettband	für S-Eco 300
5	1330320000		Handgriff für Beinstütze	komplett für S-Eco 300
6	1030314001		Führungsprofil für Beinstütze	für S-Eco 300
7	1331363000		Führungsbolzen für Beinstütze	für S-Eco 300

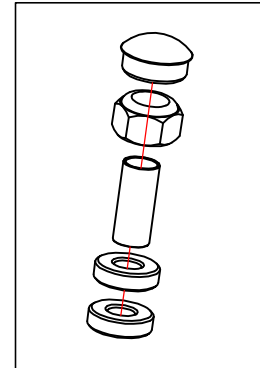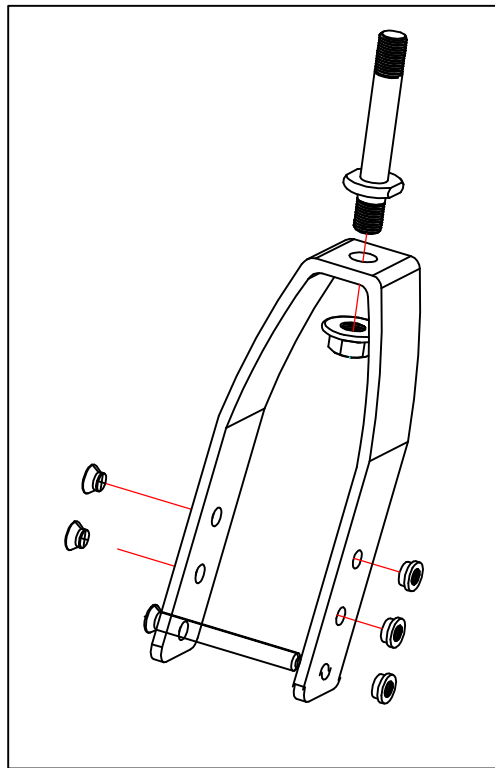

4

1

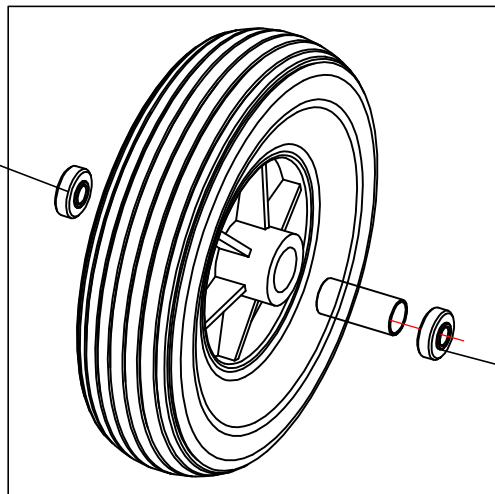


3


2

3


Facelift ab Seriennummern:				
1031P0000062430				
D10310000148620				
	AN vor Facelift	AN ab Facelift	Stückliste BG4	Bezeichnung 2
1	1031401000		Radgabel 3-Loch rechts	mit Lenkachse für S-Eco 300
	1031402000		Radgabel 3-Loch links	mit Lenkachse für S-Eco 300
3	1200408000		Radlager	für Vorderrad S-Eco 300
	1270408000		Lagerdistanzhülse (o. Abb.)	Castorbuchse für S-Eco 300
4	1330480000		Lenklagersatz	Castorbuchse für S-Eco 300
2	9500132000		Rad vorne 200x50mm, PU	Achse 8mm für S-Eco 300

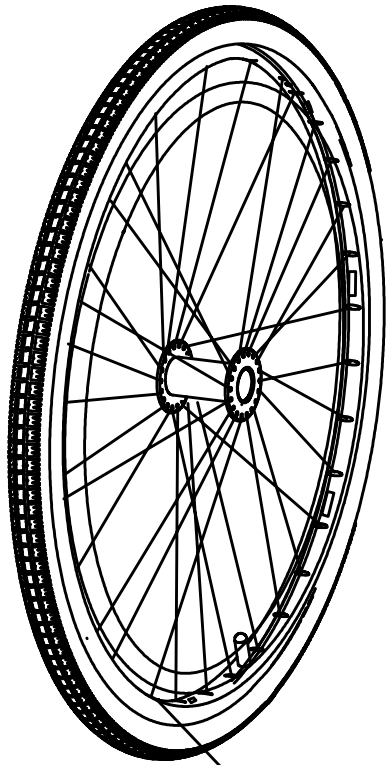


1

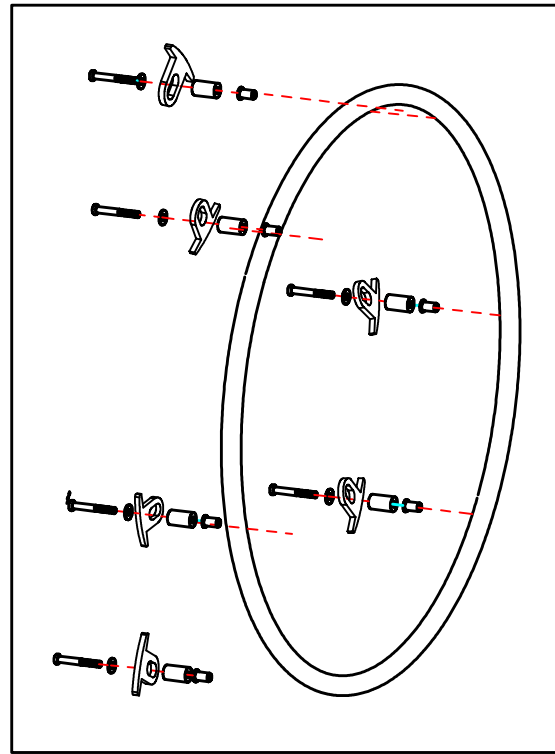


2

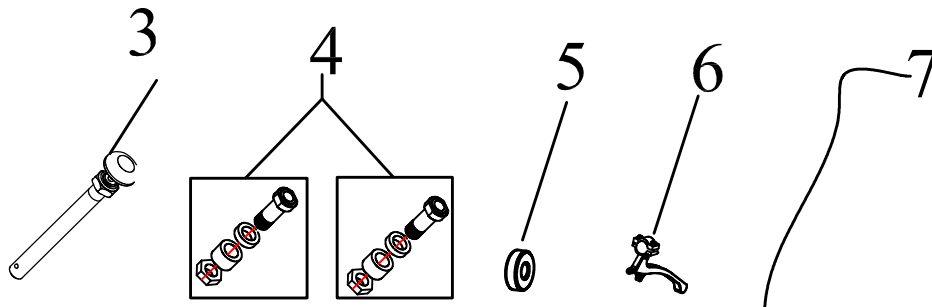

Facelift ab Seriennummern:				
1031P0000062430				
D10310000148620				
	AN vor Facelift	AN ab Facelift	Stückliste BG5	Bezeichnung 2
1	9500161000		Rad 24" PU, komplett	6-Punkt Alu-Greifreifen für S-Eco 300
	9500201000		Rad 24" PU, Trommelbremse	6-Punkt Alu-Greifreifen für S-Eco 300
5	1010408000		Radlager	Hinterrad S-Eco 300
4	1270509000		Lagerbuchse 51mm	für Steckachse S-Eco 300
3	1270510000		Steckachse	für Hinterrad für S-Eco 300
2	1310515000		Greifreifen 24", 6-Punkt	für S-Eco 300
o..Abb.	9000667000		Trommelbremsträger rechts	mit Bremsbacken für S-Eco 300
	9000668000		Trommelbremsträger links	mit Bremsbacken für S-Eco 300
	9000687000		Verdrehsicherungsprofil TB links	für S-Eco 300
	9000688000		Verdrehsicherungsprofil rechts TB	für S-Eco 300
6	9000804000		Handbremshebel für Trommelbremse	25mm selbstauslösend für S-Eco 300
7	9000815000		Brems- und Bowdenzug komplett	für Trommelbremse S-Eco 300
4	9000823000		Lagerbuchse 63mm	für Steckachse TB S-Eco 300

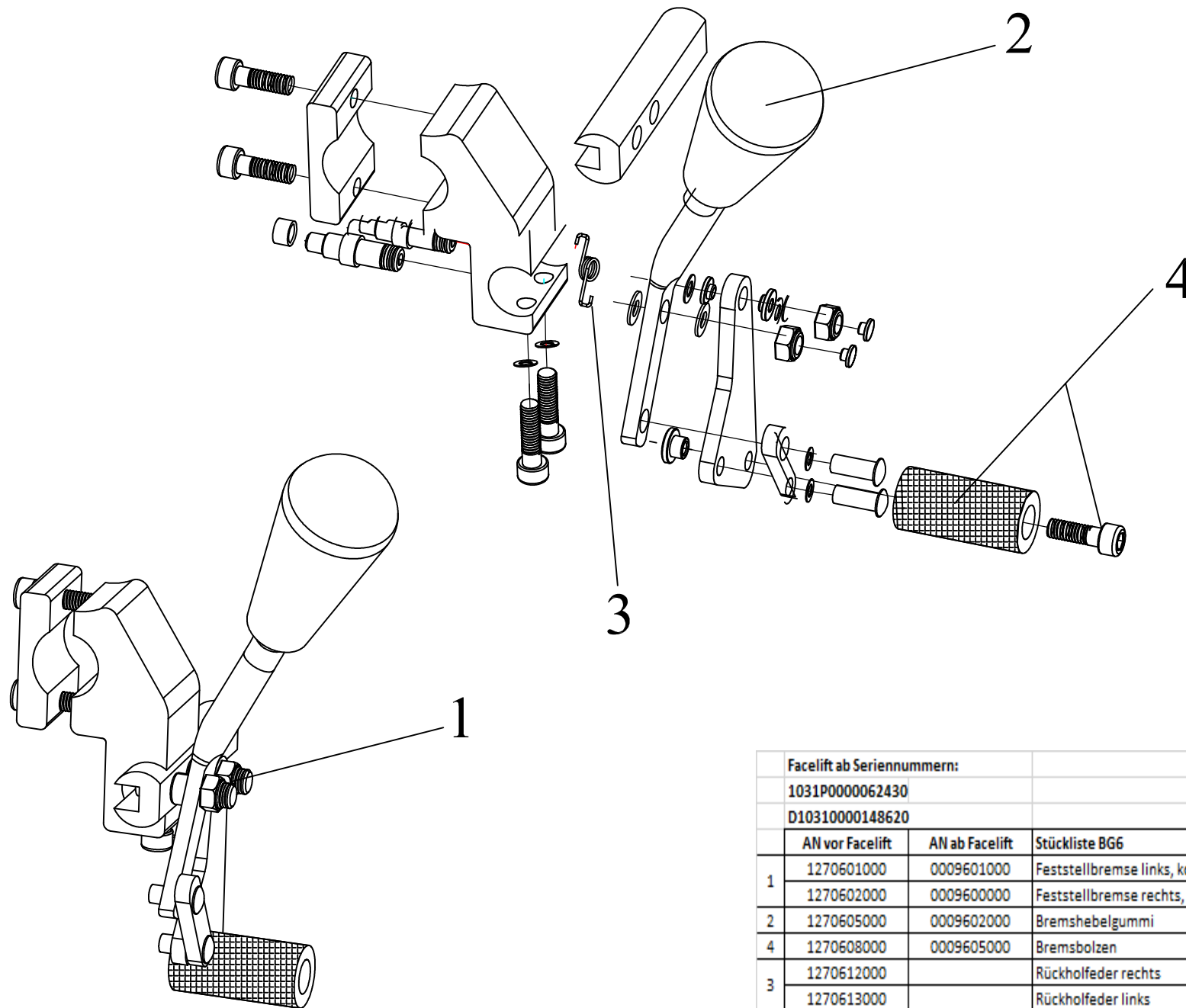

Facelift ab Seriennummern:				
1031P0000062430				
D10310000148620				
	AN vor Facelift	AN ab Facelift	Stückliste BG6	Bezeichnung 2
1	1270601000	0009601000	Feststellbremse links, komplett	für S-Eco 300
	1270602000	0009600000	Feststellbremse rechts, komplett	für S-Eco 300
2	1270605000	0009602000	Bremshebelgummi	für Feststellbremse S-Eco 300
4	1270608000	0009605000	Bremsbolzen	für Feststellbremse S-Eco 300
3	1270612000		Rückholfeder rechts	für Bremshebel Feststellbremse S-Eco 300
	1270613000		Rückholfeder links	für Bremshebel Feststellbremse S-Eco 300

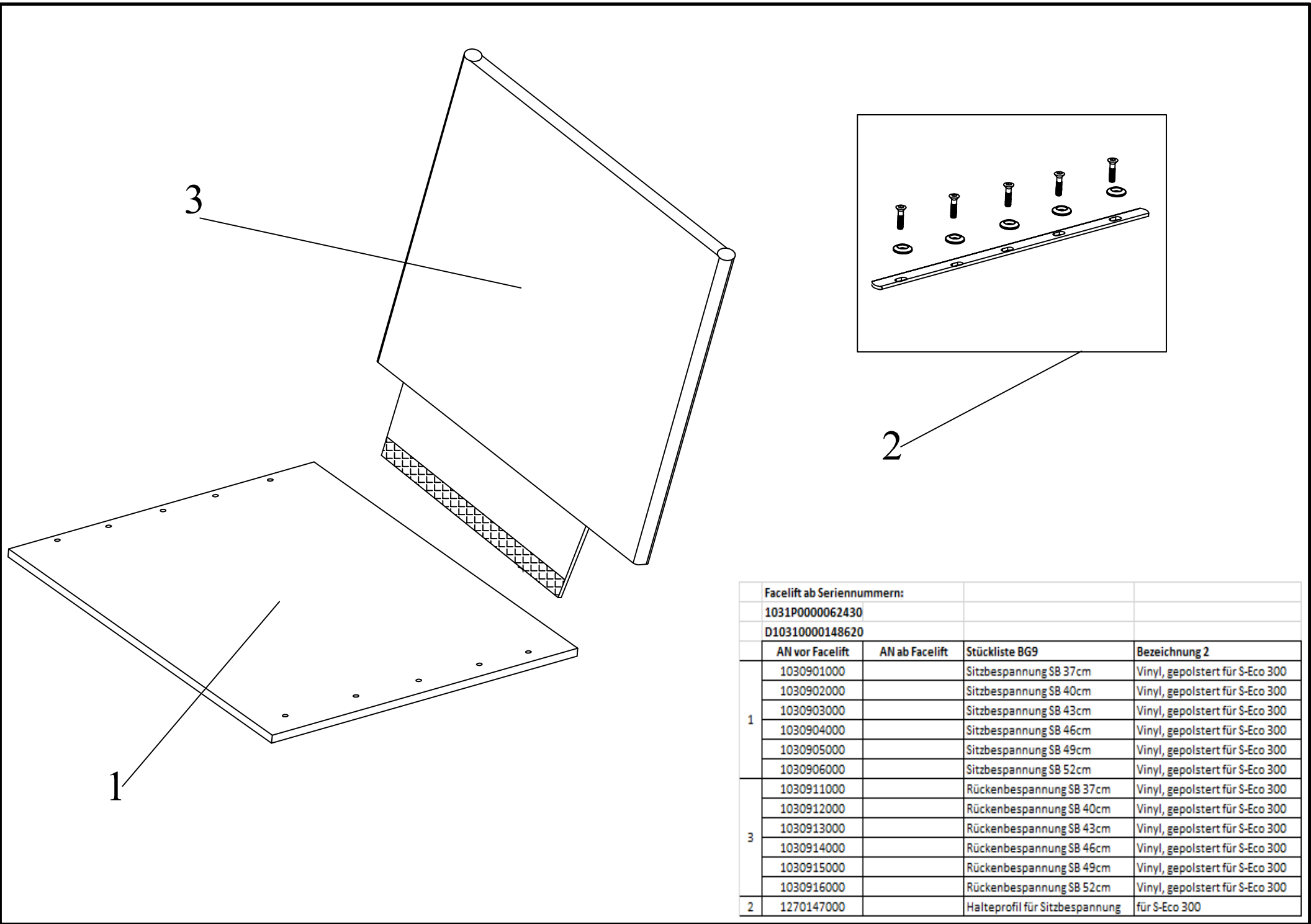

Facelift ab Seriennummern:				
1031P0000062430				
D10310000148620				
	AN vor Facelift	AN ab Facelift	Stückliste BG9	Bezeichnung 2
1	1030901000		Sitzbespannung SB 37cm	Vinyl, gepolstert für S-Eco 300
	1030902000		Sitzbespannung SB 40cm	Vinyl, gepolstert für S-Eco 300
	1030903000		Sitzbespannung SB 43cm	Vinyl, gepolstert für S-Eco 300
	1030904000		Sitzbespannung SB 46cm	Vinyl, gepolstert für S-Eco 300
	1030905000		Sitzbespannung SB 49cm	Vinyl, gepolstert für S-Eco 300
	1030906000		Sitzbespannung SB 52cm	Vinyl, gepolstert für S-Eco 300
3	1030911000		Rückenbespannung SB 37cm	Vinyl, gepolstert für S-Eco 300
	1030912000		Rückenbespannung SB 40cm	Vinyl, gepolstert für S-Eco 300
	1030913000		Rückenbespannung SB 43cm	Vinyl, gepolstert für S-Eco 300
	1030914000		Rückenbespannung SB 46cm	Vinyl, gepolstert für S-Eco 300
	1030915000		Rückenbespannung SB 49cm	Vinyl, gepolstert für S-Eco 300
	1030916000		Rückenbespannung SB 52cm	Vinyl, gepolstert für S-Eco 300
2	1270147000		Halteprofil für Sitzbespannung	für S-Eco 300