

# Feststellbremse Facelift

Enjoy mobility.



Alle Modelle ab 2019 und mit nachgerüsteter Facelift Feststellbremse  
Austausch der Spannfeder im eingebauten Zustand

Nr	Ablauf	Beschreibung
		<p><b>WICHTIG:</b> Dieses Dokument zeigt den Austausch der Spannfeder im Eingebauten Zustand der Bremse, wenn die Windung der unteren Führung gebrochen ist.</p> <p>Sollte die obere Führung abgebrochen sein, muss die alte Feder an der unteren Führung zusätzlich mit einem geeigneten Werkzeug abgeschnitten werden.</p>
1		<p>Mit einem 4mm Inbus-Schlüssel die Schraube der oberen Führung ausbauen und die Reste der alten Feder entfernen.</p>


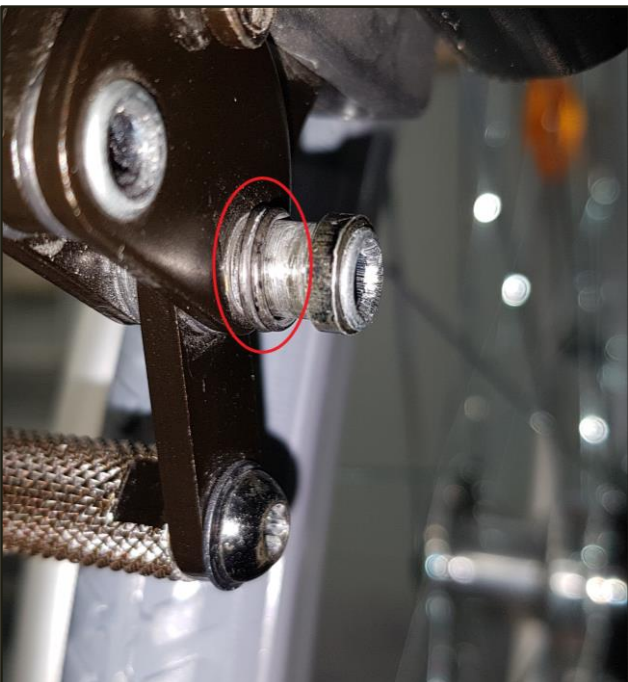
# Feststellbremse

## Facelift

Enjoy mobility.



Alle Modelle ab 2019 und mit nachgerüsteter Facelift Feststellbremse  
Austausch der Spannfeder im eingebauten Zustand

Nr	Ablauf	Beschreibung
2		<p>Die neue Feder hat keine Ober oder Unterseite, es muss jedoch die Einbaurichtung der Befestigungswindung beachtet werden.</p>
3		<p>Sollten auf der unteren Führung Reste der Alten Feder vorhanden sein, müssen diese nicht entfernt werden.</p>



# Feststellbremse

## Facelift

Enjoy mobility.



Alle Modelle ab 2019 und mit nachgerüsteter Facelift Feststellbremse  
Austausch der Spannfeder im eingebauten Zustand



Nr	Ablauf	Beschreibung
4		<p>Neue Feder so auf die untere Führung ansetzen das die Öffnung der Windung zur Rückseite des Rollstuhls zeigt.</p>
5		<p>Feder vorsichtig mit den Finger auf die Führung drücken. Die Windung biegt sich leicht auf und rutscht über den Bund der Führung.</p>

# Feststellbremse Facelift

Enjoy mobility.



Alle Modelle ab 2019 und mit nachgerüsteter Facelift Feststellbremse  
Austausch der Spannfeder im eingebauten Zustand

Nr	Ablauf	Beschreibung
6		<p>Feder nach oben drehen. Mit dem Inbus-Schlüssel 4mm die Schraube mit der oberen Führung in die Windung einsetzen und wieder in das Gewinde einschrauben.</p> <p>Die Feder muss hierfür eventuell leicht gespannt werden.</p>
7		<p>Befestigungsschraube handfest mit einem kurzen Sechskantschraubenschlüssel nach DIN ISO 2936 anziehen.</p>