

Protokollblatt bitte kopieren und Kopie verwenden

Kunde:	Revolution BX 11	Pyro light Optima / XL, Pyro Start Pyro Start Plus / SL	S - Eco 300 / XL, S - Eco 2, Econ XXL	S - VR	Triton 1 + 2, Protego / SL	Neo Taiga Terra Triplex	Fortis, Flip, Centuro Mini, Centuro S2, S4, S7	Togo
<b>Baugruppe 1 - Rahmen - Gehäuse</b>								
Standprüfung (Montage- Richtplatte)	X	X	X	X	X			
Sichtprüfung (Lack / Chrom / Polster)	X	X	X	X	X	X	X	X
Falt- / Klappmechanismus überprüfen	X	X	X	X	X	X	X	X
Kontrolle der Konstruktion (Schweißnähte, Lötstellen etc.)	X	X	X	X	X	X	X	X
Federstifte/-bolzen kontrollieren	X				X			X
Kontrolle der Sitzwinkeleinstellung	X	X	X	X	X	X	X	
<b>Baugruppe 2 - Seitenteile</b>								
Klappmechanismus überprüfen		X	X	X				
Breiten-, Höhen-, Tiefeneinstellung überprüfen (Sitzbreite und Armpolster)			X			X	X	
Steckmechanismus überprüfen					X	X	X	
Einrastmechanismus überprüfen		X	X	X	X	X	X	
Federstifte kontrollieren					X	X	X	
Halter für Controller überprüfen						X		
<b>Baugruppe 3 - Beinstützen</b>								
Funktion und Leichtgängigkeit überprüfen		X	X	X	X	X		
Montage / Demontage überprüfen		X	X	X	X	X		
Einrastmechanismus überprüfen		X	X	X	X	X		
Wadenpolster überprüfen					X	X		
Winkelverstellbare Fußplatte überprüfen	X	X	X			X		
<b>Baugruppe 4 - Räder vorne</b>								
Spiel Radlager überprüfen	X	X	X	X	X	X	X	X
Spiel Lenklager überprüfen	X	X	X	X	X	X	X	
Position der Castorbuchse überprüfen		X	X					
Steckachse einstellen und ölen	X							
bei Luftbereifung Druck überprüfen	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	

<b>Baugruppe 5 - Räder hinten</b>								
Spiel Radlager überprüfen	X	X	X	X	X	X	X	
Steckachse einstellen und ölen	X	X	X	X				
bei Luftbereifung Druck überprüfen	6 - 7,5 bar	6 - 7,5 bar	3 - 4,5 bar	3 - 4,5 bar	3 - 4,5 bar	3 - 4,5 bar	3,5 bar	
Greifreifenbefestigung überprüfen	X	X	X	X	X			
Speichen überprüfen	X	X	X	X	X			
auf Abstand zum Seitenteil achten	X	X	X	X	X			
<b>Baugruppe 6 - Bremsen</b>								
Bremsspiel einstellen	15mm	18mm	15mm	12mm	25mm			
Bremse verdrehsicher befestigen		X	X	X				
Bremsprüfung (gebremste Räder oder Rollen)	X	X	X	X	X	elektrisch	elektrisch	elektrisch
<b>Baugruppe 7 - Antriebe / Batterien</b>								
Getriebebeschaltung überprüfen						X	X	X
Ölstand in Getriebe überprüfen								
Batterien auf Beschädigungen überprüfen						X	X	X
Batterien auf festen Sitz überprüfen						X	X	X
Batterien auf Dichtigkeit überprüfen						X	X	X
Batteriekappen auf festen Sitz überprüfen						X	X	
Motoren- und Antriebs- Gehäuseprüfung						X	X	X
Geräuschprüfung Motoren und Antriebe						X	X	X
Zugentlastungen überprüfen						X	X	
Typenschild vorhanden?						X	X	X
<b>Baugruppe 8 - Elektrosteuerung</b>								
Kabel- und Steckverbindungen überprüfen						X	X	X
Handbedienung Funktionsprüfung						X	X	X
Handbedienung auf Beschädigungen überprüfen						X	X	X
Sicherungsgehäuse auf Beschädigung überprüfen						X	X	
Ladegerät auf Beschädigung überprüfen						X	X	X
Netzstecker und Netzzuleitung überprüfen						X	X	X
Zugentlastungen überprüfen						X	X	
Schalter- und Lampentest						X	X	X
Typenschild vorhanden?						X	X	X
<b>Baugruppe 9 - Sitz- / Rückeneinheit</b>								
Passung Rückenlehne überprüfen						X	X	
Rückenlehnenverstellung überprüfen	X		X		X	X	X	

<b>Allgemeine Maßnahmen</b>								
Scharfe Kanten / Grate beseitigen	X	X	X	X	X	X	X	X
Schrauben* und Anbauteile (Schiebegriffe etc.) auf festen Sitz und Grate überprüfen *Anziehdrehmomente nach ISO 898-1	X	X	X	X	X	X	X	X
Sauberheitskontrolle	X	X	X	X	X	X	X	X
Bedienungsanleitung vorhanden?	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Funktion des Zubehörs (montiert)</b>								
Waagrecht verstellbare Beinstützen		X	X	X	X	X	X	
Höhenverstellbare Seitenteile		X	X			X	X	
Bremshebelverlängerung	X	X	X	X	X			
Kipprollen	X	X	X	X	X	X	X	
Kopfstützen		X	X	X	X	X	X	
Seitenpelotten								
Kniepelotten								
Abduktionskeil								
Hemiplegiker Armauflage								

Ergänzend sind die Anweisungen in der Gebrauchsanleitung zu berücksichtigen !

**Ausfüllanleitung:**

in Ordnung =  ✓

Beschädigung =

Austausch / Ersatz =  ✓

**Wartung durchgeführt von:**

---

Stempel und Unterschrift

**Nächster Service:**

---

**Ort / Datum:**

---