

Protokollblatt bitte kopieren und Kopie verwenden

Kunde:

Revolution BX 11	Pyro light Optima / XL, Pyro Start, Pyro Start Plus / SL	S - Eco 300 / XL, S - Eco 2, Econ XXL	S - VR	Triton 1 + 2, Protego / SL	Via, Eltego, Terra, Triplex, Taiga, Neo XXL	Fortis, Flip, Centuro Mini, Centuro S2, S4, S7	Togo
------------------	--	---------------------------------------	--------	----------------------------	---	--	------

Baugruppe 1 - Rahmen - Gehäuse

Standprüfung (Montage- Richtplatte)	X	X	X	X	X		
Sichtprüfung (Lack / Chrom / Polster)	X	X	X	X	X	X	X
Falt- / Klappmechanismus überprüfen	X	X	X	X	X	X	X
Kontrolle der Konstruktion (Schweißnähte, Lötstellen etc.)	X	X	X	X	X	X	X
Federstifte/-bolzen kontrollieren	X				X		X
Kontrolle der Sitzwinkleinstellung	X	X	X	X	X	X	

Baugruppe 2 - Seitenteile

Klappmechanismus überprüfen	x	X	X	X			x
Breiten-, Höhen-, Tiefeneinstellung überprüfen (Sitzbreite und Armpolster)	x		X			X	X
Steckmechanismus überprüfen	x				X	X	X
Einrastmechanismus überprüfen	x	X	X	X	X	X	X
Federstifte kontrollieren	x	x	x		X	X	X
Halter für Controller überprüfen						X	

Baugruppe 3 - Beinstützen

Funktion und Leichtgängigkeit überprüfen	x	X	X	X	X	X	
Montage / Demontage überprüfen	x	X	X	X	X	X	
Einrastmechanismus überprüfen	x	X	X	X	X	X	
Wadenpolster überprüfen					X	X	
Winkelverstellbare Fußplatte überprüfen	X	X	X			X	

Baugruppe 4 - Räder vorne

Spiel Radlager überprüfen	X	X	X	X	X	X	X	X
Spiel Lenklager überprüfen	X	X	X	X	X	X	X	
Position der Castorbuchse überprüfen	x	X	X			x		
bei Luftbereifung Druck überprüfen	2,0 - 2,5 bar	2,0 - 2,5 bar	2,0 - 2,5 bar	2,0 - 2,5 bar	2,0 - 2,5 bar	2,0 bar 3,0 bar Neo	2,5 bar / 3,0 bar je nach Reifen	

Baugruppe 5 - Räder hinten


Spiel Radlager überprüfen	X	X	X	X	X	X	X	
Steckachse einstellen und ölen	X	X	X	X				


bei Luftbereifung Druck überprüfen	6,0 - 7,5 bar	6,0 - 7,5 bar	3,0 - 4,5 bar	3,0 - 4,5 bar	3,0 - 4,5 bar	3,0 - 4,5 bar 2,7 bar Via	2,5 bar / 3.0 bar je nach Reifen	
Greifreifenbefestigung überprüfen	X	X	X	X	X			
Speichen überprüfen	X	X	X	X	X			
auf Abstand zum Seitenteil achten	X	X	X	X	X			
Baugruppe 6 - Bremsen								
Bremsspiel einstellen	15 mm	15 mm	15 mm	12 mm	25 mm			
Bremse verdrehsicher befestigen	x	X	X	X				
Bremsprüfung (gebremste Räder oder Rollen)	X	X	X	X	X	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Baugruppe 7 - Antriebe / Batterien								
Getriebebeschaltung überprüfen						X	X	X
Ölstand in Getriebe überprüfen								
Batterien auf Beschädigungen überprüfen						X	X	X
Batterien auf festen Sitz überprüfen						X	X	X
Batterien auf Dichtigkeit überprüfen						X	X	X
Batteriekappen auf festen Sitz überprüfen						X	X	
Motoren- und Antriebs- Gehäuseprüfung						X	X	X
Geräuschprüfung Motoren und Antriebe						X	X	X
Zugentlastungen überprüfen						X	X	
Typenschild vorhanden?						X	X	X
Baugruppe 8 - Elektrosteuerung								
Kabel- und Steckverbindungen überprüfen						X	X	X
Handbedienung Funktionsprüfung						X	X	X
Handbedienung auf Beschädigungen überprüfen						X	X	X
Sicherungsgehäuse auf Beschädigung überprüfen						X	X	x
Ladegerät auf Beschädigung überprüfen						X	X	X
Netzstecker und Netzzuleitung überprüfen						X	X	X
Zugentlastungen überprüfen						X	X	
Schalter- und Lampentest						X	X	X
Typenschild vorhanden?						X	X	X
Baugruppe 9 - Sitz- / Rückeneinheit								
Passung Rückenlehne überprüfen						X	X	
Rückenlehnenverstellung überprüfen	X				X	X	X	
Allgemeine Maßnahmen								
Scharfe Kanten / Grate beseitigen	X	X	X	X	X	X	X	X
Schrauben* und Anbauteile (Schiebegriffe etc.) auf festen Sitz und Grate überprüfen	X	X	X	X	X	X	X	X
*Anziehdrehmomente nach ISO 898-1								


Sauberheitskontrolle	X	X	X	X	X	X	X	X
Bedienungsanleitung vorhanden?	X	X	X	X	X	X	X	X
Funktion des Zubehörs (montiert)								
Waagrecht verstellbare Beinstützen	x	X	X	X	X			
Höhenverstellbare Seitenteile	x	X	X			x	x	
Bremshebelverlängerung	X	X	X	X	X			
Kipprollen	X	X	X	X	X	X	X	
Kopfstützen		X	X	X	X	X	X	
Seitenpelotten								
Kniepelotten								
Abduktionskeil								
Hemiplegiker Armauflage								

Ergänzend sind die Anweisungen in der Gebrauchsanleitung zu berücksichtigen !

Ausfüllanleitung:

in Ordnung = 

Beschädigung = 

Austausch / Ersatz = 

Wartung durchgeführt von:

Stempel und Unterschrift

Nächster Service:

Ort / Datum:
