

Protokollblatt bitte kopieren und Kopie verwenden

Kunde:

Rotego Rollator B Rollator B XL Senio	RL-Smart Capero RL-120 RL-120 Vario	Delta B	SRL 100 Senio SRL	Rezi Gebo	VFG GS - L/R	Alevo Serie		
------------------------------------------------	----------------------------------------------	---------	----------------------	--------------	-----------------	-------------	--	--

Baugruppe 1 - Rahmen - Gehäuse

Standprüfung (Montage- Richtplatte)	X	X	X	X	X	X	x	
Sichtprüfung (Lack / Chrom / Polster)	X	X	X	X	X	X	x	
Falt- / Klappmechanismus überprüfen	X	X	X	X	X	X	x	
Kontrolle der Konstruktion (Schweißnähte, Lötstellen etc.)	X	X	X	X	X	X	x	
Federstifte kontrollieren					X	X	x	

Baugruppe 4 - Räder vorne

Spiel Radlager überprüfen	X	X	X	X			x	
Spiel Lenklager überprüfen	X	X	X	X			x	
Position der Castorbuchse überprüfen	X	X	X	X			x	

Baugruppe 5 - Räder hinten

Spiel Radlager überprüfen	X	X	X	X			x	
---------------------------	---	---	---	---	--	--	---	--

Baugruppe 6 - Bremsen

Bremsspiel einstellen	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm			2 mm	
Bremsprüfung (gebremste Räder oder Rollen)	X	X	X	X			x	

Allgemeine Maßnahmen

Scharfe Kanten / Grate beseitigen	X	X	X	X	X	X	x	
Schrauben* und Anbauteile (Schiebegriffe etc.) auf festen Sitz und Grate überprüfen *Anziehdrehmomente nach ISO 898-1	X	X	X	X	X	X	x	
Sauberheitskontrolle	X	X	X	X	X	X	x	
Bedienungsanleitung vorhanden?	X	X	X	X	X	X	x	

Ergänzend sind die Anweisungen in der Gebrauchsanleitung zu berücksichtigen !

Ausfüllanleitung:	in Ordnung =	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Beschädigung =	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	Austausch / Ersatz =	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Wartung durchgeführt von:
Stempel und Unterschrift
Nächster Service:
Ort / Datum:

