

Protokollblatt bitte kopieren und Kopie verwenden

Kunde:

| TS - 1 / SL TS - 200 | TS - Care | TS - Aqua | TSE - A/O TSE Easy 10 TS- sense | DH - 40 / L* DH - 40 R* BB - 80 | Aruba BDS-40 Barbados Curacao | Haiti** Trinidad* Varadero* Tobago / SL | Toilettenstuhl XXL |
|-------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------|
|-------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------|

Baugruppe 1 - Rahmen - Gehäuse

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|---|-----|---|
| Standprüfung (Montage- Richtplatte) | X | X | X | | X* | | X* | X |
| Sichtprüfung (Lack / Chrom / Polster) | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Falt- / Klappmechanismus überprüfen | | | | | | | X** | |
| Kontrolle der Konstruktion (Schweißnähte, Lötstellen etc.) | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sichtprüfung Kunststoffqualität (Farbeinschlüsse oder -abweichungen) | X | | | X | X | X | X | X |
| Federstifte kontrollieren | | X | | | X | | | |

Baugruppe 2 - Seitenteile

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|---|
| Klappmechanismus überprüfen | X | | X | X | | | | X |
| Einrastmechanismus überprüfen | X | | X | X | | | | X |
| Federstifte kontrollieren | X | | | X | | | | X |

Baugruppe 3 - Beinstützen

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|--|---|
| Funktion und Leichtgängigkeit überprüfen | X | | X | | | | | X |
| Montage / Demontage überprüfen | X | | X | | | | | X |
| Einrastmechanismus überprüfen | X | | X | | | | | |

Baugruppe 4 - Räder vorne

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|--|--|--|--|---|
| Spiel Radlager überprüfen | X | | X | | | | | X |
| Spiel Lenklager überprüfen | X | | X | | | | | |

Baugruppe 5 - Räder hinten

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|--|--|--|--|---|
| Spiel Radlager überprüfen | X | | X | | | | | X |
| Spiel Lenklager überprüfen | X | | X | | | | | X |

Baugruppe 6 - Bremsen

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|--|---|
| Bremsprüfung (gebremste Räder oder Rollen) | X | | X | | | | | X |
| | | | | | | | | |

Baugruppe 9 - Sitz- / Rückeneinheit

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|---|
| Passung Rückenlehne überprüfen | X | | X | | | | | X |
| | | | | | | | | |

Allgemeine Maßnahmen

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scharfe Kanten / Grate beseitigen | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Schrauben* und Anbauteile (Schiebegriffe etc.) auf festen Sitz und Grate überprüfen *Anziehdrehmomente nach ISO 898-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sauberheitskontrolle | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Bedienungsanleitung vorhanden? | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | | | | |

Ergänzend sind die Anweisungen in der Gebrauchsanleitung zu berücksichtigen !

| | | |
|--------------------------|----------------------|--|
| Ausfüllanleitung: | in Ordnung = | |
| | Beschädigung = | |
| | Austausch / Ersatz = | |

| |
|----------------------------------|
| Wartung durchgeführt von: |
| Stempel und Unterschrift |
| Nächster Service: |
| Ort / Datum: |