


# ALEVO - 4040/4041/4042





# BG1 – Rahmen

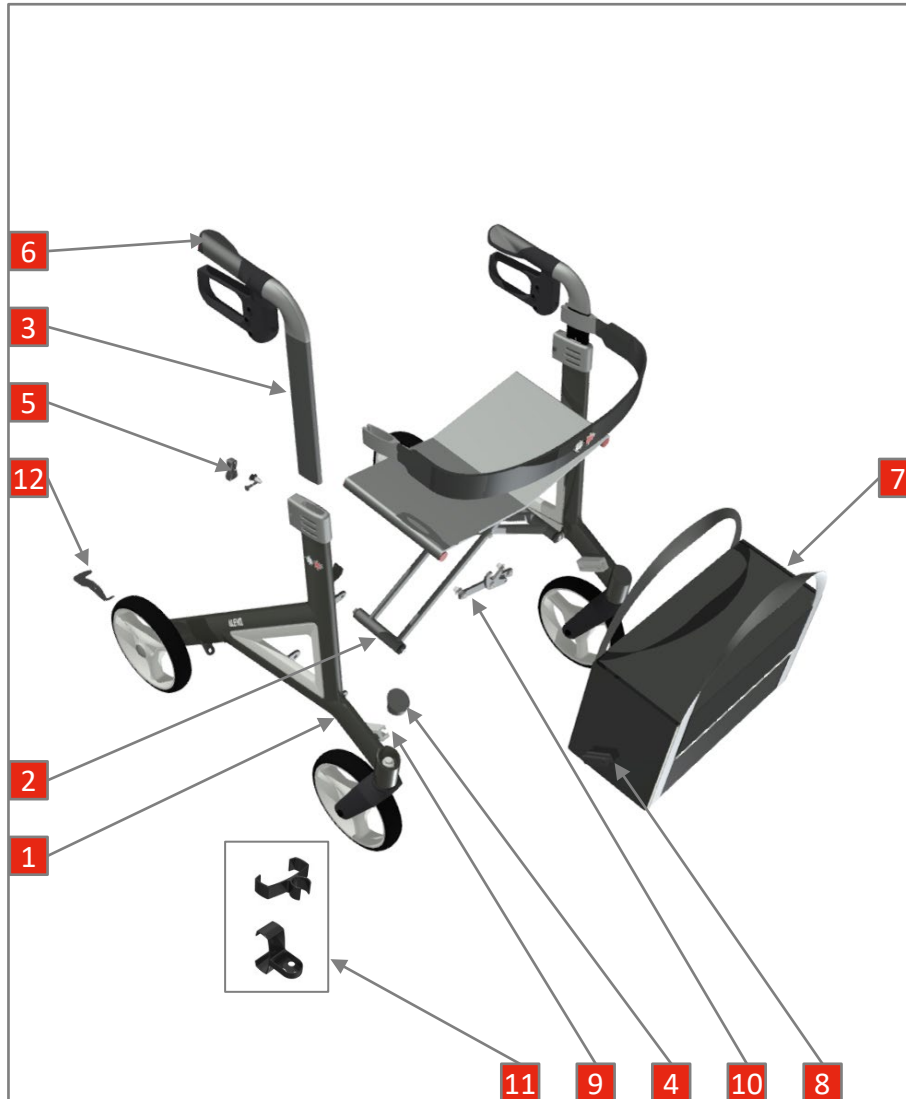

## Stückliste - BG1 - Rahmen


Objekt	AN	Bezeichnung
1	4040100000	Carbon Rahmenteil rechts mokka Alevo
1	4040101000	Carbon Rahmenteil links mokka Alevo
1	4040102000	Carbon Rahmenteil rechts aubergine Alevo
1	4040103000	Carbon Rahmenteil links aubergine Alevo
1	4040104000	Carbon Rahmenteil rechts silber Alevo
1	4040105000	Carbon Rahmenteil links silber Alevo
2	4040108000	Kreuzstrebe komplett Alevo
3	4040112000	Schieberohr rechts Alevo
3	4040113000	Schieberohr links Alevo
4	4040114000	Abdeckkappe Castorbuchse Alevo
5	4040115000	Arretierstift Schieberohr Alevo
6	4040130000	Handgriff rechts Alevo
6	4040131000	Handgriff links Alevo
7	4040146000	Tasche Alevo
8	4040147000	Gleitprofil Tasche Alevo
9	4040149000	Taschenhalter Alevo
10	4040151000	Befestigungshebel inkl. Rastmech. links Alevo
10	4040152000	Befestigungshebel inkl. Rastmech. rechts Alevo
11	4040155000	Halteklammer Stockhalter Alevo
12	4040180000	Ankipphilfe rechts Alevo
12	4040181000	Ankipphilfe links Alevo

# BG1 – Rahmen

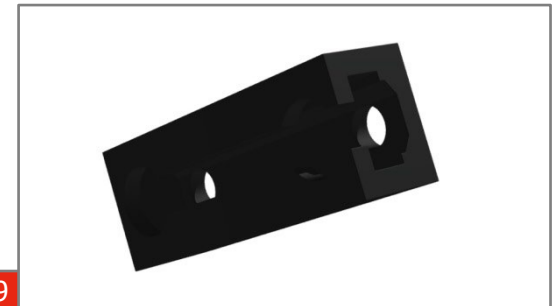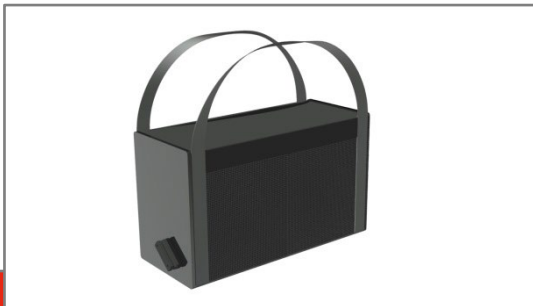

# BG1 – Rahmen

10

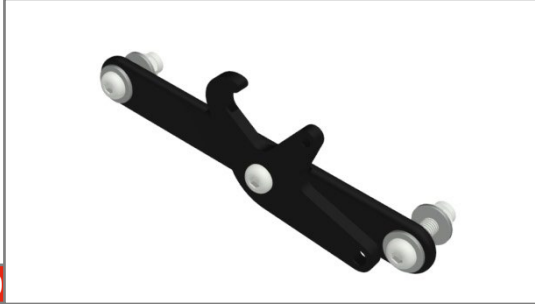

11



12



# BG4 - Vorderrad



## Stückliste - BG4 - Vorderräder

Objekt	AN	Bezeichnung
1	4040400000	Rad vorne 8" PU inkl. Lager Alevo
2	4040401000	Distanzhülse 6mm Profilbereifung Alevo
3	4040402000	Achsschraube vorne M8x75mm komplett Alevo
4	4040410000	Radgabel inkl. Lager und Lenkbolzen Alevo

# BG4 - Vorderrad



1



2



3



4




# BG5 - Hinterrad



## Stückliste - BG5 - Hinterräder


Objekt	AN	Bezeichnung
1	4040500000	Rad hinten 8" PU inkl. Lager Alevo
2	4040502000	Achsschraube hinten M8x80mm komplett Alevo
3	4040505000	Abdeckung Radschraube hinten Alevo
4	4040580000	Profilbereifung Alevo
5	4040581000	Umbausatz Profilbereifung Alevo

# BG5 - Hinterrad

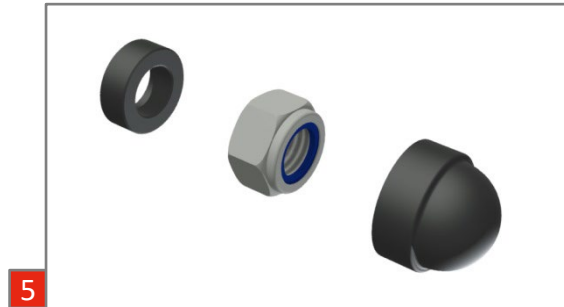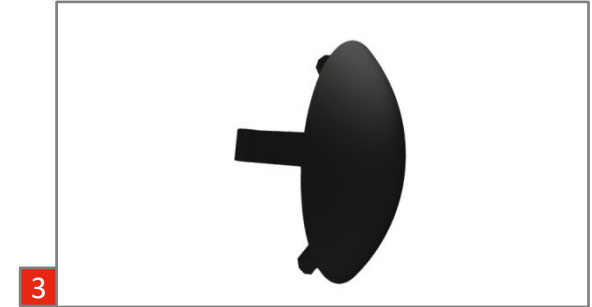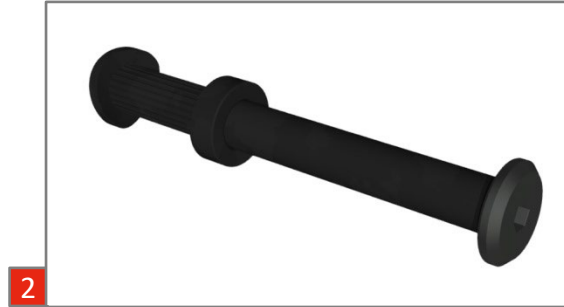




# BG6 - Bremse

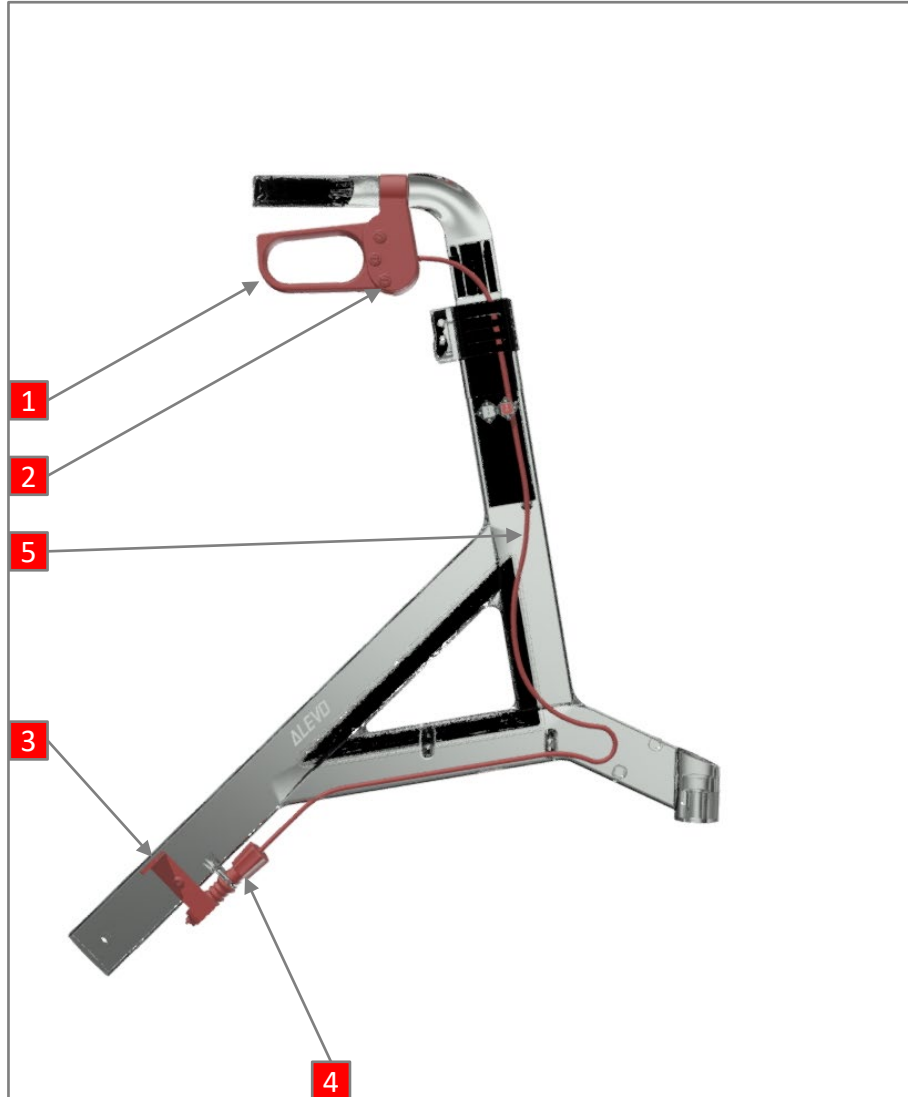

## Stückliste - BG6 - Bremse

Objekt	AN	Bezeichnung
1	4040622000	Bremse rechts Alevo
1	4040623000	Bremse links Alevo
2	4040624000	Schraube Bremshebel Alevo
3	4040625000	Bremsblech links komplett Alevo
3	4040628000	Bremsblech rechts komplett Alevo
4	4040626000	Bremszubehör-Set Alevo
5	4040627000	Bowdenzug komplett Alevo

# BG6 - Bremse

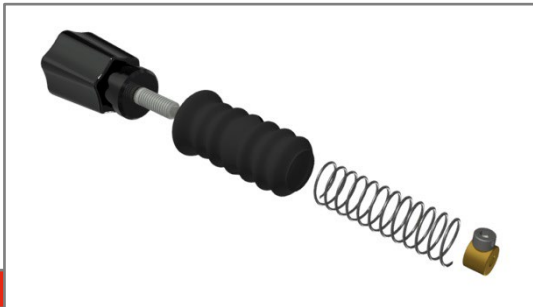


# BG9 - Sitz- und Rückenbespannung



## Stückliste - BG9 - Sitz und Rücken

Objekt	AN	Bezeichnung
1	4040902000	Rückengurt inkl. Sterngriffschraube Alevo
2	4040903000	Sterngriffschraube Rückengurt Alevo
3	4040905000	Sitzbespannung komplett Alevo

# BG9 - Sitz- und Rückenbespannung

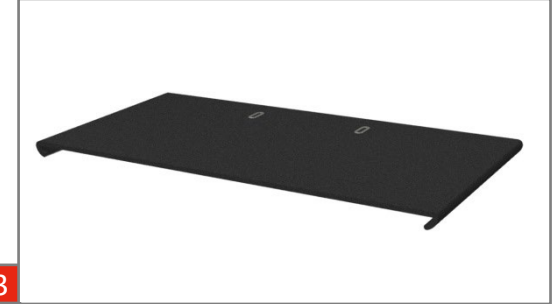



### Stückliste - BG8 - Zubehör

Objekt	AN	Bezeichnung
1	4040801000	Flaschenhalter Alev0
2	4040803000	Regenschirm Alev0
3	4040805000	Stockhalter Alev0

# Zubehör

1



2



3

