

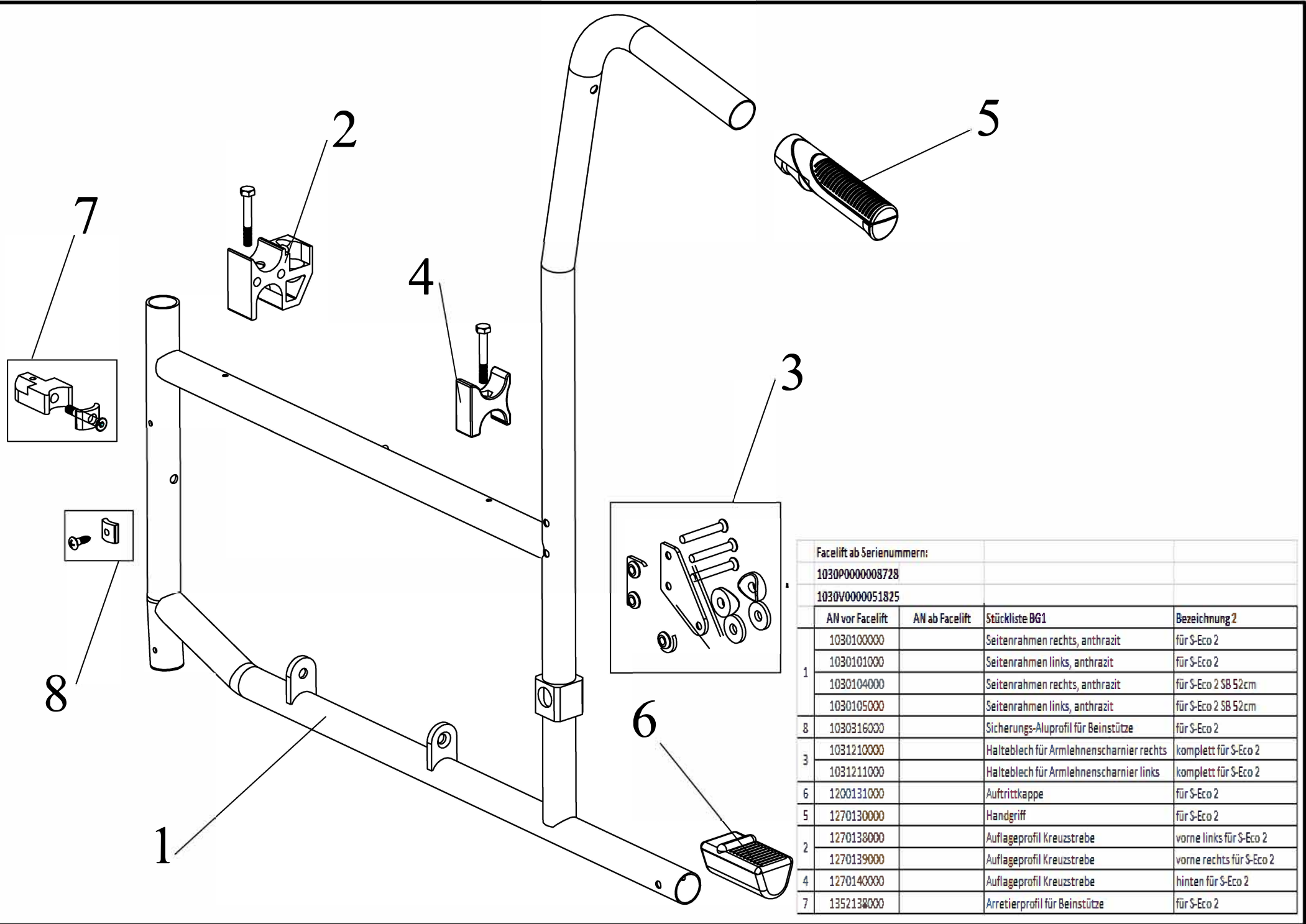
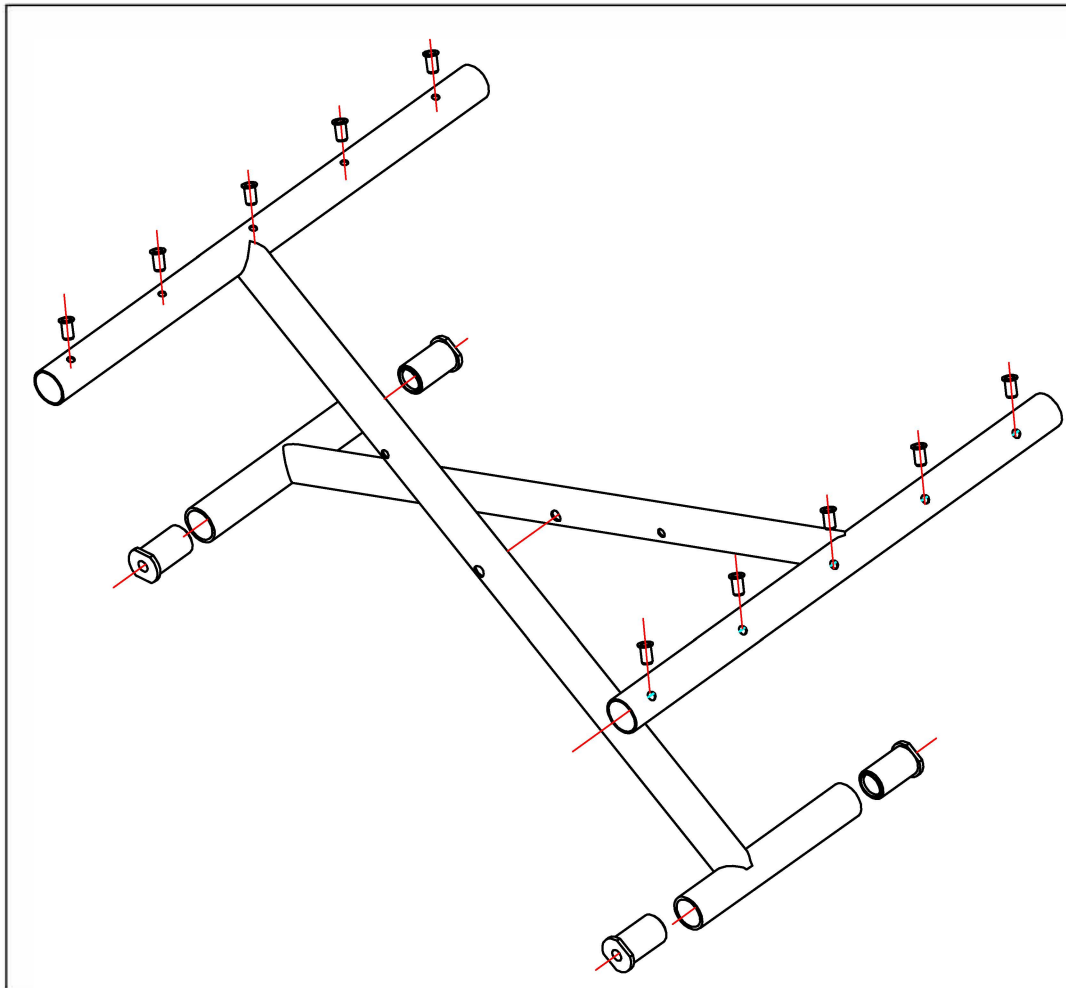
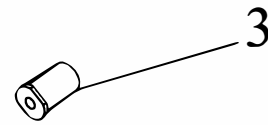





S - Eco 2 Modell 1030

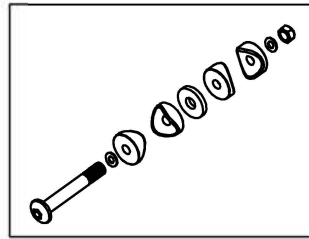


Facelift ab Seriennummern:				
1030P0000008728				
1030V0000051825				
	AN vor Facelift	AN ab Facelift	Stückliste BG1	Bezeichnung 2
1	1030100000		Seitenrahmen rechts, anthrazit	für S-Eco 2
	1030101000		Seitenrahmen links, anthrazit	für S-Eco 2
	1030104000		Seitenrahmen rechts, anthrazit	für S-Eco 2 SB 52cm
8	1030105000		Seitenrahmen links, anthrazit	für S-Eco 2 SB 52cm
	1030316000		Sicherungs-Aluprofil für Beinstütze	für S-Eco 2
3	1031210000		Halblech für Armlehnscharnier rechts	komplett für S-Eco 2
	1031211000		Halblech für Armlehnscharnier links	komplett für S-Eco 2
6	1200131000		Auftrittskappe	für S-Eco 2
5	1270130000		Handgriff	für S-Eco 2
2	1270138000		Auflageprofil Kreuzstrebe	vorne links für S-Eco 2
	1270139000		Auflageprofil Kreuzstrebe	vorne rechts für S-Eco 2
4	1270140000		Auflageprofil Kreuzstrebe	hinten für S-Eco 2
7	1352138000		Arretierprofil für Beinstütze	für S-Eco 2

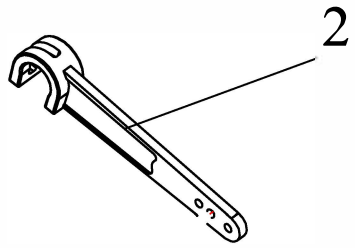

Facelift ab Seriennummern:				
1030P0000008728				
1030V0000051825				
	AN vor Facelift	AN ab Facelift	Stückliste BG1.1	Bezeichnung 2
1	1030115000		Kreuzstrebe SB 37cm schwarz, komplett	für S-Eco 2
	1030116000		Kreuzstrebe SB 40cm schwarz, komplett	für S-Eco 2
	1030117000		Kreuzstrebe SB 43cm schwarz, komplett	für S-Eco 2
	1030118000		Kreuzstrebe SB 46cm schwarz, komplett	für S-Eco 2
	1030119000		Kreuzstrebe SB 49cm schwarz, komplett	für S-Eco 2
	1030120000		Kreuzstrebe SB 52cm schwarz, komplett	für S-Eco 2
2	1030125000		Befestigungshebel für Kreuzstrebe	SB 37-43cm für S-Eco 2
	1030126000		Befestigungshebel für Kreuzstrebe	SB 46-52cm für S-Eco 2
4	1270115000		Schraube für Kreuzstrebe komplett	für S-Eco 2
3	1270136000		Gewindebuchse für Kreuzstrebe	für S-Eco 2




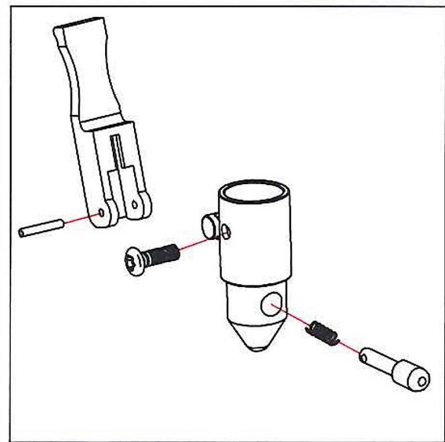
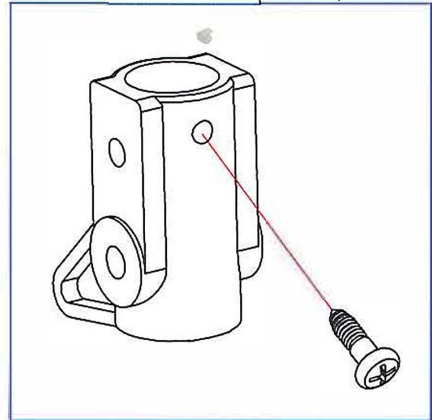
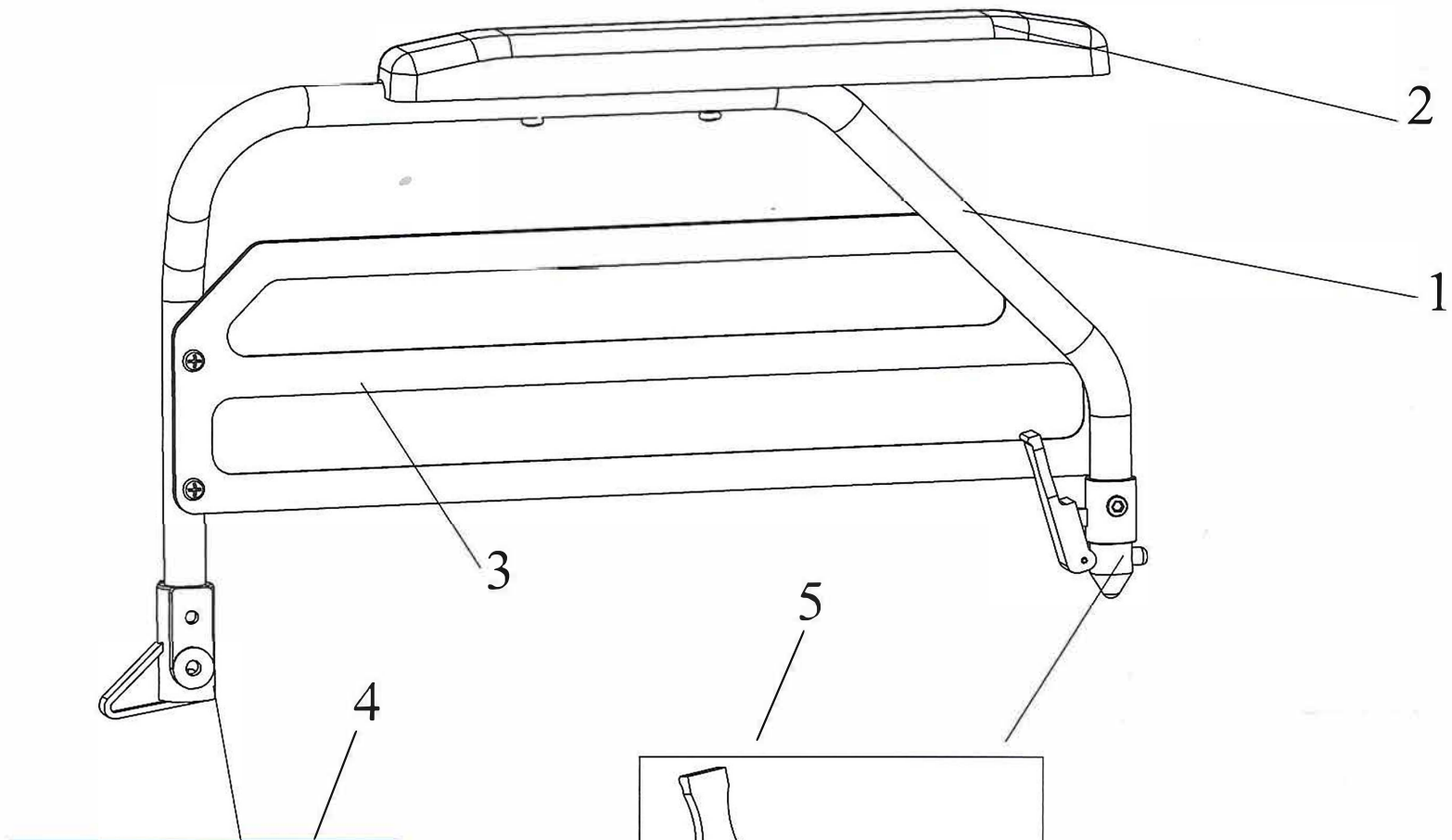


Facelift ab Seriennummern:				
1030P0000008728				
1030V0000051825				
	AN vor Facelift	AN ab Facelift	Stückliste BG2	Bezeichnung 2
1	1030204000	0009216000	Seitenteil Duo rechts komplett, anthrazit	für S-Eco 2
	1030205000	0009215000	Seitenteil Duo links komplett, anthrazit	für S-Eco 2
2	1030220000	1352210000	Armlehnenpolster Duo	für S-Eco 2
4	1260212000		Armlehnscharnier, Kunststoff	für S-Eco 2
3	1270210000	0009212000	Kleiderschutz rechts, Kunststoff	für S-Eco 2
	1270210001	0009211000	Kleiderschutz links, Kunststoff	für S-Eco 2
5	1270217000		Federsystem für Seitenteil	links komplett für S-Eco 2
	1270218000		Federsystem für Seitenteil	rechts komplett für S-Eco 2

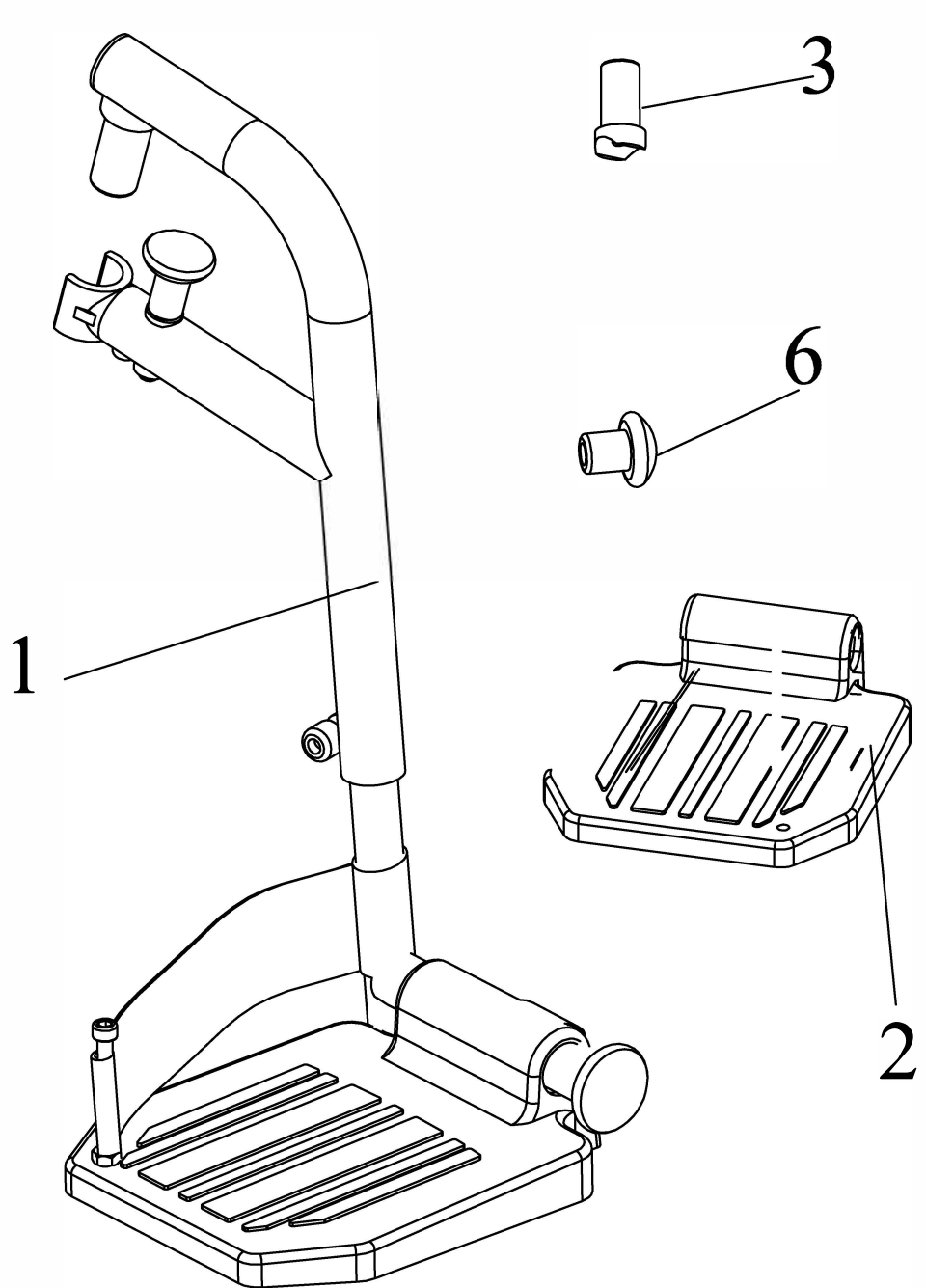


Facelift ab Seriennummern:
 1030P0000008728
 1030V0000051825


	AN vor Facelift	AN ab Facelift	Stückliste BG3	Bezeichnung 2
1	1030300000		Beinstütze rechts anthrazit, komplett	für S-Eco 2 mit Sitzbreite 37cm
	1030301000		Beinstütze links anthrazit, komplett	für S-Eco 2 mit Sitzbreite 37cm
	1030302000		Beinstütze rechts anthrazit, komplett	für S-Eco 2 mit Sitzbreite 40-52cm
	1030303000		Beinstütze links anthrazit, komplett	für S-Eco 2 mit Sitzbreite 40-52cm
		0009324000	Beinstütze rechts anthrazit, komplett	für S-Eco 2 mit Sitzbreite 37-40cm
		0009323000	Beinstütze links anthrazit, komplett	für S-Eco 2 mit Sitzbreite 37-40cm
		0009330000	Beinstütze rechts anthrazit, komplett	für S-Eco 2 mit Sitzbreite 43-46cm
		0009329000	Beinstütze links anthrazit, komplett	für S-Eco 2 mit Sitzbreite 43-46cm
		0009336000	Beinstütze rechts anthrazit, komplett	für S-Eco 2 mit Sitzbreite 49-52cm
		0009335000	Beinstütze links anthrazit, komplett	für S-Eco 2 mit Sitzbreite 49-52cm
2	1010319000		Fußplatte	Kunststoff Standard für S-Eco 2
		1352332000	Fußplatte rechts	für S-Eco 2 mit Sitzbreite 37-40cm
		1352331000	Fußplatte links	für S-Eco 2 mit Sitzbreite 37-40cm
		1352334000	Fußplatte rechts	für S-Eco 2 mit Sitzbreite 43-46cm
		1352333000	Fußplatte links	für S-Eco 2 mit Sitzbreite 43-46cm
		1352336000	Fußplatte rechts	für S-Eco 2 mit Sitzbreite 49-52cm
	1352335000	Fußplatte links	für S-Eco 2 mit Sitzbreite 49-52cm	
7	1031310000		Fersenband mit Klettband	für S-Eco 2
6	1010318000		Gummipuffer für Fußplattenträgerrohr	für S-Eco 2
4	1030308000		Führungsprofil für Beinstütze	für S-Eco 2
3	1030309000		Führungsbolzen für Beinstütze	für S-Eco 2
5	1030311000		Arretierbolzen mit Knopf und Feder	für Beinstütze S-Eco 2

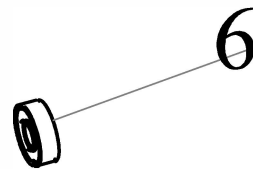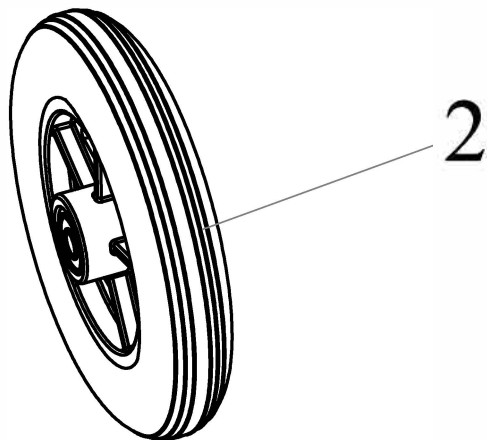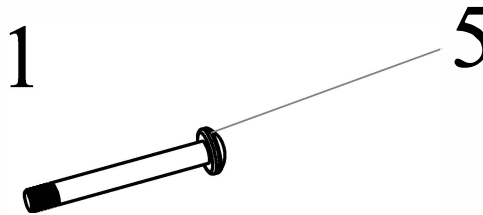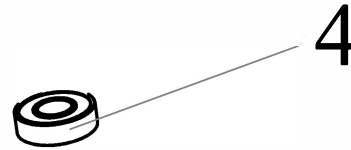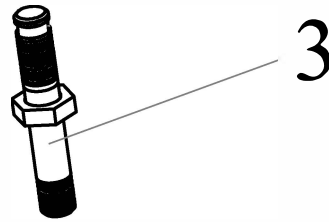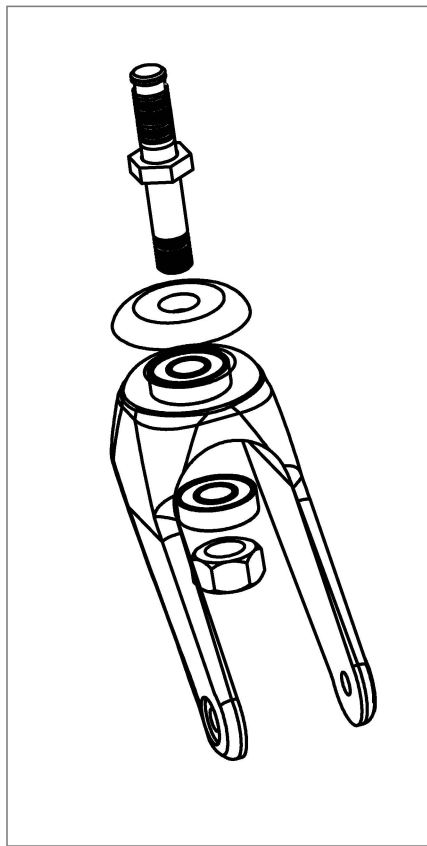


Facelift ab Seriennummern:				
	AN vor Facelift	AN ab Facelift	Stückliste BG4	Bezeichnung 2
5	1010402000		Radachse für Lenkrad	für S-Eco 2
4	1010408000		Lenklager Radgabel	für S-Eco 2
1	1030401000		Radgabel mit Lenklagern, komplett	für S-Eco 2
3	1030405000		Lagerbolzen für Vorderradgabel	für S-Eco 2
6	1200408000		Radlager	für Vorderrad S-Eco 2
2	9500111000		Rad 7" x 30mm Vollgummi	für S-Eco 2

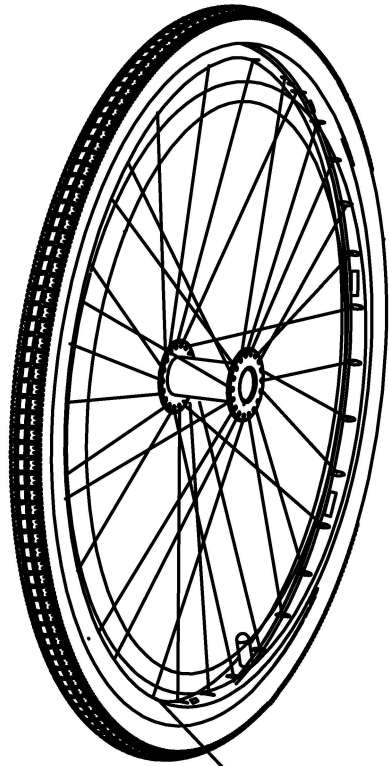


1

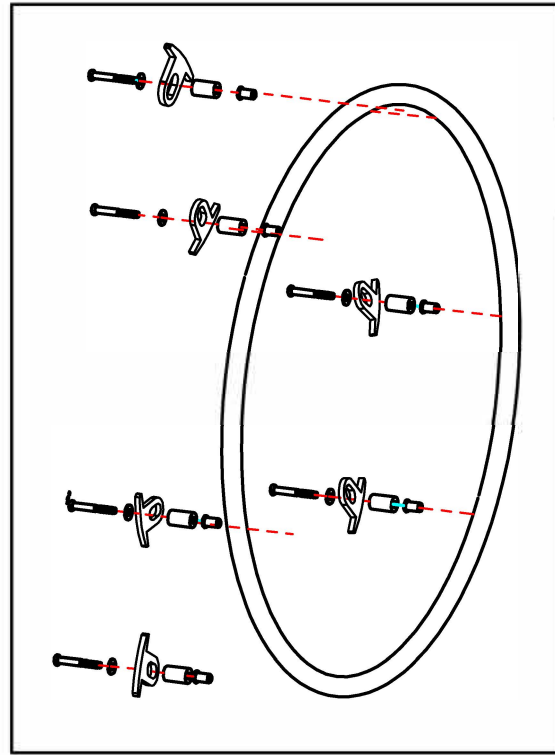


2

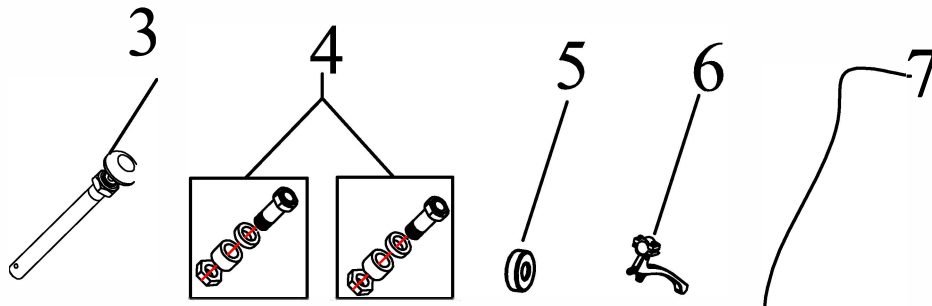

Facelift ab Seriennummern:				
1030P0000008728				
1030V0000051825				
	AN vor Facelift	AN ab Facelift	Stückliste BGS	Bezeichnung 2
1	9500161000		Rad 24" PU, komplett	6-Punkt Alu-Greifreifen
	9500201000		Rad 24" PU, Trommelbremse	6-Punkt Alu-Greifreifen
5	1010408000		Radlager	Hinterrad S-Eco 2
4	1270509000		Lagerbuchse 51mm	für Steckachse S-Eco 2
3	1270510000		Steckachse	für Hinterrad S-Eco 2
2	1310515000		Greifreifen 24", 6-Punkt	für S-Eco 2
• Abb.	9000665000		Trommelbremsträger links	mit Bremsbacken für S-Eco 2
	9000666000		Trommelbremsträger rechts	mit Bremsbacken für S-Eco 2
	9000687000		Verdrehsicherungsprofil links	für Trommelbremsträger S-Eco 2
	9000688000		Verdrehsicherungsprofil rechts	für Trommelbremsträger S-Eco 2
6	9000804000		Handbremshebel für Trommelbremse	25mm selbstauslösend für S-Eco 2
7	9000815000		Brems- und Bowdenzug komplett	für Trommelbremse S-Eco 2
3	9000820000		Steckachse	für Hinterrad TB S-Eco 2
4	9000822000		Lagerbuchse 76mm	für Steckachse TB S-Eco 2

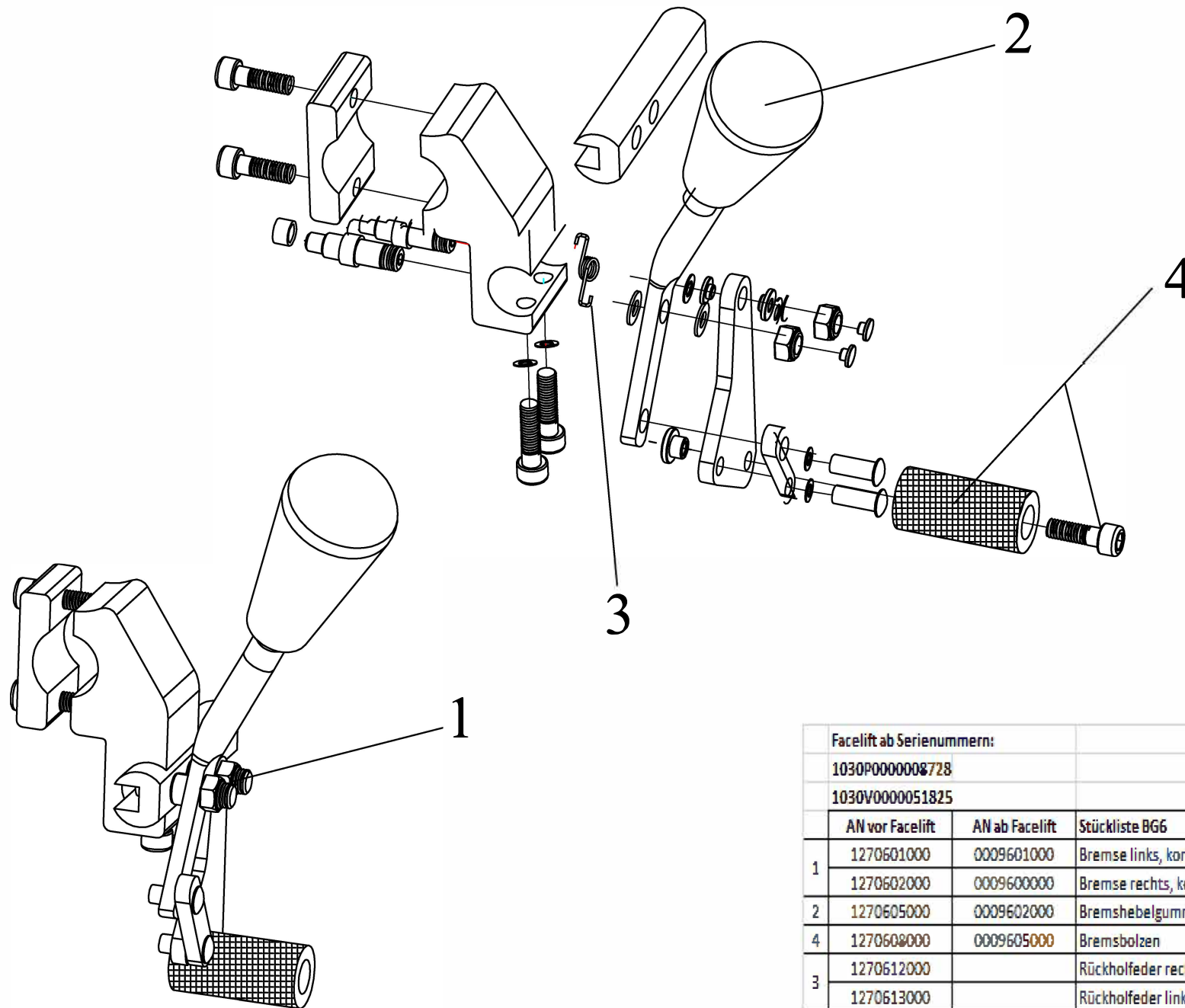

Facelift ab Seriennummern:				
1030P0000008728				
1030V0000051825				
	AN vor Facelift	AN ab Facelift	Stückliste BG6	Bezeichnung 2
1	1270601000	0009601000	Bremse links, komplett	für S-Eco 2
	1270602000	0009600000	Bremse rechts, komplett	für S-Eco 2
2	1270605000	0009602000	Bremshebelgummi	für Feststellbremse S-Eco 2
4	1270608000	0009605000	Bremsbolzen	für Feststellbremse S-Eco 2
3	1270612000		Rückholfeder rechts	für Bremshebel S-Eco 2
	1270613000		Rückholfeder links	für Bremshebel S-Eco 2

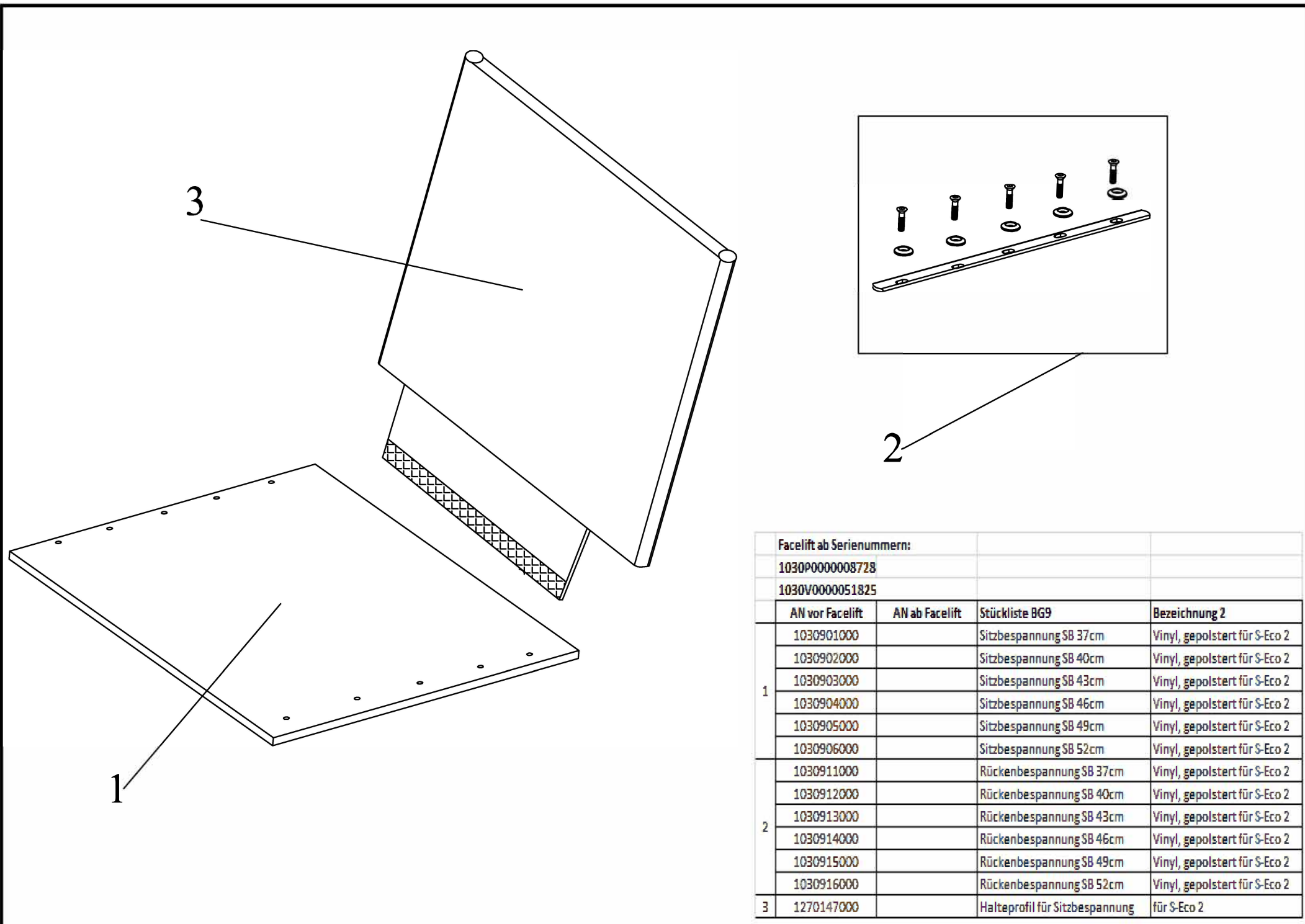

Facelift ab Seriennummern:				
1030P0000008728				
1030V0000051825				
	AN vor Facelift	AN ab Facelift	Stückliste BG9	Bezeichnung 2
1	1030901000		Sitzbespannung SB 37cm	Vinyl, gepolstert für S-Eco 2
	1030902000		Sitzbespannung SB 40cm	Vinyl, gepolstert für S-Eco 2
	1030903000		Sitzbespannung SB 43cm	Vinyl, gepolstert für S-Eco 2
	1030904000		Sitzbespannung SB 46cm	Vinyl, gepolstert für S-Eco 2
	1030905000		Sitzbespannung SB 49cm	Vinyl, gepolstert für S-Eco 2
	1030906000		Sitzbespannung SB 52cm	Vinyl, gepolstert für S-Eco 2
2	1030911000		Rückenbespannung SB 37cm	Vinyl, gepolstert für S-Eco 2
	1030912000		Rückenbespannung SB 40cm	Vinyl, gepolstert für S-Eco 2
	1030913000		Rückenbespannung SB 43cm	Vinyl, gepolstert für S-Eco 2
	1030914000		Rückenbespannung SB 46cm	Vinyl, gepolstert für S-Eco 2
	1030915000		Rückenbespannung SB 49cm	Vinyl, gepolstert für S-Eco 2
	1030916000		Rückenbespannung SB 52cm	Vinyl, gepolstert für S-Eco 2
3	1270147000		Halteprofil für Sitzbespannung	für S-Eco 2