





S - Eco 300 XL 1036

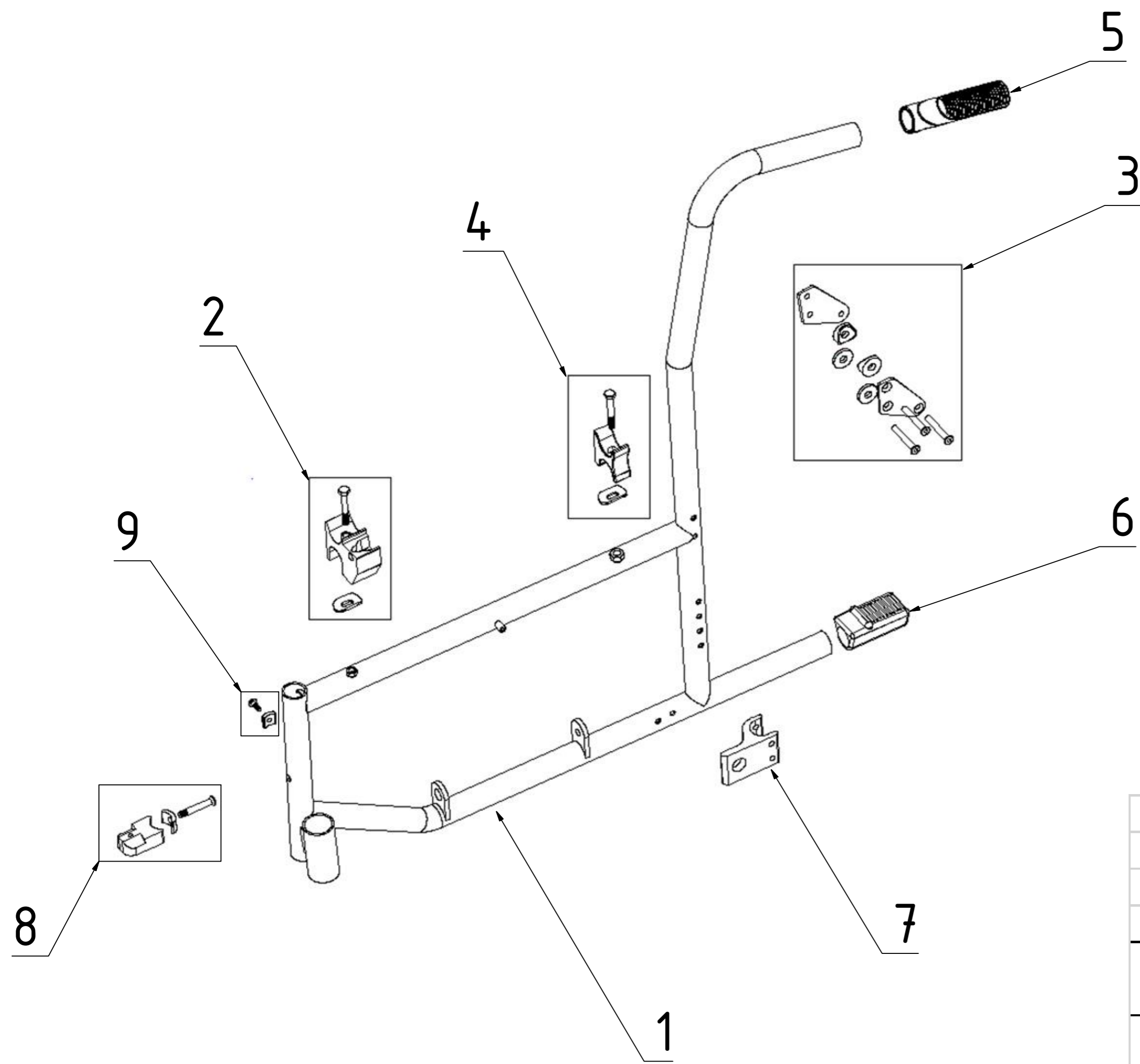







Facelift ab Seriennummern:				
1036P0000000840				
1036V				
	AN vor Facelift	AN ab Facelift	Stückliste BG1	Bezeichnung 2
1	1036100000		Seitenrahmen rechts	für S-Eco 300 XL
	1036101000		Seitenrahmen links	für S-Eco 300 XL
2	1270138000		Auflageprofil Kreuzstrebe	vorne links für S-Eco 300 XL
	1270139000		Auflageprofil Kreuzstrebe	vorne rechts für S-Eco 300 XL
3	1031210000		Halteblech für Armlehnscharnier rechts	komplett für S-Eco 300 XL
	1031211000		Halteblech für Armlehnscharnier links	komplett für S-Eco 300 XL
4	1270140000		Auflageprofil Kreuzstrebe	hinten für S-Eco 300 XL
5	1270130000		Handgriff	für S-Eco 300 XL
6	1200131000		Auftrittgummi	für S-Eco 300 XL
7	1330142000		Adapterblock	für Profilrohr S-Eco 300 XL
8	1352138000		Arretierprofil Beinstütze	für S-Eco 300 XL
9	1030316000		Sicherungs-Aluprofil für Beinstütze	für S-Eco 300 XL

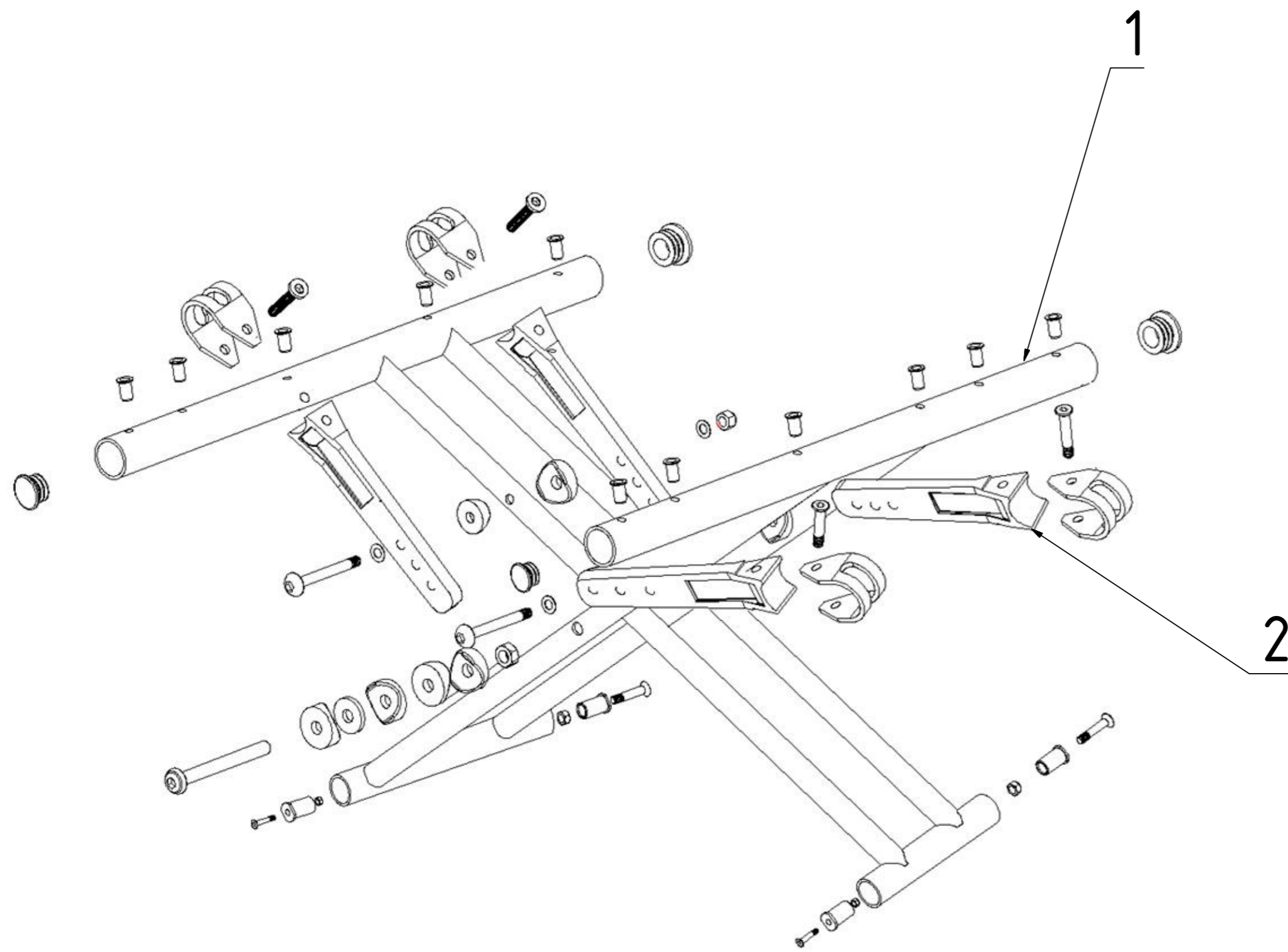




Facelift ab Seriennummern:				
1036P0000000840				
1036V				
	AN vor Facelift	AN ab Facelift	Stückliste BG1.1	Bezeichnung 2
1	1036120000		Kreuzstrebe SB 52cm komplett	für S-Eco 300 XL
	1036121000		Kreuzstrebe SB 55cm komplett	für S-Eco 300 XL
	1036122000		Kreuzstrebe SB 58cm komplett	für S-Eco 300 XL
2	1036125000		Befestigungshebel für Kreuzstrebe	SB 52-58cm für S-Eco 300 XL
	1320115000		Schraube für XL Kreuzstrebe (o.Abb.)	für S-Eco 300 XL

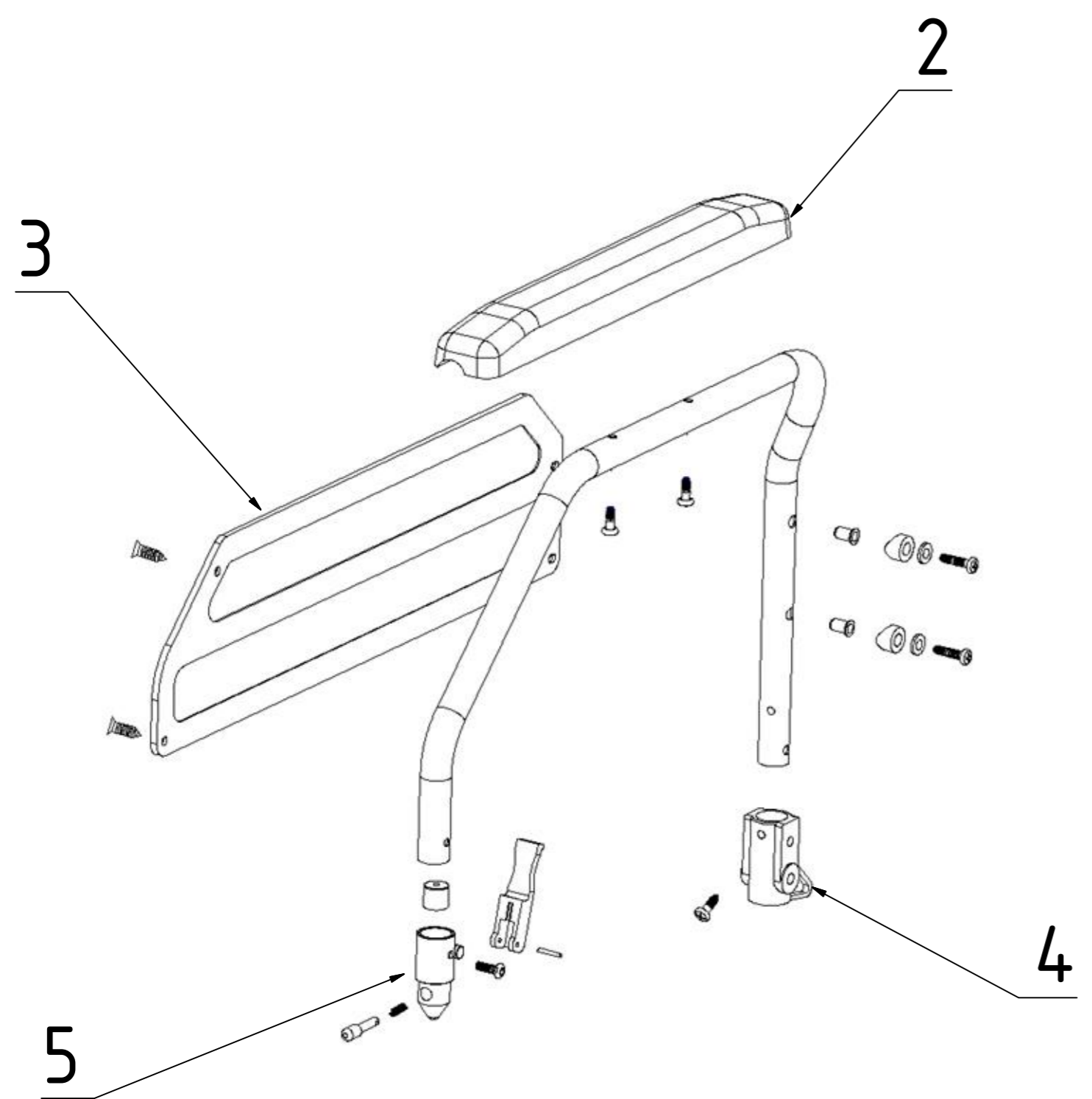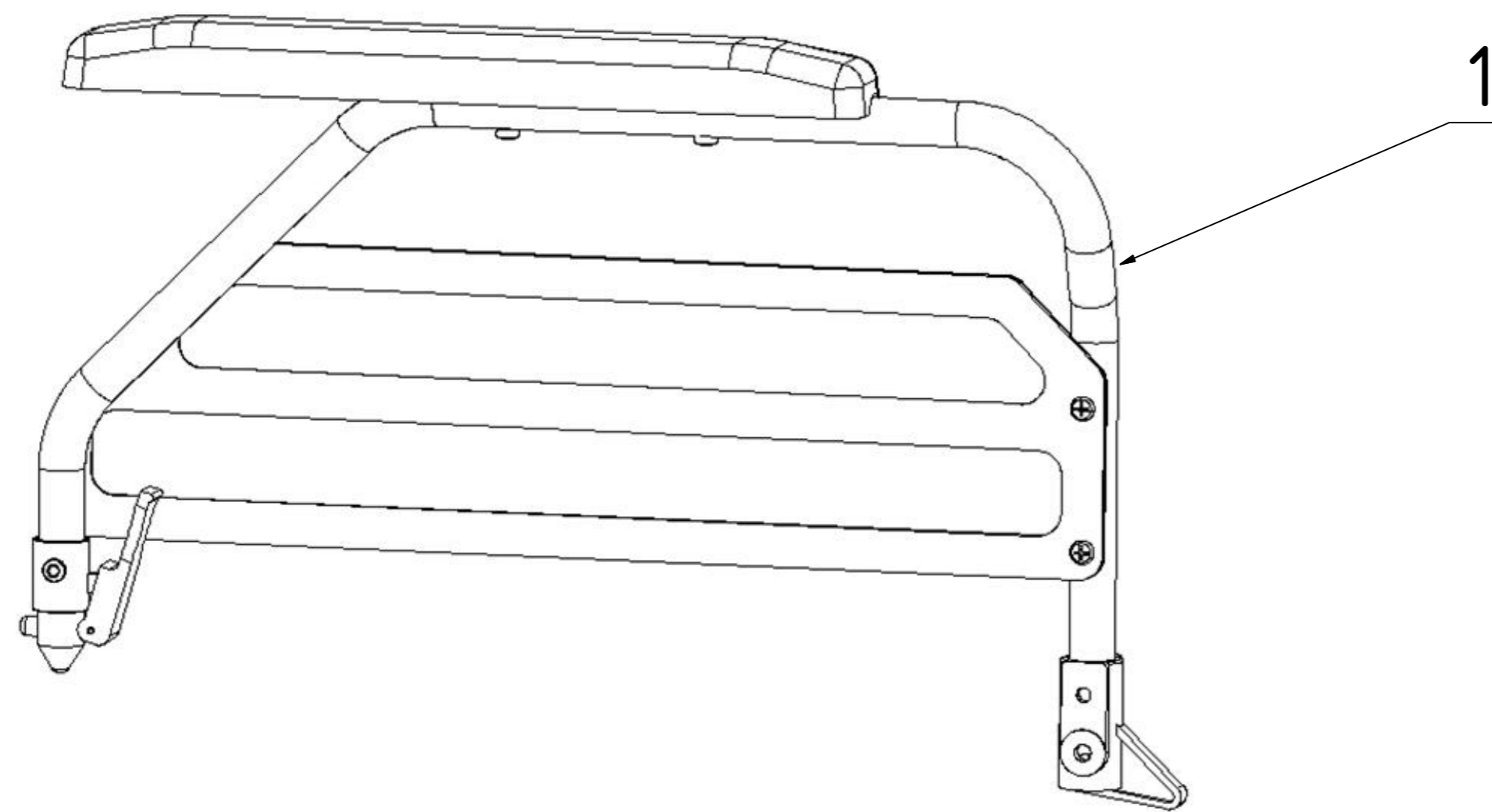

Facelift ab Seriennummern:				
1036P0000000840				
1036V				
	AN vor Facelift	AN ab Facelift	Stückliste BG2	Bezeichnung 2
1	1031201001	0009213000	Seitenteil links	für S-Eco 300 XL
	1031202001	0009214000	Seitenteil rechts	für S-Eco 300 XL
2	1030220000	1352210000	Armlehnenpolster Duo	für S-Eco 300 XL
3	1270210000	0009212000	Kleiderschutz rechts, Kunststoff	für S-Eco 300 XL
	1270210001	0009211000	Kleiderschutz links, Kunststoff	für S-Eco 300 XL
4	1260212000		Armlehnscharnier	für S-Eco 300 XL
5	1270217000		Federsystem für Seitenteil	links komplett für S-Eco 300 XL
	1270218000		Federsystem für Seitenteil	rechts komplett für S-Eco 300 XL


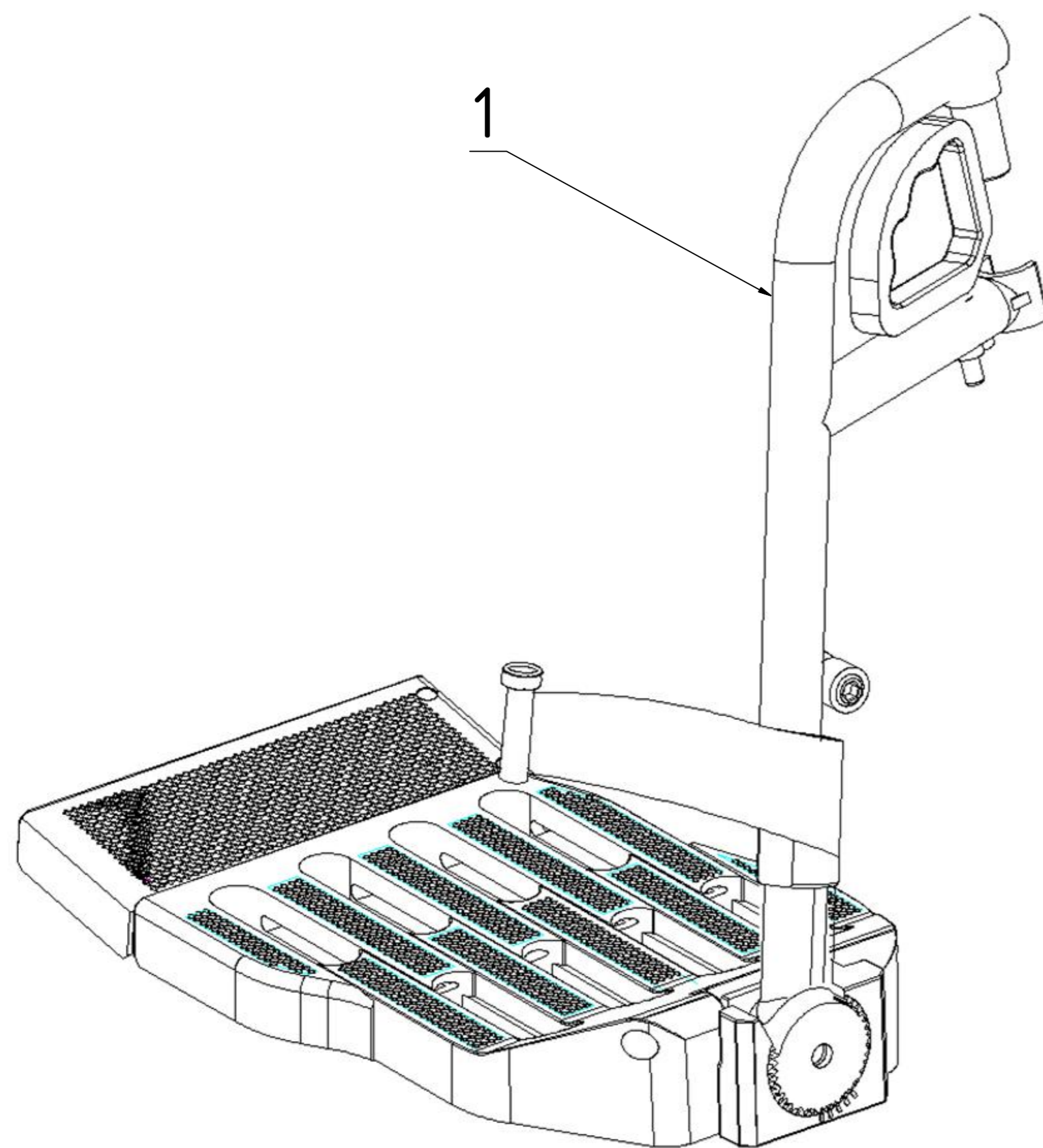
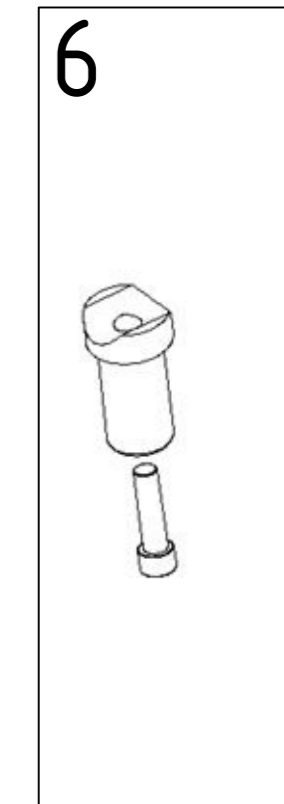
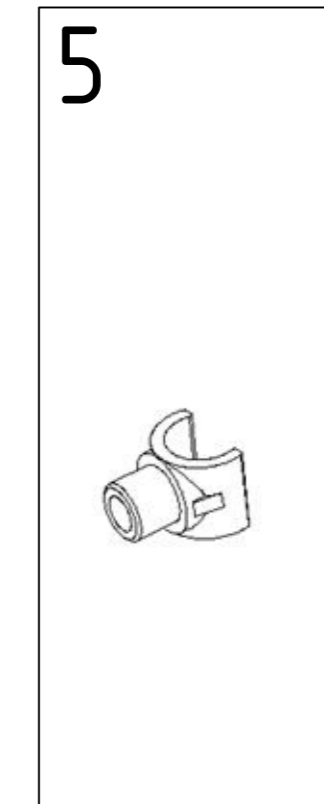
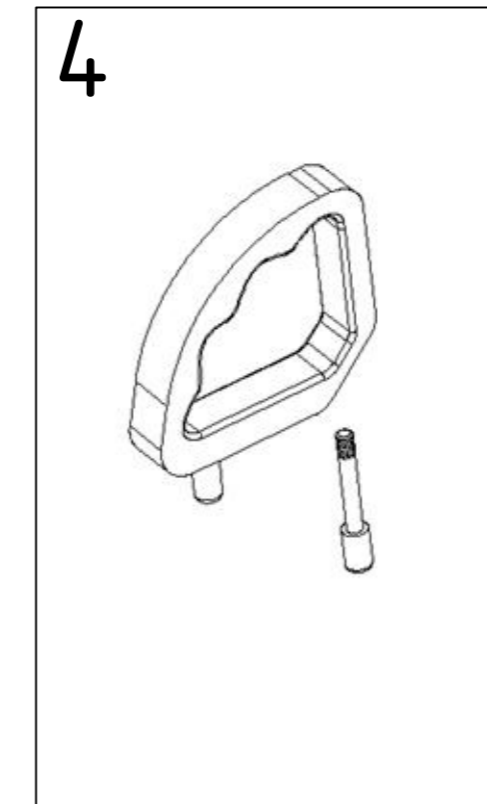
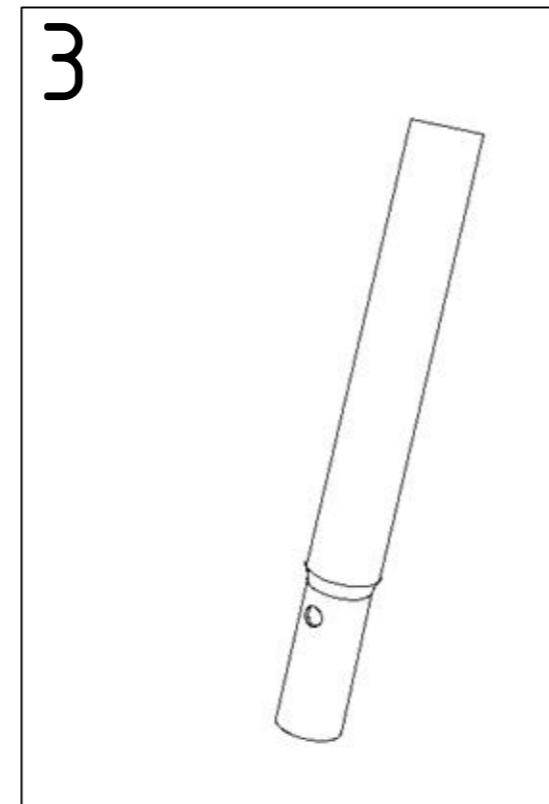
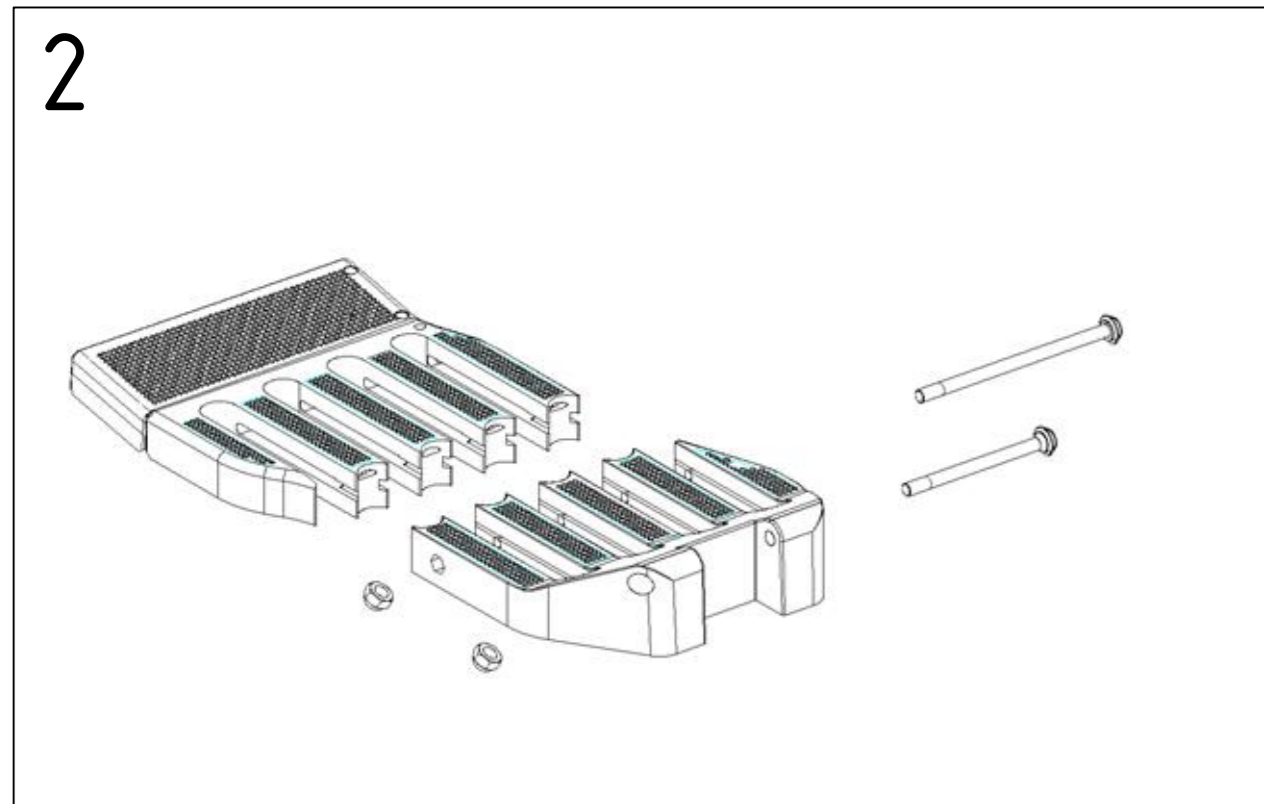


Face lift ab Seriennummern:				
1036P0000000840				
1036V				
	AN vor Face lift	AN ab Facelift	Stückliste BG3	Bezeichnung 2
1	1036301000		Beinstütze links	für S-Eco 300 XL
	1036302000		Beinstütze rechts	für S-Eco 300 XL
3	1036308000		Trägerrohr Fußplatte	für S-Eco 300 XL
2	1321310000		Fußplatte rechts	für S-Eco 300 XL
	1321311000		Fußplatte links	für S-Eco 300 XL
4	1330320000		Handgriff für Beinstütze	komplett: für S-Eco 300 XL
5	1030308000		Führungsprofil für Beinstütze	für S-Eco 300 XL
6	1331363000		Führungsbolzen für Beinstütze	für S-Eco 300 XL

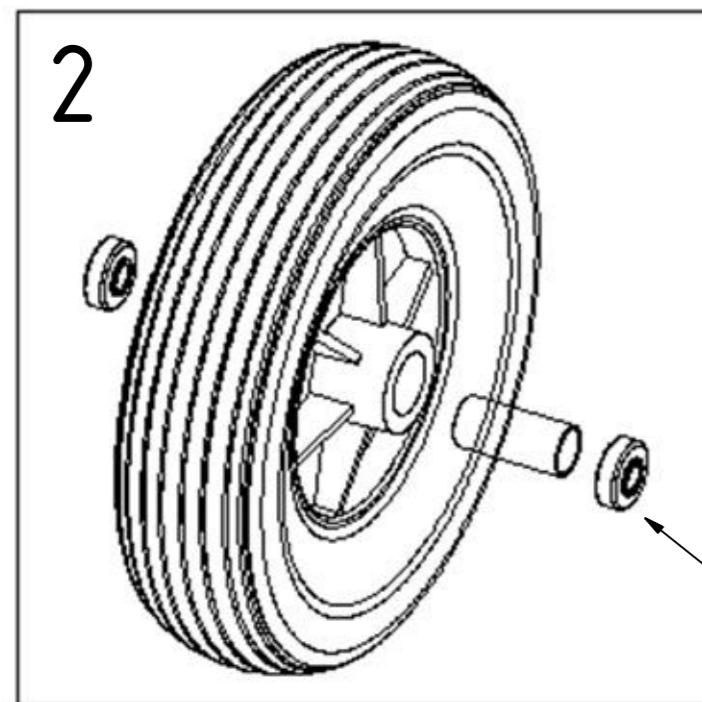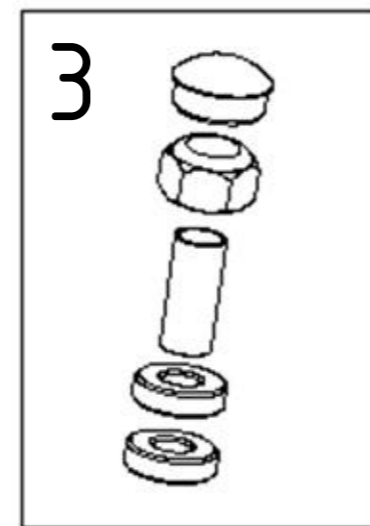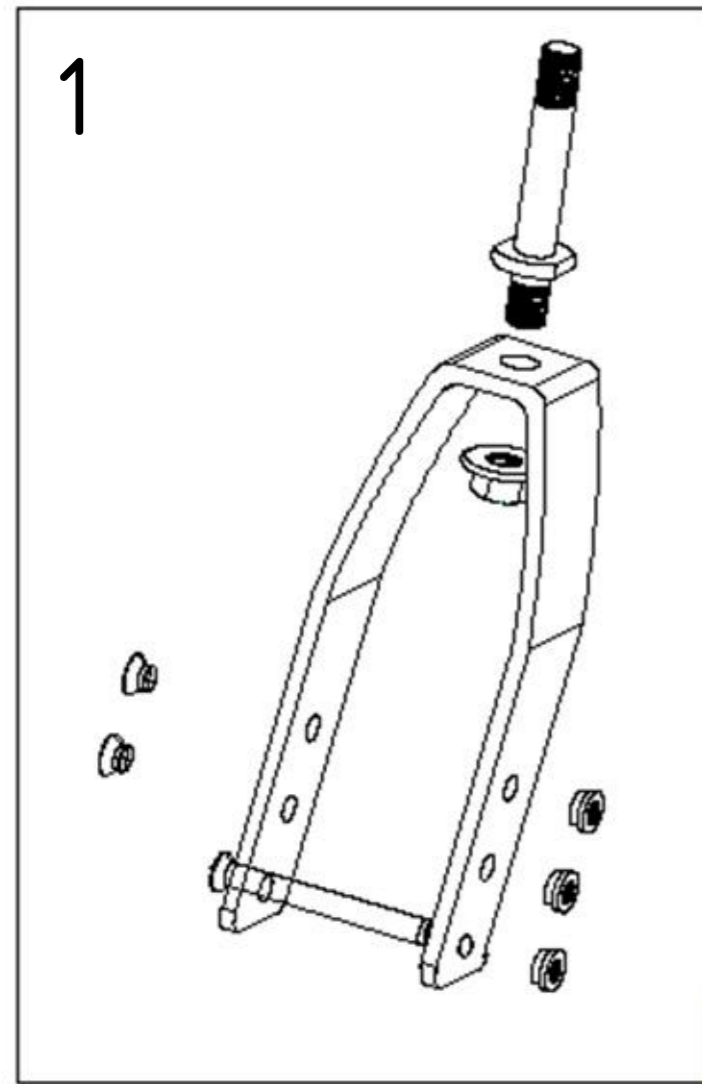


2.1


Facelift ab Seriennummern:				
1036P0000000840				
1036V				
	AN vor Facelift	AN ab Facelift	Stückliste BG4	Bezeichnung 2
1	1036403000		Radgabel 3-Loch links	mit Lenkachse für S-Eco 300 XL
	1036404000		Radgabel 3-Loch rechts	mit Lenkachse für S-Eco 300 XL
2	9500132000		Rad vorne 200x50mm, PU	Achse 8mm für S-Eco 300 XL
2.1	1200408000		Radlager	für Vorderrad S-Eco 300 XL
3	1330480000		Lenklagersatz	Castorbuchse für S-Eco 300 XL

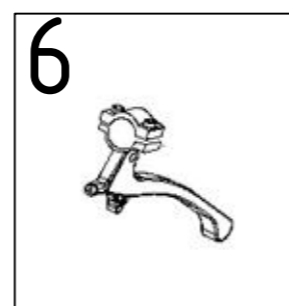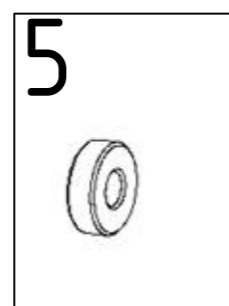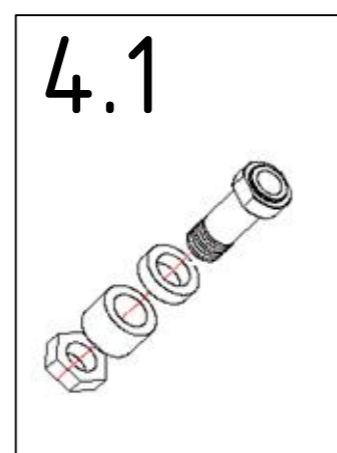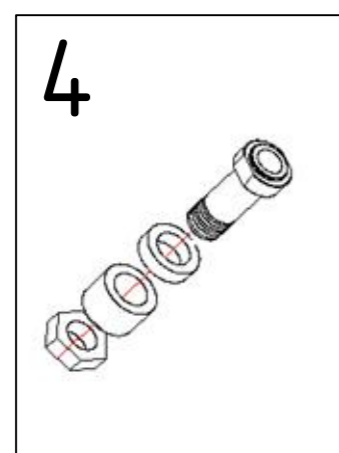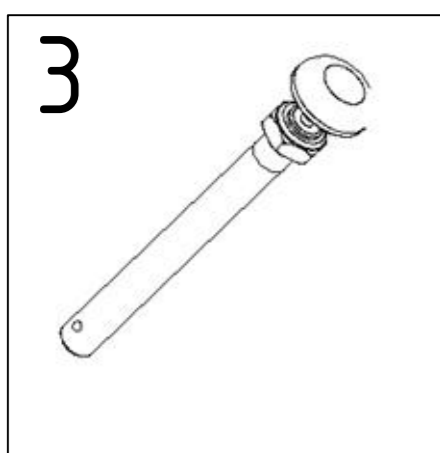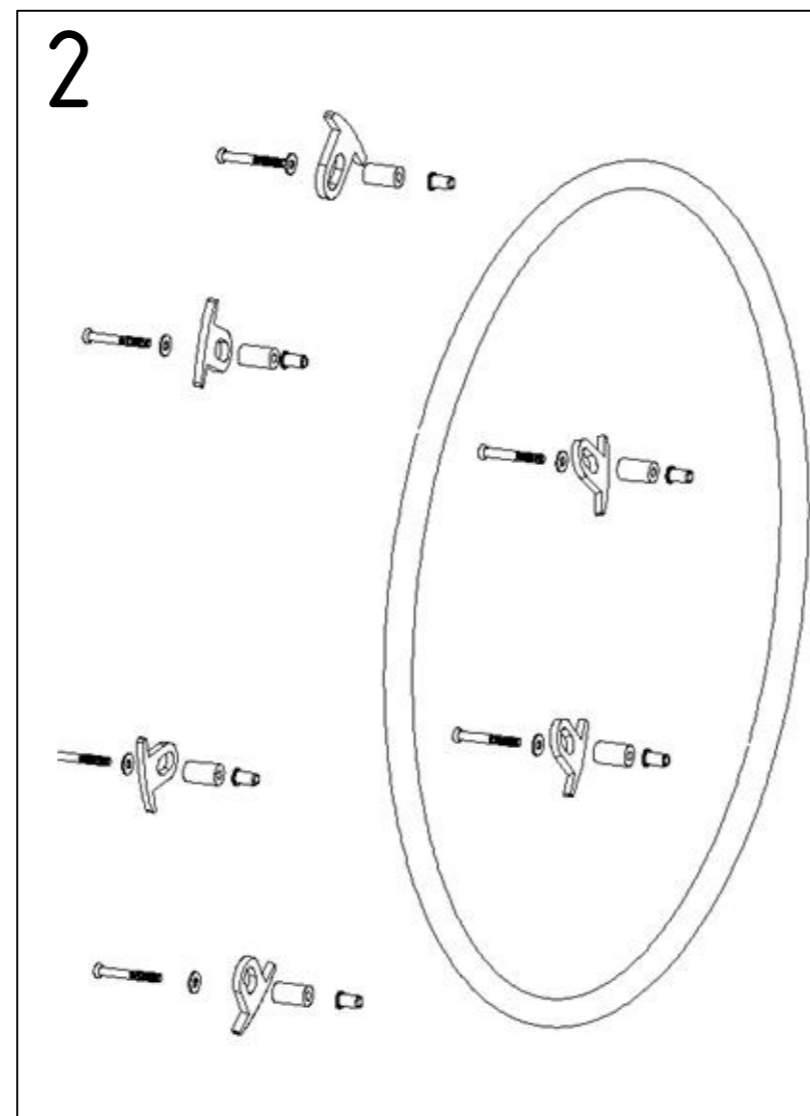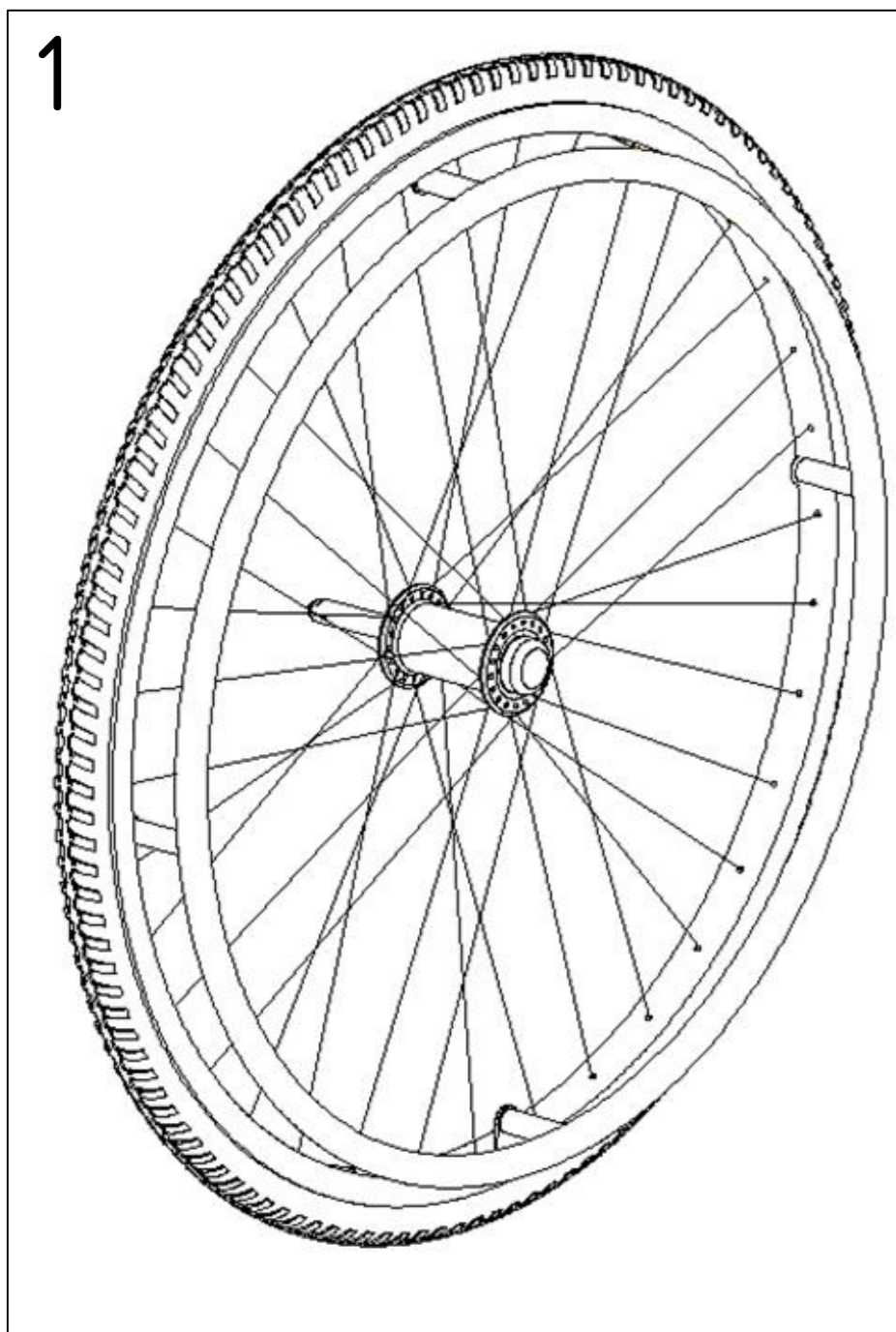

Facelift ab Seriennummern:				
1036P0000000840				
1036V				
	AN vor Facelift	AN ab Facelift	Stückliste BG5	Bezeichnung 2
5	1010508000		Radlager	Hinterrad S-Eco 300 XL
1	9500161000		Rad 24" PU, komplett	6-Punkt Alu-Greifreifen für S-Eco 300 XL
	9500201000		Rad 24" PU, Trommelbremse	6-Punkt Alu-Greifreifen für S-Eco 300 XL
4	1270509000		Lagerbuchse 51mm	für Steckachse S-Eco 300 XL
3	1270510000		Steckachse	für Hinterrad für S-Eco 300 XL
2	1310515000		Greifreifen 24", 6-Punkt	für S-Eco 300 XL
o. Abb.	9000667000		Trommelbremsträger rechts	mit Bremsbacken für S-Eco 300 XL
	9000668000		Trommelbremsträger links	mit Bremsbacken für S-Eco 300 XL
	9000687000		Verdrehsicherungsprofil TB links	für S-Eco 300 XL
	9000688000		Verdrehsicherungsprofil rechts TB	für S-Eco 300 XL
6	9000804000		Handbremshebel für Trommelbremse	25mm selbstauslösend für S-Eco 300 XL
	9000815000		Brems- und Bowdenzug komplett	für Trommelbremse S-Eco 300 XL
4.1	9000823000		Lagerbuchse 63mm	für Steckachse TB S-Eco 300 XL

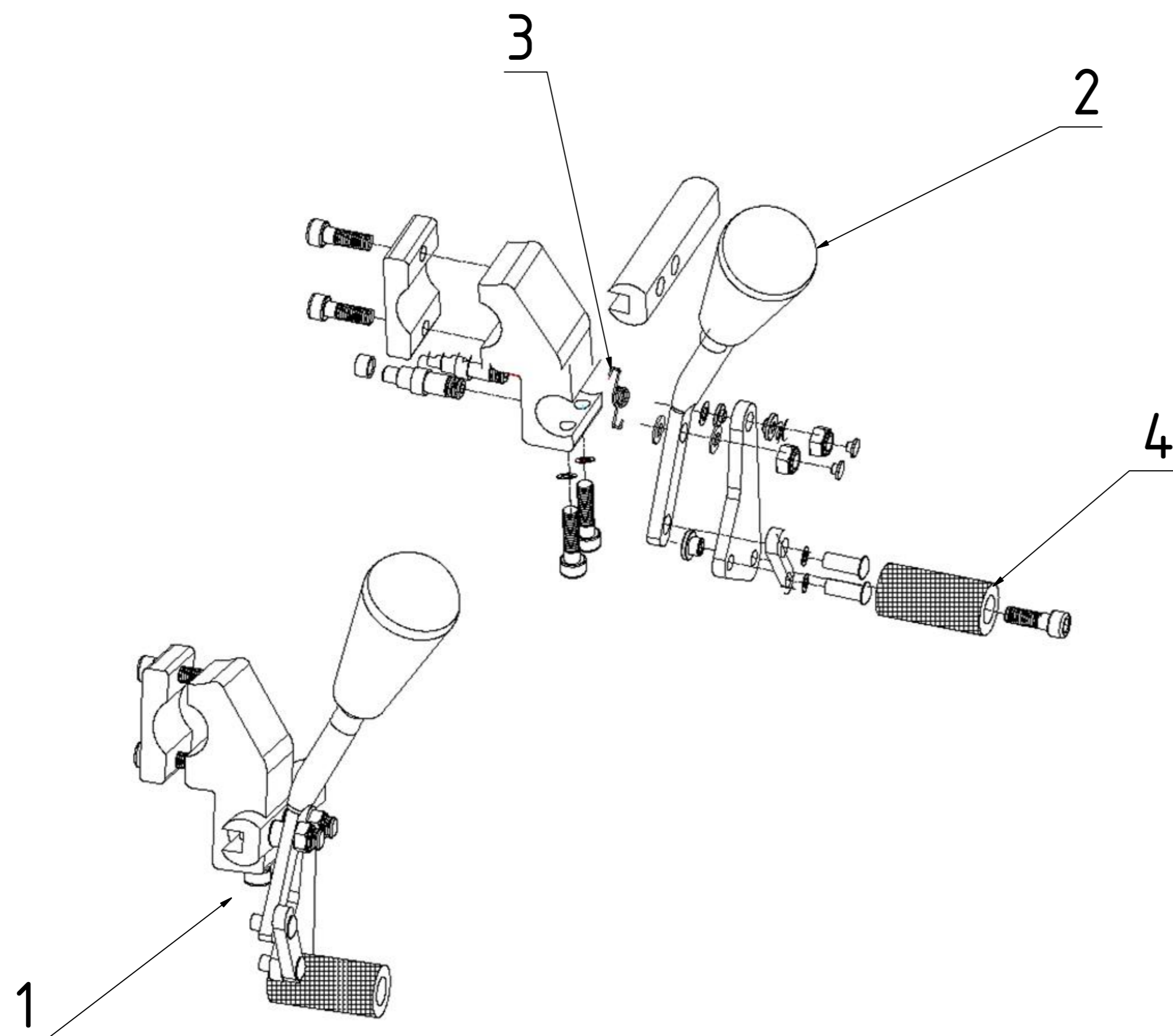

Facelift ab Seriennummern:				
1036P0000000840				
1036V				
	AN vor Facelift	AN ab Facelift	Stückliste BG6	Bezeichnung 2
1	1270601000	0009601000	Feststellbremse links, komplett	für S-Eco 300 XL
	1270602000	0009600000	Feststellbremse rechts, komplett	für S-Eco 300 XL
2	1270605000	0009602000	Bremshebelgummi	für Feststellbremse S-Eco 300 XL
4	1270608000	0009605000	Bremsbolzen	für Feststellbremse S-Eco 300 XL
3	1270612000		Rückholfeder rechts	für Bremshebel Feststellbremse S-Eco 300 XL
	1270613000		Rückholfeder links	für Bremshebel Feststellbremse S-Eco 300 XL

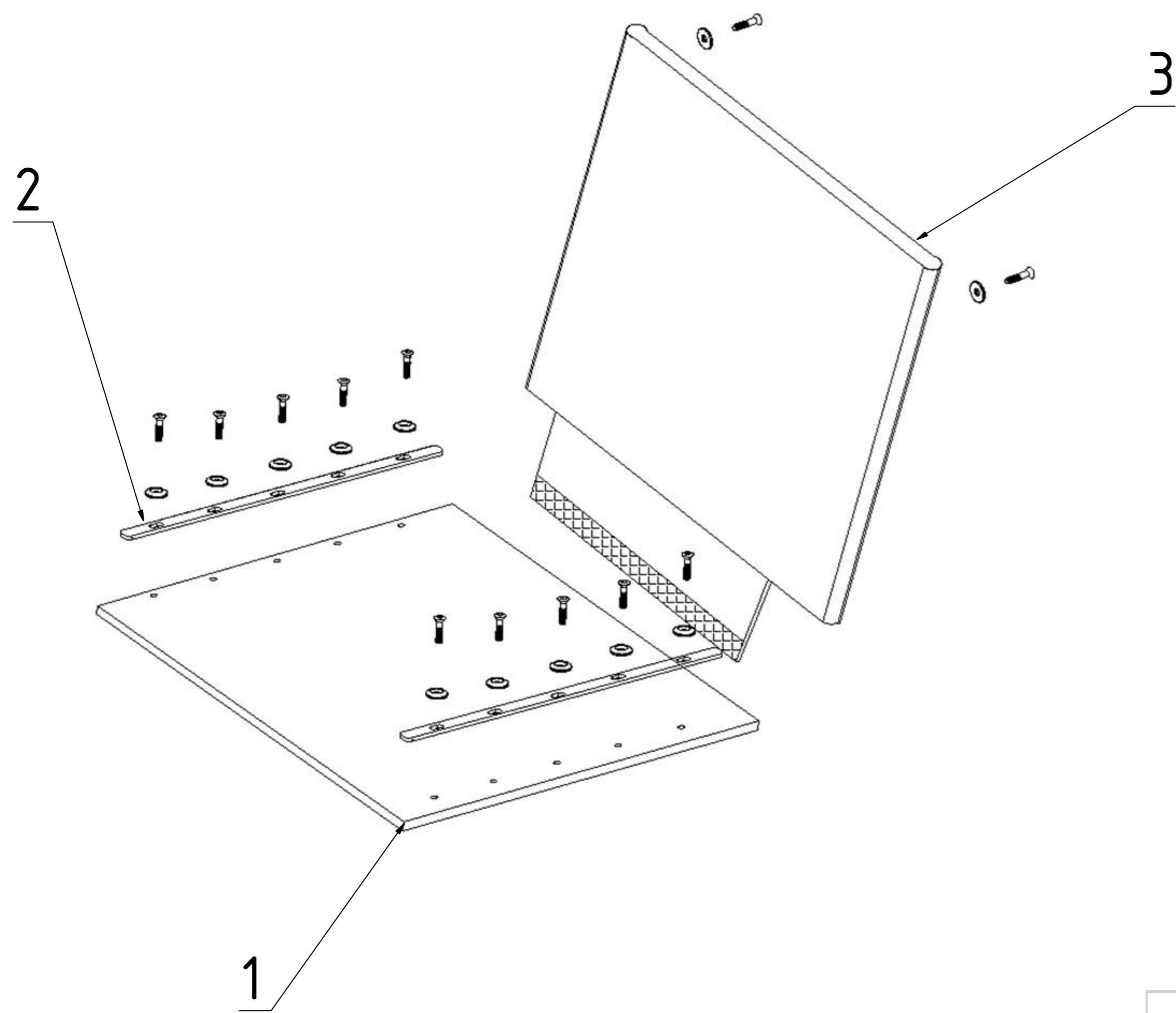

Facelift ab Seriennummern:				
1036P0000000840				
1036V				
	AN vor Facelift	AN ab Facelift	Stückliste BG9	Bezeichnung 2
1	1036955000		Sitzbespannung, Vinyl, 52cm	für S-Eco 300 XL
	1036956000		Sitzbespannung, Vinyl, 55cm	für S-Eco 300 XL
	1036957000		Sitzbespannung, Vinyl, 58cm	für S-Eco 300 XL
3	1030916000		Rückenbespannung, Vinyl, 52cm	für S-Eco 300 XL
	1036958000		Rückenbespannung, Vinyl, 55cm	für S-Eco 300 XL
	1036959000		Rückenbespannung, Vinyl, 58cm	für S-Eco 300 XL
2	1036909000		Halteblech Sitzbespannung	für S-Eco 300 XL