

Elektrorollstühle und Elektroscooter

Wichtige Hinweise für batteriebetriebene Fahrzeuge

DE



Enjoy mobility.



1. Inbetriebnahme:

Die Batterien Ihres Elektrorollstuhles oder Elektroscooter (hier Rollstuhl) sind vor der ersten Benutzung vollständig aufzuladen. Schließen Sie hierzu das mitgelieferte Ladegerät am Fahrzeug an. Beachten Sie bitte die separat dem Ladegerät beiliegende Bedienungsanleitung für Details.

Die Ladevorgänge können, je nach Größe und Ladezustand der Batterien, bis zu 12 Std. dauern. Hierbei ist, wie auch zukünftig bei allen Ladevorgängen, der Ladezustand am Ladegerät abzulesen und nicht an der Batterieanzeige des Rollstuhles.

Je nach Blei-Batterietechnologie (AGM oder Gel) stellt sich die maximal nutzbare Batteriekapazität erst nach einigen Ladevorgängen ein (bis zu 10 vollständige Ladevorgänge). Achten Sie in dieser Zeit besonders darauf, die Batterien nicht vollständig leerzufahren und nach jeder Fahrt möglichst wieder voll aufzuladen.

2. Tägliche Nutzung

Laden Sie möglichst vor und nach jeder Fahrt die Batterien des Rollstuhles vollständig auf.

Machen Sie sich mit der Funktion der Batterieanzeige vertraut (siehe Bedienungsanleitung Ihres Rollstuhles) und achten Sie regelmäßig auf diese während der Fahrt.

Planen Sie Ihre Fahrten so ein, dass stets genügend Batterieladungsmenge vorhanden ist, damit eine Rückreise zum Startpunkt, ggf. zum nächsten Ladepunkt, möglich ist.

Bei einem sehr niedrigen Batterieladungsstand wird, je nach Rollstuhlmodell, zusätzlich zu der blinkenden Batterieanzeige eine akustische Warnung, z.B. ein sich wiederholendes Doppel-Piepen, ausgegeben. Ab diesem Zeitpunkt ist die Restreichweite des Rollstuhles sehr gering - wenige hundert Meter bis einige Kilometer - bitte dann umgehend die Batterien vollständig aufladen! Der Warnton wird erst nach einer vollständigen Batterieladung (siehe Anzeige am Ladegerät) deaktiviert. Sollte der Warnton trotz vollständiger Ladung weiter aktiv sein, dann quittieren Sie den Warnton folgendermaßen: mit dem noch am Rollstuhl angeschlossenen und eingeschalteten Ladegerät, den Rollstuhl über die An/Aus Taste oder den Fahr Schlüssel, ein- und nach wenigen Sekunden wieder ausschalten.

Achten Sie zusätzlich auf die Nutzungshinweise des mitgelieferten Ladegerätes, welche am Ladegerät selbst und in der Bedienungsanleitung des Ladegerätes beschrieben sind. Es ist ausschließlich das mitgelieferte und von Bischoff & Bischoff freigegebene Ladegerät zu verwenden!

3. Lagerung, Austausch und Entsorgung von Batterien

Wird der Rollstuhl für längere Zeit außer Betrieb genommen/gelagert, so ist dieser vollgeladen in einem trockenen, frostfreien Raum zu lagern. Um der Selbstentladung der Batterien entgegenzuwirken, den Rollstuhl mindestens 1 mal pro Monat mit dem mitgelieferten Ladegerät für mindestens 24 Std. aufladen.

Die im Rollstuhl verwendeten Gel oder AGM Batterien sind über die gesamte Lebensdauer wartungsfrei. Diese ist sehr abhängig von der individuellen Nutzung und den Ladegewohnheiten. Um die maximale Batterielebensdauer zu gewährleisten bitte die hier beschriebenen Empfehlungen beachten.

Lassen Sie den Austausch und die Entsorgung der Batterien nur durch das qualifizierte Fachpersonal ihres Fachhändlers durchführen. Achten Sie darauf, dass nur durch Bischoff & Bischoff freigegebene und geprüfte Batterien verwendet werden.

4. Sicherheitshinweise



Erläuterung der Warnsymbole auf den Batterien:

- A. Korrosiv (Batteriesäure)
- B. Nicht rauchen, keine offenen Flammen, keine Funken
- C. Explosives Gasgemisch
- D. Recycling
- E. Nicht in den Müll werfen
- F. Bedienungsanleitung beachten
- G. Schutzbrille tragen
- H. Batterie nicht kippen, Nur zugelassene Hebe- und Transporteinrichtungen verwenden.
- I. Gefährliche elektrische Spannung



Bischoff & Bischoff GmbH

Im Stöckmädle 13
D-76307 Karlsbad
www.bischoff-bischoff.com

MOVILIDAD Bischoff & Bischoff IBERIA S.L.

P.I. Can Mascaró
C./Ponent, Nave 1-A
E-08756 La Palma de Cervelló
www.bbiberia.es



ISO 13485
BUREAU VERITAS
Certification

