

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Description
1	1130100000	Handgriff	Handgrip
2	1130101000	Klemmhalter für Schieberohr	Clamp holder for slide tube
3	1130104000	Kreuzstrebe	Cross bar
4	1130602000	Bremse für 22"	Brake for 22"
5	1130200000	Kleiderschutz	Side panel
6	1130503000	Steckachse für 22"-Rad	Quick release axle for 22" wheel
7	1130502000	Hinterrad 22"	22" Rear wheel
8	1130102000	Auftrittskappe	Tipping sleeve
9	1130103000	Schieberohr	Push handle
10	1130300000	Arretierprofil Beinstütze	Legrest socket
11	1130400000	Vorderradgabel	Front fork
12	1130401000	Achsschraube vorne	Front caster bolt
13	1130402000	Vorderrad	Front wheel
14	1130301000	Wadengurt	Calf strap
15	1130302000	Beinstütze links	Swing away Legrest left
16	1130303000	Beinstütze rechts	Swing away Legrest right
17	1130900000	Rückenbespannung	Back upholstery
18	1130901000	Sitzbespannung	Seat upholstery
19	1130105000	Auflageprofil Kreuzstrebe	Support profile cross brace
20	1130106000	Armlehnenpolster links und rechts inkl. Schrauben	Armrest pads left and right incl. screws






Enjoy mobility.

VIDA 13"

Stand 21.02.2025

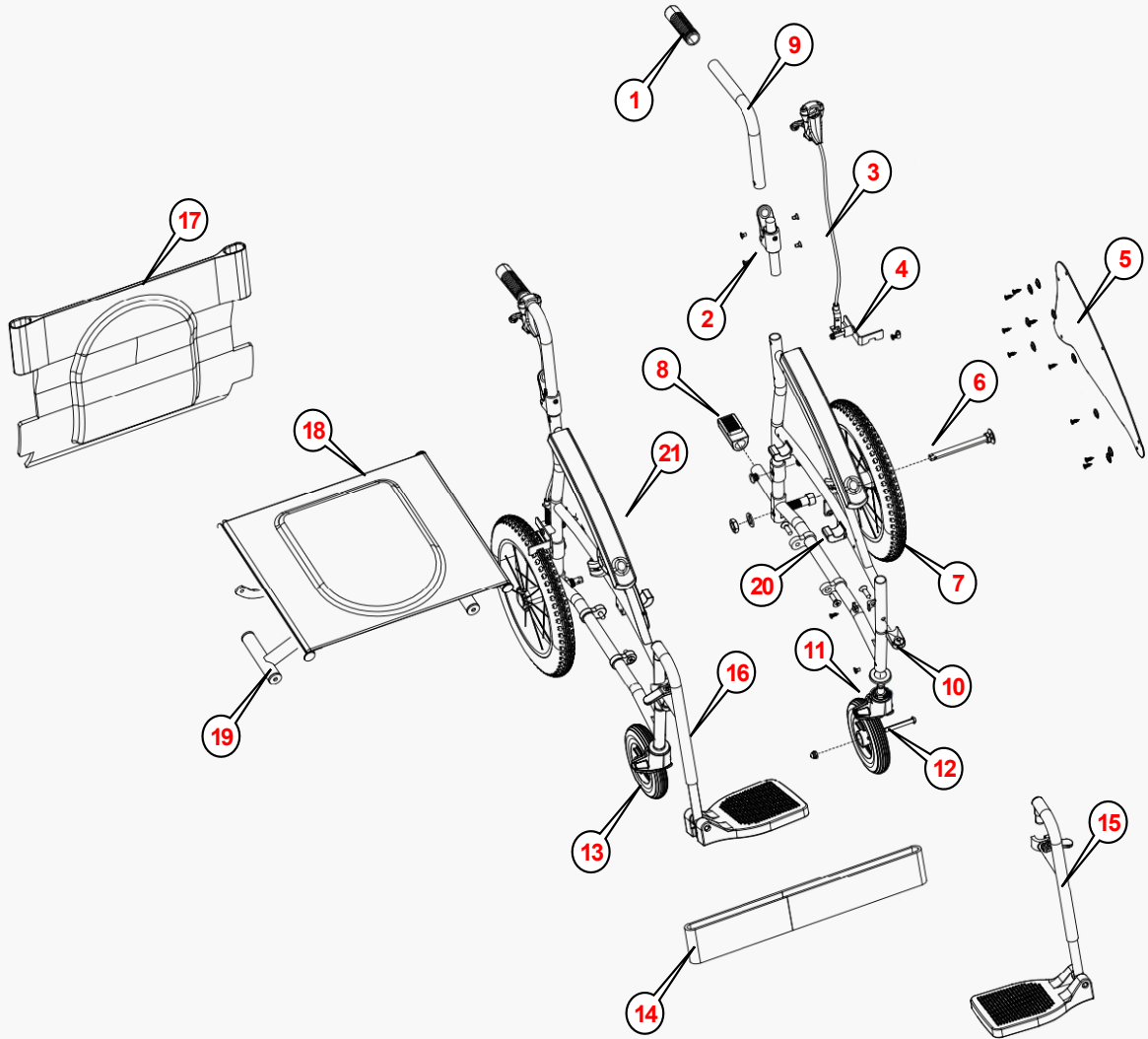

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Description
1	1130100000	Handgriff	Handgrip
2	1130101000	Klemmhalter für Schieberohr	Clamp holder for slide tube
3	1130600000	Bremse 13"	Handle brake
4	1130601000	Bremsklotz 13"	Brake shoe
5	1130200000	Kleiderschutz	Side panel
6	1130500000	Steckachse für 13"-Rad	Quick release bolt for 13" wheel
7	1130501000	Hinterrad 13"	13" Rear wheel
8	1130102000	Auftrittskappe	Tipping sleeve
9	1130103000	Schieberohr	Push handle
10	1130300000	Arretierprofil Beinstütze	Legrest socket
11	1130400000	Vorderradgabel	Front fork
12	1130401000	Achsschraube vorne	Front caster bolt
13	1130402000	Vorderrad	Front wheel
14	1130301000	Wadengurt	Calf strap
15	1130302000	Beinstütze links	Swing away Legrest left
16	1130303000	Beinstütze rechts	Swing away Legrest right
17	1130900000	Rückenbespannung	Back upholstery
18	1130901000	Sitzbespannung	Seat upholstery
19	1130104000	Kreuzstrebe	Cross bar
20	1130105000	Auflageprofil Kreuzstrebe	Support profile cross brace
21	1130106000	Armlehnenpolster links und rechts inkl. Schrauben	Armrest pads left and right incl. screws

