


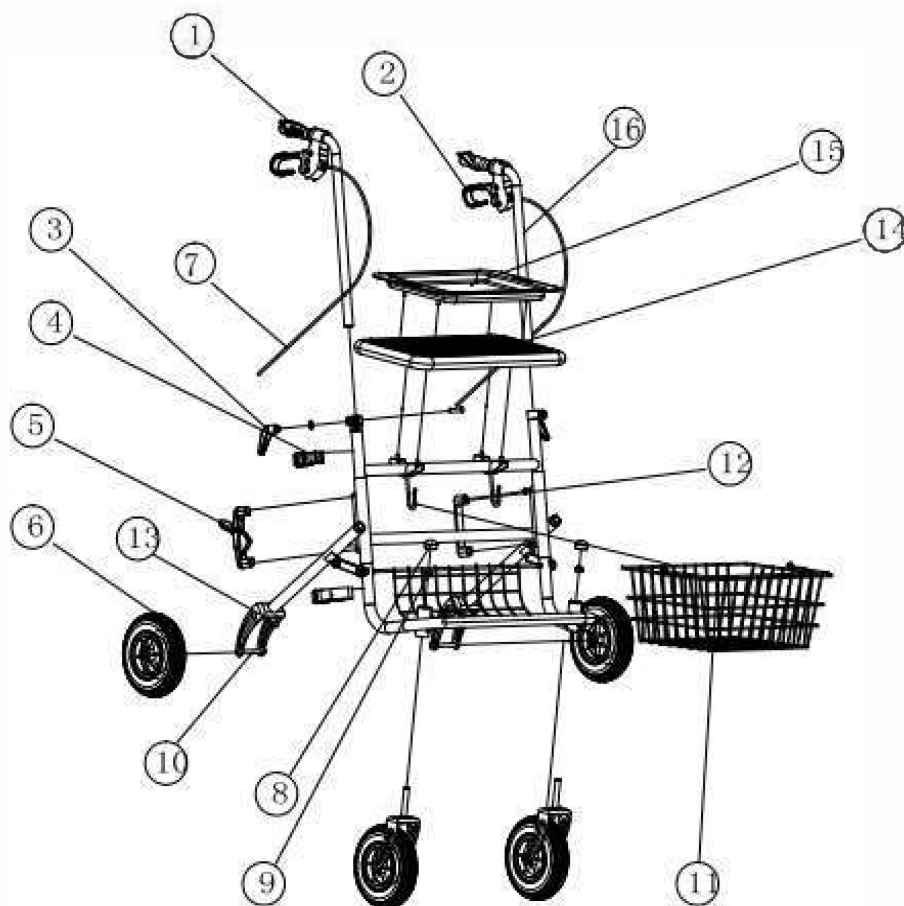

Stückliste			
Objekt	Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
1	4003132000	Handgriffset (rechts und links)	Stück
2+7+13	4003617000	Bremse komplett (Bremshebel rechts und links,	Stück
3	4003856000	Klemmhebel mit Schraube	Stück
4	4003805000	Stockhalter	Stück
5	4003142000	Auto-Lock System	Stück
6	9500132000	Rad inkl. Radlager (ohne Abb.)	Stück
8	4003105000	Kunststoffabdeckung	Paar
9+10	4003414000	Vorderradgabel komplett (Vorderradgabel mit Mutter, Achsschraube mit Mutter, Lenklager Radgabel ohne Abb.)	Stück
11	4003145000	Korb	Stück
12	4003119000	Führungsprofil Faltmechanismus	Stück
14	4002138000	Sitzpolster	Stück
15	4003141000	Tablett	Stück
16	4002123000	Griff-/Schiebestange (links und rechts)	Stück
ohne Abb.	4003088000	Rahmen-Verbindungshebel	Stück
Datum	Typ	*technische Änderungen vorbehalten	
01.08.2024	Rollator B XXL		

