


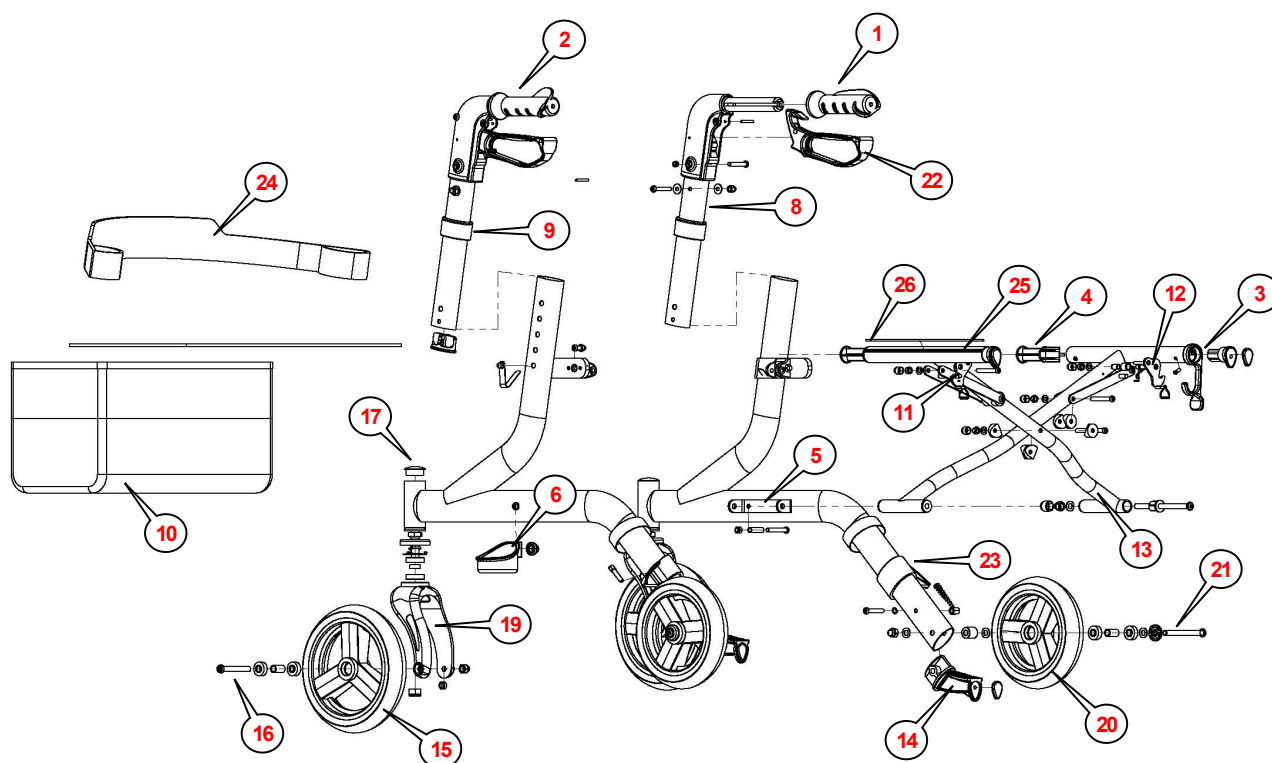

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Description	
1	4037130000	Handgriff rechts	Handgrip right	
2	4037131000	Handgriff links	Handgrip left	
3	4037172000	Faltsicherung rechts mit Reflektor rot	Crossbar arrester right with reflector red	
	4037173000	Reflektor rot links	Reflector red right	
4	4037174000	Taschenhalter mit Reflektor weiß	Bag holder with reflector white	
5	4037175000	Kreuzstrebenhalter mit Schrauben komplett	Crossbar holder with screws complete	
6	4037403000	Stockhalter komplett	Cane holder complete	
8	4038110000	Schieberohr komplett	Push handle complete	
9	4038112000	Führungsprofil Schieberohr	Guide profile pushing tube	
10	4037146000	Tasche	Bag/pocket	
11	4038151000	Rastmechanismus links, komplett	Seat lock system left complete	
12	4038152000	Rastmechanismus rechts, komplett	Seat lock system right complete	
13	4038170000	Kreuzstrebe komplett	Crossbar complete	
14	4038180000	Ankipphilfe mit Reflektor rot	Anti-tipper with red reflector	
15	4038400000	Vorderrad 8" EVA mit Radlager	Front wheel 8" EVA with bearing	
16	4038402000	Achsschraube vorne komplett	Front caster bolt complete	
17	4038403000	Abdeckkappe für Castorbuchse	Plastic cap for castor	
19	4038405000	Vorderradgabel mit Radlager und Lenkbolzen	Front fork with bearing and bolt	
20	4038500000	Hinterrad 7" EVA mit Radlager	Rear wheel 7" EVA with bearing	
21	4038501000	Achsschraube hinten komplett	Rear castor bolt complete	
22	4038624000	Bremsgriff komplett mit Bremszug	Brake grip complete with brake cable	
23	4038625000	Bremsschlitten hinten komplett	Rear brake bracket complete	
24	4038902000	Rückengurt mit Schrauben komplett	Backrest with screws complete	
25	4038903000	Sitzbespannung komplett	Seat upholstery complete	
26	4038905000	Kunststoffkeder für Sitzbespannung	Plastic seat rail for seat upholstery	