


Bedienungsanleitung



DE

Enjoy mobility.

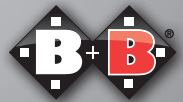



Sehr geehrter Kunde,
die Ihnen vorliegende Bedienungsanleitung soll Sie mit der Bedienung und Handhabung Ihrer B+B Gehhilfe besser vertraut und somit sicherer machen. Wir wünschen Ihnen viel Freude und mehr Mobilität mit unserem Produkt!

1. Entfalten

Seitenteile mit Griffen nach außen schwenken, bis sie hörbar einrasten (Bild 1).

2. Falten

Teleskopverriegelung drücken (Bild 2 | Pos. 1) und gleichzeitig erst das rechte, dann das linke Seitenteil nach innen schwenken (Pos. 2 und 3).



3. Rahmenhöhe einstellen

Federstift drücken und das Standrohr in der orthopädisch korrekten Position einrasten lassen. Wiederholen Sie den Vorgang an allen vier Beinen (Bild 3). Beachten Sie hier die Kippgefahr!

4. Achtung: Sicherheitshinweise Risikoanalyse nach DIN EN ISO 13485

- Max. Belastbarkeit 120 kg!
- Beim Faltvorgang auf Quetschgefahr achten!

• Hinweise nach der Höheneinstellung:

- auf korrekten Sitz der Federstifte achten!
- alle 4 Standfüße auf die gleiche Höhe einstellen!
- nur auf festem, ebenen Untergrund einsetzen!

5. Technische Daten



	Rezi	Gebo
Gewicht	2,5 kg	2,2 kg
Höhe	81,4 - 91,4 cm	81,2 - 91,0 cm
Querstreben	3	2
Stufen	5	5
Farbe	Silber	Silber
Breite	55,0 cm	55,0 cm
Tiefe	46,0 cm	46,5 cm

6. Garantie

Garantieleistungen beziehen sich auf alle Mängel des Produkts, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Bei Beanstandungen ist die vollständig ausgefüllte Garantiekarte mit einzureichen.



Nichtbeachtung der Betriebsanleitung sowie unsachgemäß durchgeführte Wartungsarbeiten, als auch insbesondere technische Änderungen und Ergänzungen (Anbauten) ohne Zustimmung der Bischoff & Bischoff GmbH führen zum Erlöschen sowohl der Garantie als auch der Produkthaftung allgemein.

Für unsere Produkte übernehmen wir die gesetzliche Garantie von 2 Jahren. Für Batterien, Austauschgeräte und Reparaturen gilt eine Gewährleistungsfrist von 1 Jahr. Darüber hinaus beachten Sie bitte die B+B Pflege-, Gewährleistungs-, Hygiene- und Wartungshinweise. Diese werden Ihnen von Ihrem Fachhändler gerne zur Verfügung gestellt.

Garantie Urkunde

Produkt: Rezi / Gebo

Modellnummer:

Serien-Nummer:*

* (vom Händler einzutragen)

Fachhändler:

Datum und Stempel

(Achten Sie auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.)

*Hinweisschilder befinden sich auf dem Seitenrahmen

Bischoff & Bischoff GmbH

Im Stöckmädle 13

D-76307 Karlsbad

www.bischoff-bischoff.com

