


Bedienungsanleitung
Senio



DE

Enjoy mobility.

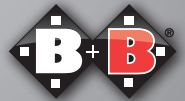

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkung	4	8.	Pflegehinweise für den Benutzer	19
1.1.	Zeichen und Symbole	5	8.1.	Reinigung	19
2.	Wichtige Sicherheitshinweise	5	8.2.	Desinfektion	20
2.1.	Allgemeine Sicherheitshinweise	5	8.3.	Überprüfung des Rollators durch den Benutzer	21
2.2.	Teilnahme am Straßenverkehr	7	8.3.1.	Bremsenüberprüfung	21
2.3.	Indikation	7	8.3.2.	Überprüfung der Bereifung	21
2.4.	Kontraindikation	7	8.4.	Wartungshinweis	21
2.5.	Bremsen	7	9.	Wartungshinweis für den Fachhandel	22
2.6.	Zweckbestimmung	7	10.	Reparaturen	22
2.7.	Konformitätserklärung	8	11.	Transport	22
2.8.	Verantwortlichkeit	8	12.	Lagerung / Versand	22
2.9.	Nutzungsdauer	8	13.	Weitergabe des Rollators	23
3.	Produkt- und Lieferübersicht	9	14.	Entsorgung	24
3.1.	Prüfung der Lieferung	9	15.	Garantie	25
3.2.	Lieferumfang	9			
3.3.	Typenschild und Seriennummer	10			
3.4.	Produktübersicht	11			
4.	Zusammenbau/Anpassungen	12			
4.1.	Schiebegriffe anbringen	12			
4.2.	Entfalten	12			
4.3.	Falten	12			
4.4.	Korb und Tablett anbringen	13			
4.5.	Schiebegriffe einstellen	14			
4.6.	Bremsbetätigung / -einstellung	14			
4.7.	Räder und Bereifung	15			
5.	Zubehör	15			
6.	Benutzung	15			
7.	Technische Daten	17			

1. Vorbemerkung

Lieber Benutzer,
mit dem Erwerb Ihres Bischoff & Bischoff Rollators Senio erhalten Sie ein Produkt, das durch seine Variabilität neue Maßstäbe setzt. Die Ihnen vorliegende Bedienungsanleitung soll Ihnen dazu dienen, sich mit der Bedienung und Handhabung des Rollators besser vertraut zu machen.

Bitte lesen und beachten Sie vor der ersten Inbetriebnahme Ihres neuen Rollators aufmerksam die Bedienungsanleitung. Diese ist ein fester und notwendiger Bestandteil des Rollators. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung griffbereit auf und geben Sie diese bei Weitergabe des Rollators mit.

Für Benutzer mit Sehbehinderung ist dieses Dokument als PDF-Datei auf unserer Internetseite www.bischoff-bischoff.com zugänglich. Reparatur- und Einstellarbeiten erfordern eine spezielle technische Ausbildung und dürfen daher nur von Fachhändlern durchgeführt werden, die durch die Bischoff & Bischoff GmbH autorisiert sind.

Hinweis!

Trotz sorgfältiger Recherche und Bearbeitung können sich in unseren Bedienungsanleitungen fehlerhafte Angaben eingeschlichen haben. Technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können Zubehör enthalten. Die jeweils aktuelle Version der Bedienungsanleitungen finden Sie im Downloadbereich auf unserer Website:

www.bischoff-bischoff.com

1.1. Zeichen und Symbole



Wichtig! Bezeichnet besonders nützliche Informationen im jeweiligen Sachzusammenhang.



Achtung! Bezeichnet besonders sicherheitsrelevante Hinweise. Bedienungsanleitung beachten!

2. Wichtige Sicherheitshinweise

2.1. Allgemeine Sicherheitshinweise

- Max. Belastbarkeit des Rollators Senio: 136 kg.
- Beachten Sie die Klemmgefahr beim Zusammen- und Auseinanderfalten. Es dürfen sich keine Kleidungsstücke oder Körperteile zwischen beweglichen Teilen verfangen.
- Griffrohre der Körpergröße anpassen (Kapitel 4.5).
- Jede Bremse wirkt nur auf ein Laufrad.
- Der Korb darf mit max. 5 kg beladen werden.
- Vor Anwendung des Rollstuhls kontrollieren Sie bitte, ob alle angebauten Teile ordentlich befestigt sind.
- Zur Reinigung keine aggressiven oder ätzenden Mittel verwenden.
- Vor jedem Fahrtantritt ist der Rollator auf Unversehrtheit und die Funktionstauglichkeit der Bremse zu überprüfen.
- Die Oberflächen des Rollators können sich bei direkter Sonneneinstrahlung aufheizen. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Kollisionen jeglicher Art vermeiden! Vermeiden Sie ein ungebremstes Fahren gegen ein Hindernis (Stufe, Bordsteinkante).
- Erneuern Sie die Reifen sobald diese abgefahren sind.

- Die passive Beleuchtung (Reflektoren) Ihrer Gehilfe vor jedem Fahrtantritt auf Unversehrtheit und Sichtbarkeit für andere Verkehrsteilnehmer überprüfen.
- Die Materialien sind beständig gegen Entflammbarkeit, dennoch sind Zigaretten und andere mögliche Brandquellen von Ihrer Gehilfe fern zu halten.
- Beachten Sie, dass sich Polsterteile, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, aufheizen und bei Berührung Hautverletzungen verursachen können. Decken Sie daher diese Teile ab oder schützen Sie den Rollstuhl vor Sonneneinstrahlung.



Den Rollstuhl vor Sonneneinstrahlung schützen, um Verbrennungen durch aufgeheizte Komponenten zu vermeiden

- Beachten Sie ebenfalls, dass sich Rahmen und Polsterteile im Winter stark abkühlen können. Stellen Sie den Rollstuhl bei kaltem Wetter nach Möglichkeit nicht draußen ab.
- Die Lager- und Betriebsbedingungen beachten
- Meldung von Vorkommnissen:
Wenn Sie als Betreiber, Nutzer oder deren Angehörige mögliche Defekte oder Funktionseinschränkungen feststellen, wenden Sie sich bitte umgehend an einen autorisierten Fachhändler. Betreiber, Nutzer oder deren Angehörige sollten Ihren Fachhändler, der Ihnen das Produkt bereitgestellt hat, über mutmaßliche schwerwiegende Vorkommnisse, die direkt oder indirekt eine der nachstehenden Folgen hatten oder haben könnten und von denen sie betroffen sind informieren. Sie können dies auch der zuständigen Bundesoberbehörde melden.
- den Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person,
- die vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder anderer Personen,
- eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit.

2.2. Teilnahme am Straßenverkehr

Der Rollator ist für den Innen- und Außenbereich konzipiert. Beachten Sie, dass wenn Sie am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen sich an die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung halten müssen.

2.3. Indikation

Der Rollator ist für erwachsene Personen geeignet, die in ihrer Mobilität beschränkt sind, jedoch über ausreichend Gehfähigkeit und Kraft verfügen, sich mit Hilfe des Rollators auch außerhalb der Wohnung zu bewegen.

Das maximale Nutzergewicht beträgt 136 kg.

2.4. Kontraindikation

Der Rollator für erwachsene Personen sollte nicht verwendet werden bei:

- Wahrnehmungsstörungen
- Gliedmaßenverlust an den Armen
- Starken Gleichgewichtsstörungen
- Stark eingeschränkter Sehfähigkeit
- Sitzunfähigkeit

2.5. Bremsen

Beachten Sie, daß jede Bremse nur auf ein Laufrad wirkt.

2.6. Zweckbestimmung

Der Rollator dient bewegungseingeschränkten, erwachsenen Menschen mit den angegebenen Indikationen zur Erhaltung, Förderung und Sicherung des Gehens und zusätzlich zur Unterstützung bei Alltagsverrichtungen (Transportfunktion, Hinsetzen bei Erschöpfung). Das maximale Benutzergewicht von 136 kg darf beim Senio nicht überschritten werden.

2.7. Konformitätserklärung

Die Bischoff & Bischoff GmbH erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass der Rollator Senio allen Anforderungen der MDR 2017/745 entspricht, die anwendbar sind.

2.8. Verantwortlichkeit

Eine Gewährleistung kann von uns nur übernommen werden, wenn das Produkt unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird. Änderungen, Erweiterungen, Reparaturen und Wartungsarbeiten können nur von solchen Personen ausgeführt werden, die von uns dazu ermächtigt wurden und wenn der Rollator unter Beachtung aller Gebrauchshinweise benutzt wurde.

2.9. Nutzungsdauer

Die zu erwartende Lebensdauer beträgt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch, Einhaltung der Sicherheits-, Pflege- und Wartungshinweise bis zu 5 Jahre. Über diesen Zeitraum hinaus kann der Rollator bei sicherem Zustand weiter verwendet werden.

3. Produkt- und Lieferübersicht

3.1. Prüfung der Lieferung

Alle Produkte der Bischoff & Bischoff GmbH werden einer ordnungsgemäßen Endkontrolle in unserem Hause unterzogen und mit dem CE-Zeichen versehen.

Der Rollator wird in einem speziellen Karton in Werkseinstellung geliefert. Nach dem Entpacken bewahren Sie den Karton nach Möglichkeit auf. Er dient zur evtl. späteren Einlagerung oder Rücksendung des Produkts.

Die Anlieferung und Einweisung erfolgt in der Regel über den qualifizierten Sanitätsfachhandel.

Bei Versand per Bahn oder Spedition ist die Ware im Beisein des Überbringers sofort auf Transportschäden zu kontrollieren.

Prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Im Falle von Unregelmäßigkeiten und Beschädigungen setzen Sie sich mit unserem Kundenservice in Verbindung.


3.2. Lieferumfang

Nach Erhalt der Ware prüfen Sie bitte umgehend den Inhalt auf Vollständigkeit. Der Inhalt besteht aus:

- Umverpackung
- Rollator
- zwei Schieberohren
- zwei Sternmuttern zum Befestigen und Einstellen der Schieberohre
- Bedienungsanleitung
- Korb
- Tablett

3.3. Typenschild und Seriennummer


Das Typenschild (Abb. 1) und die Seriennummer befinden sich unter dem Sitz am Rahmen.

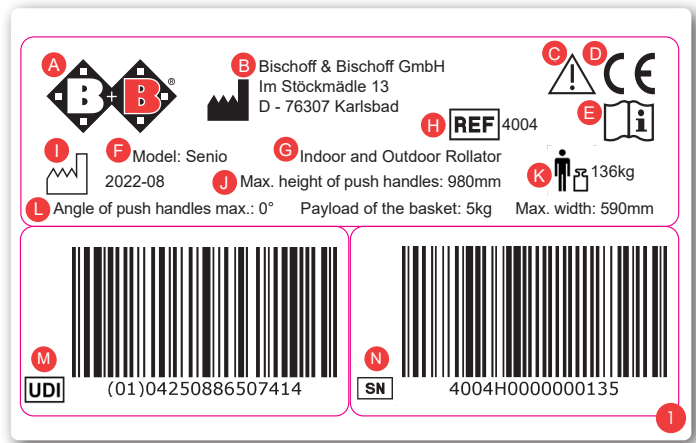


- A Herstellerlogo
- B Herstellerangabe
- C Achtung! - Gebrauchsanweisung beachten
- D CE-Zeichen
- E Wichtig! - Gebrauchsanweisung beachten
- F Modellbezeichnung
- G Anwendungsklasse
- H Modellnummer
- I Produktionsdatum
- J max. Höhe der Schiebegriffe
- K max. Benutzergewicht
- L max. Maße
- M UDI-Nummer
- N Seriennummer

3.4. Produktübersicht

Produktübersicht Rollator Senio (Abb 2 u. 3).

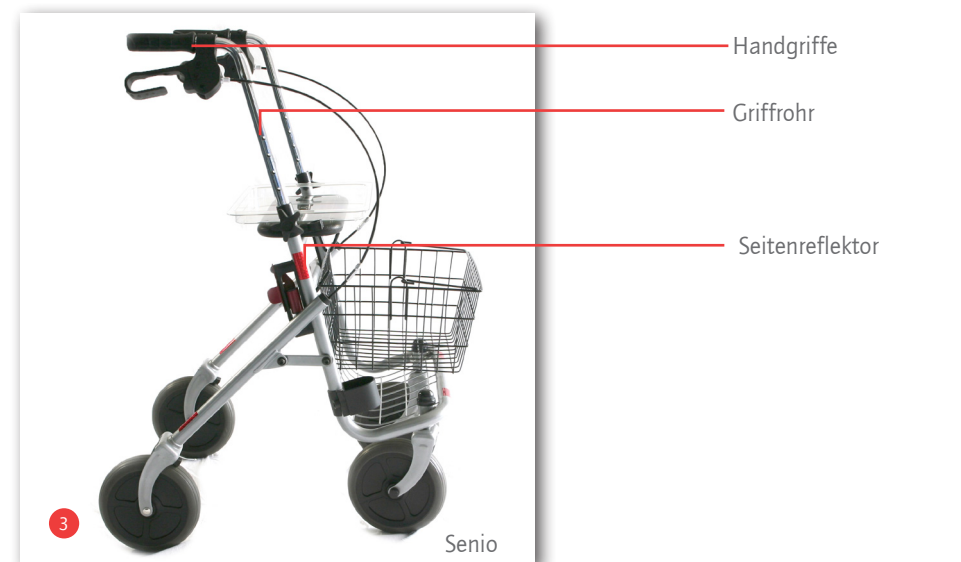

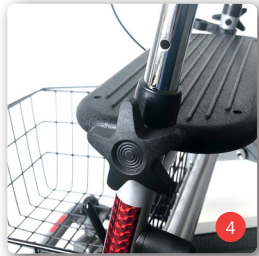

4. Zusammenbau/Anpassungen

4.1. Schiebegriffe anbringen

- Stecken Sie die Schiebegriffe in die Griffrohre und schieben Sie die Schraube von innen nach außen durch die Bohrungen.
- Schieben sie zuerst den gewölbten Plastikadapter auf die Schraube, sodass er sich an das Rohr anpasst. Anschließend schieben Sie die Scheibe auf die Schraube (Abb.10).
- Setzen Sie die Sternmutter auf die Schraube und ziehen Sie sie fest (Abb.4/11).
- Wie Sie die korrekte Höhe einstellen lesen Sie in Kapitel 4.5



4.2. Entfalten

- Positionieren Sie den Bischoff & Bischoff Rollator in Fahrtrichtung vor sich.
- Betätigen Sie die Feststellbremsen (siehe Kapitel 4.6).
- Halten Sie den Rollator an beiden Handgriffen fest (Abb. 5).
- Kippen Sie den Bischoff & Bischoff Rollator zu sich, bis die Lenkräder entlastet sind und drücken Sie gleichzeitig mit einem leichten Ruck die Handgriffe nach unten, so dass sich der Rollator entfaltet.
- Um den Klappmechanismus zu arretieren, legen Sie den Arretierungshebel in die Senkrechte (Abb. 6).



4.3. Falten

- Positionieren Sie den Bischoff & Bischoff Rollator in Fahrtrichtung vor sich.
- Betätigen Sie die Feststellbremsen.
- Zur Entriegelung ziehen Sie auf der rechten Seite die Entriegelungsvorrichtung nach links in die Waagerechte (Abb. 7).




Beachten Sie, dass sich bei Betätigung des Hebels der Rollator ruckartig zusammenfallen kann.

- Halten Sie den Rollator mit beiden Händen fest, halten Sie einen Fuß (rechts oder links) an der entsprechenden Ankipphilfe und ziehen Sie den Rollator zu sich, bis er sich zusammenfaltet
- Achten Sie darauf, dass bei den Faltvorgängen keine Kleidungsstücke eingeklemmt werden.
- Um den Rollator komplett zu falten, ziehen Sie die Handgriffe zu sich heran. Die Lenkräder rutschen zwischen die Hinterräder.

4.4. Korb und Tablett anbringen

- Der Bischoff & Bischoff Rollator ist entfaltet. Betätigen Sie die Feststellbremsen.
- Stellen Sie sich vor den Rollator.
- Hängen Sie den Korb einfach in die an den vorderen Rahmenrohren angebrachten Haken ein (Abb. 8). Zum Abnehmen des Korbs einfach den Tragebügel in die Hand nehmen und nach oben abnehmen.
- Legen Sie das Tablett von oben so auf das Sitzpolster, dass sich die vier Kunststoffzapfen des Tablett in die Löcher des Sitzpolsters drücken lassen (Abb. 9).

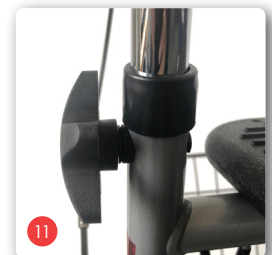



4.5. Schiebegriffe einstellen

- Der Bischoff & Bischoff Rollator ist entfaltet. Betätigen Sie die Feststellbremsen.
- Positionieren Sie sich hinter dem Bischoff & Bischoff Rollator und lassen Sie Ihre Arme locker nach unten hängen.
- Stellen Sie nun die Schiebegriffe so ein, dass sie sich in Höhe Ihrer Handgelenke befinden.
- Schieben Sie durch die Bohrung, die dieser Höhe am nächsten ist, die Schraube von innen nach außen. Setzen Sie den gewölbten Plastikadapter und anschließend die Scheibe auf die Schraube (Abb.10).
- Setzen Sie die Sternmutter auf das Gewinde und ziehen Sie sie fest (Abb. 11).
- Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Schiebegriffe auf der gleichen Höhe befinden.



4.6. Bremsbetätigung / -einstellung

Betriebsbremse

Die Betriebsbremse wird mit den beiden Handbremshebeln an den Schiebegriffen durch Ziehen nach oben betätigt (Abb. 12). Betriebs- und Feststellbremse wirken auf die Laufräder.



Feststellbremse

- Drücken Sie zum Arretieren die beiden Bremshebel nach unten (Abb. 13).
- Zum Lösen ziehen Sie die beiden Bremshebel zurück in die Mittelstellung (Abb. 14).



Bremseinstellung

Wir empfehlen, die Einstellungen der Bremsen zusammen mit Ihrem Fachhändler durchzuführen. Bei ausreichenden technischen Kenntnissen können Sie diese auch selbst vornehmen.

Die Bremse ist richtig eingestellt, wenn ohne Betätigung der Bremse der Bremsbolzen das Laufrad nicht berührt und die Feststellbremse noch komfortabel zu betätigen ist.

- Lösen Sie die Kontermutter (Abb. 15, Pfeil), so dass die Einstellmutter gedreht werden kann.
- Drehen Sie nun die breite Einstellmutter weiter raus oder rein, um die Bremswirkung zu verstärken bzw. zu verringern.
- Ziehen Sie die Kontermutter wieder fest an.
- Wiederholen Sie den Vorgang ggf. auch bei der anderen Bremse.

4.7. Räder und Bereifung

Ihr Rollator ist mit pannensicheren PU-Rädern der Größe 200 x 50 mm ausgerüstet.

5. Zubehör

Als Zubehör sind Sitz, Tablett, Korb und Stockhalter bereits in der Grundausstattung enthalten.

6. Benutzung

Laufen

Machen Sie Ihre ersten Gehversuche auf ebenem, festem Untergrund. Machen Sie sich insbesondere mit der Funktion der Bremsen vertraut. Lassen Sie sich dabei von einer Hilfsperson begleiten.

Für bessere Sichtbarkeit befinden sich an den Seiten, vorn und auf der Rückseite Reflektoren (Abb. 16 u. 17).

Für ein anatomisch korrektes Gangbild müssen die Schiebegriffe in der richtigen Höhe eingestellt sein (Kapitel 4.5).



- Stellen Sie sich in den Rollator, so dass Ihre Füße auf einer Höhe mit den Hinterrädern sind.
- Nehmen Sie eine aufrechte Körperhaltung ein.
- Fassen Sie die Schiebegriffe mit beiden Händen, Ihre Arme sind dabei leicht angewinkelt.

Beim Gehen mit dem Rollator versuchen Sie mit Ihrem Körper möglichst nah an den Schiebegriffen zu bleiben. Das erhöht Ihre Stabilität und die Kippsicherheit, außerdem vermeiden Sie so einen krummen Rücken. Versuchen Sie generell, im Rollator zu laufen und nicht hinter dem Rollator. Machen Sie kleine Schritte und schieben Sie den Rollator nicht zu weit nach vorne.

Richtungswechsel und Geschwindigkeit bestimmen Sie durch das Schieben des Rollators. Nutzen Sie immer beide Bremsen, um Ihre Fahrt zu verlangsamen. Der Rollator würde sich sonst mit dem ungebremsten Rad um das gebremste Rad drehen und Sie könnten stürzen.

Hindernisse sind nach Möglichkeit zu umfahren. Versuchen Sie Rampen zu verwenden oder Aufzüge zu nehmen. Sollte das nicht möglich sein, muss der Rollator über das Hindernis getragen werden. Suchen Sie sich dafür nach Möglichkeit die Hilfe einer zweiten Person.

Um kleinere Hindernisse wie Bordsteinkanten zu überwinden nutzen Sie die Ankipphilfe (Abb. 18) zum Ankippen des Rollators (Abb.19).

Sitzgelegenheit

Der Rollator ist so konstruiert, dass Sie ihn auch als Sitzgelegenheit für kleine Pausen nutzen können. Dazu ist er mit einer Sitzfläche ausgestattet. Ziehen Sie unbedingt die Feststellbremsen an, bevor Sie sich setzen. Der Rollator könnte wegrollen und Sie könnten stürzen.

Hebepunkte

Sie können den Rollator an den Griffen oder Rahmenteilern anheben, um ihn über Hindernisse oder Stufen zu tragen.

7. Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Typ:	Rollator
Farbe:	Silber
Modell:	4004
Höhe (Schiebegriffhöhe)	max. 980 mm
Länge:	680 mm
Gefaltet (H x L x B):	700 x 590 x 245 mm
Breite:	590 mm
Breite zwischen den Schiebegriffen:	430 mm
Breite der Schiebegriffe:	33 mm
Empfohlene Körpergröße:	159 cm - 190 cm
Max. Schiebegriffwinkel:	0°
Sitzhöhe:	610 mm
Sitzbreite:	380 mm
Sitzbreite effektiv:	420 mm
Wendekreis:	815 mm
Gewicht:	9,8 kg inkl. Korb und Tablett
Eigengewicht ohne Zubehör:	9,0 kg
Max. Belastbarkeit:	136 kg
Max. Belastbarkeit des Korbs:	5 kg
Rohrdurchmesser Rahmen:	26 mm

Reifen

Hinterräder:	200 x 50 mm
Lenkräder:	200 x 50 mm

Material

Rahmen:	Stahl, korrosionsfest, pulverbeschichtet
Handgriffe:	PP / TPE SEPS
Sitz:	PU
Entflammbarkeit:	flammhemmend

Betriebsbedingungen

Temperatur:	0 bis 50° C
Luftfeuchtigkeit:	20 bis 80 %

Lagerbedingungen

Temperatur:	-20 bis + 60 °C
Luftfeuchtigkeit:	45 bis 60 %

Standardausstattung für Rollator Senio

- Inklusive Korb und Tablett
- Anatomisch geformte Handgriffe
- Kombinierte Betriebs- und Feststellbremse
- Ankipphilfe am rechten Laufrad
- Jeweils zwei Reflektoren seitlich, vorn und hinten am Rahmen.
- Stabile Stahlkonstruktion, korrosionsfeste Beschichtung

8. Pflegehinweise für den Benutzer

8.1. Reinigung

Die Reinigung der Sitzmaterialien kann mit warmem Wasser unter Zuhilfenahme eines Schwammes und/oder einer weichen Bürste vorgenommen werden. Bei hartnäckiger Verschmutzung kann dem Wasser ein handelsübliches Reinigungsmittel zugesetzt werden.



Hinweis: Verwenden Sie keinesfalls aggressive Reinigungsmittel, wie z.B. Lösungs- / Scheuermittel oder harte Bürsten.

Kunststoffteile pflegen Sie am besten mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger. Beachten Sie bitte die Produktinformationen des Reinigungsmittels.

- Kunststoffverkleidungen werden durch nichtionische Tenside und Lösungsmittel, insbesondere Alkohole angegriffen!
- Die Rahmenteile des Rollstuhls mit einem feuchten Tuch abwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen zusätzlich ein mildes Reinigungsmittel verwenden.
- Die Räder mit einer feuchten Bürste mit Kunststoffborsten reinigen (keine Drahtbürste verwenden!).
- Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger.
- Schiebegriffe, Armpolster, Sitz- und Rückenpolster mit einem milden Reinigungsmittel abwaschen.
- Polsterteile können maschinell bei 40°C gewaschen werden. Nicht maschinell trocken, nur Trocknung bei Raumtemperatur.
- Anschließend trocknen Sie Ihren Rollator mit einem weichen Tuch (z. B. einem Geschirrtuch).
- Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger.

8.2. Desinfektion

- Vor der Desinfektion muss der Rollator gründlich gereinigt werden.
- Der Rollstuhl ist mit einem haushaltsüblichen Desinfektionsmittel desinfizierbar. Verwenden Sie zugelassene Sprüh-Desinfektionsmittel oder Wisch-Desinfektionsmittel auf alkoholischer Basis.
- Im Fall von mehreren Produktanwendern, ist ein handelsübliches Desinfektionsmittel vorgeschrieben.
- Verwenden Sie nur die vom Robert Koch Institut (RKI) und beim Verbund für Angewandte Hygiene e.V. zugelassenen Wischdesinfektionsmittel (z.B. Bacillol AF oder Kohrsolin FF); Einwirkzeit und Konzentration siehe Herstellerempfehlung.
- Achtung: Beschädigte Polsterteile können nicht hinreichend desinfiziert werden. Diese sollten ausgetauscht werden.
- Durch Desinfektionsmittel können unter Umständen die Oberflächen in Mitleidenschaft gezogen werden. Längerfristige Einschränkungen der Funktionsfähigkeit kann die Folge sein. Beachten Sie unsere beiliegende Übersicht über die wichtigsten Pflege-, Hygiene- und Wartungsarbeiten.



Achtung Infektionsgefahr! Bei mehreren Benutzern ist nach jeder Benutzung der Rollator zu reinigen.



Achtung! Verwenden Sie keinen Hochdruck- oder Dampfreiniger.

8.3. Überprüfung des Rollators durch den Benutzer

8.3.1. Bremsenüberprüfung

Überprüfen Sie vor jedem Fahrtantritt die Funktionstüchtigkeit der Bremsen.

Bei Störungen oder Defekten am Rollator sind diese unverzüglich dem Fachhändler zur Instandsetzung zu übergeben.

Bei angezogenen Bremsen sollte der Rollator nicht wegzuschieben sein. Bei gelösten Bremsen sollte der Rollator leichtgängig und ohne Schleifgeräusche geradeaus laufen.

Sollten Sie ein ungewohntes Bremsverhalten bemerken, verständigen Sie sofort Ihren Fachhändler und stellen Sie die Nutzung sofort ein.

8.3.2. Überprüfung der Bereifung

Überprüfen Sie vor jedem Fahrtantritt die Reifen auf Unversehrtheit.

Bei Beschädigung des Reifens ist eine Instandsetzung durch eine autorisierte Fachwerkstatt zu veranlassen.

8.4. Wartungshinweis

Wir empfehlen die Gehilfe mindestens einmal im Jahr einer Inspektion durch den Fachhandel zu unterziehen.

Bei Störungen oder Defekten am Rollstuhl ist dieser unverzüglich dem Fachhändler zur Instandsetzung zu übergeben.

Die Reparatur und der Austausch von Teilen wird vom Fachhändler durchgeführt.

Dem Fachhändler werden auf Anfrage die notwendigen Informationen und Unterlagen für die Reparatur und Instandsetzung zur Verfügung gestellt.

Für Fragen steht Ihnen der Bischoff & Bischoff Kundenservice zur Verfügung.



Sie müssen Ihren Rollstuhl regelmäßig gemäß Wartungsplan überprüfen und als einwandfrei befinden.

9. Wartungshinweis für den Fachhandel

Dem Fachhändler werden auf Anfrage die notwendigen Informationen und Unterlagen für die Reparatur und Instandsetzung zur Verfügung gestellt. Ein Schulungsprogramm für den Fachhandel steht zur Verfügung.

Für Fragen steht Ihnen der Bischoff & Bischoff Kundenservice zur Verfügung.

10. Reparaturen

Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nur von autorisierten Partnern (Sanitätshäuser oder Fachhändler) durchgeführt werden. Einen Partner in Ihrer Nähe erfragen Sie bitte telefonisch bei unserem Kundenservice.

11. Transport

Ihr Rollator sollte nur in zusammengefaltetem Zustand transportiert werden (Abb. 20).

Im zusammengefaltetem Zustand sollte der Rollstuhl an festen Rahmenteilen im Fahrzeug gesichert werden.

12. Lagerung / Versand

Falls der Rollstuhl eingelagert oder versendet werden soll, müssen alle einsteckbaren und nicht befestigten Teile, außer Antriebsräder, entfernt und in passenden Kartons einzeln verpackt werden. Die einzeln verpackten Teile können dann zusammen in einem größeren Karton verpackt werden.

Empfehlenswert ist es, die Originalverpackung aufzubewahren und

für diese Zwecke einzulagern, so dass diese im Bedarfsfall verfügbar ist. Dann ist Ihr Rollstuhl während der Lagerung oder des Transportes optimal gegen Umwelteinflüsse geschützt.

Für die Lagerung Ihres Toilettenstuhls beachten Sie bitte die Angaben in den technischen Daten. Um Schimmelbildung und eine Beschädigung der Polsterteile zu vermeiden, sollte der Lagerort möglichst trocken und nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein.


13. Weitergabe des Rollators

Der Rollator Senio ist zum Wiedereinsatz geeignet. Für den Wiedereinsatz ist der Rollator zunächst gründlich zu reinigen und zu desinfizieren. Anschließend ist das Produkt von einem autorisierten Fachmann auf den allgemeinen Zustand, Verschleiß und Beschädigungen zu überprüfen und ggf. zu reparieren.

Hierzu beachten Sie bitte die Bischoff & Bischoff Pflege-, Gewährleistungs-, Hygiene- und Wartungshinweise. Diese werden Ihnen von Ihrem Fachhändler gerne zur Verfügung gestellt.



Der Rollstuhl muß gemäß Wartungsplan geprüft werden und einwandfrei sein.

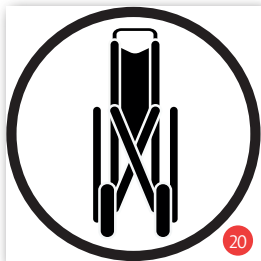

14. Entsorgung

Wenn Ihr Rollator nicht mehr verwendet wird und entsorgt werden soll, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Wenn Sie die Entsorgung selbst übernehmen möchten, erkundigen Sie sich bei ortsansässigen Recyclingunternehmen nach den Vorschriften Ihres Wohnorts.

15. Garantie

1. Für die von Bischoff & Bischoff gelieferten Produkte beträgt die Gewährleistungsfrist 24 Monate ab Kaufdatum. Die Produkte werden frei von Fabrikations- und Materialmängeln geliefert. Sofern nachweislich ein Werkstoff- bzw. Herstellungsfehler vorliegt, werden schadhafte Teile kostenlos ersetzt.
2. Ansprüche aus der Gewährleistung entfallen, wenn eine Reparatur oder ein Ersatz des Produktes oder eines Teiles aus den folgenden Gründen erforderlich ist:
 - a) Normaler Verschleiß, dazu gehören insbesondere folgende Teile, sofern verbaut: Batterien, Motorkohlen, Handgriffe, Armauflagen, Polsterung, Reifen, Bremsen, Kappen etc.
 - b) Überlastung des Produkts wie z.B. eine Überschreitung des maximalen Nutzergewichts oder der Zuladung.
 - c) Das Produkt oder das Teil wurde nicht gemäß der Bedienungsanleitung, den Pflege- und Hygienehinweisen oder den, in den Wartungshinweisen aufgeführten Empfehlungen des Herstellers gepflegt oder gewartet.
 - d) Es wurde Zubehör verwendet, bei dem es sich nicht um Originalzubehör handelte.
 - e) Das Produkt oder ein Teil wurde durch Nachlässigkeit, Unfall oder unsachgemäße Verwendung beschädigt.
 - f) Es wurden Änderungen / Modifikationen am Produkt oder an Teilen durchgeführt, die von den Herstellervorgaben abweichen.
 - g) Es wurden Reparaturen durchgeführt, bevor unser Kundendienst über den jeweiligen Sachverhalt informiert wurde.
3. Zur Geltendmachung der Gewährleistung benachrichtigen Sie bitte umgehend Ihren Fachhändler, mit einer genauen Beschreibung des Problems. Das Produkt muss von einem von Bischoff & Bischoff autorisierten Fachhändler repariert werden.
4. Für Teile, die im Rahmen der Gewährleistung repariert oder getauscht werden, verlängert sich die Gewährleistung, auf die für das Produkt verbleibende Gewährleistungsdauer gemäß Ziffer 1.

5. Auf Originalersatzteile, die auf Kosten des Kunden eingebaut wurden, wird nach dem Einbau eine Garantie von 12 Monaten gewährt.
6. Schlägt die Nachbesserung nach angemessener Frist fehl, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.
7. Die Gewährleistung unterliegt dem Recht des Landes, in dem das Bischoff & Bischoff Produkt gekauft wurde. Darüber hinaus beachten Sie bitte die Bischoff & Bischoff Pflege-, Gewährleistungs-, Hygiene- und Wartungshinweise. Diese werden Ihnen von Ihrem Fachhändler gerne zur Verfügung gestellt. Für Austauschgeräte und Reparaturen gilt eine Gewährleistungsfrist von einem Jahr. Beachten Sie außerdem die Bischoff & Bischoff Pflege-, Gewährleistungs-, Hygiene- und Wartungshinweise. Diese werden Ihnen von Ihrem Fachhändler zur Verfügung gestellt.



Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung sowie unsachgemäß durchgeführte Wartungsarbeiten, insbesondere technische Änderungen und Ergänzungen (Anbauten), die ohne die Zustimmung der Bischoff & Bischoff GmbH durchgeführt werden, führen zum Erlöschen sowohl der Garantie als auch der Produkthaftung.

Garantie Urkunde

Produkt: Senio

Modellnummer:

Serien-Nummer:*

* (vom Händler einzutragen)

Fachhändler:

Datum und Stempel

(Achten Sie auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.)

*Hinweisschilder befinden sich unter dem Sitz am Rahmen

Hinweis!

Druckfehler, Produkt-, Farbänderungen und technische Angaben sind vorbehalten. Die Farben der abgebildeten Produkte können in der Realität leicht abweichen. Die Abbildungen können Zubehör enthalten



Bischoff & Bischoff GmbH

Im Stöckmädle 13

D-76307 Karlsbad

www.bischoff-bischoff.com



ISO 13485
BUREAU VERITAS
Certification

