




Enjoy mobility.

Alevo X 4057/4058

Stand 27.03.2026

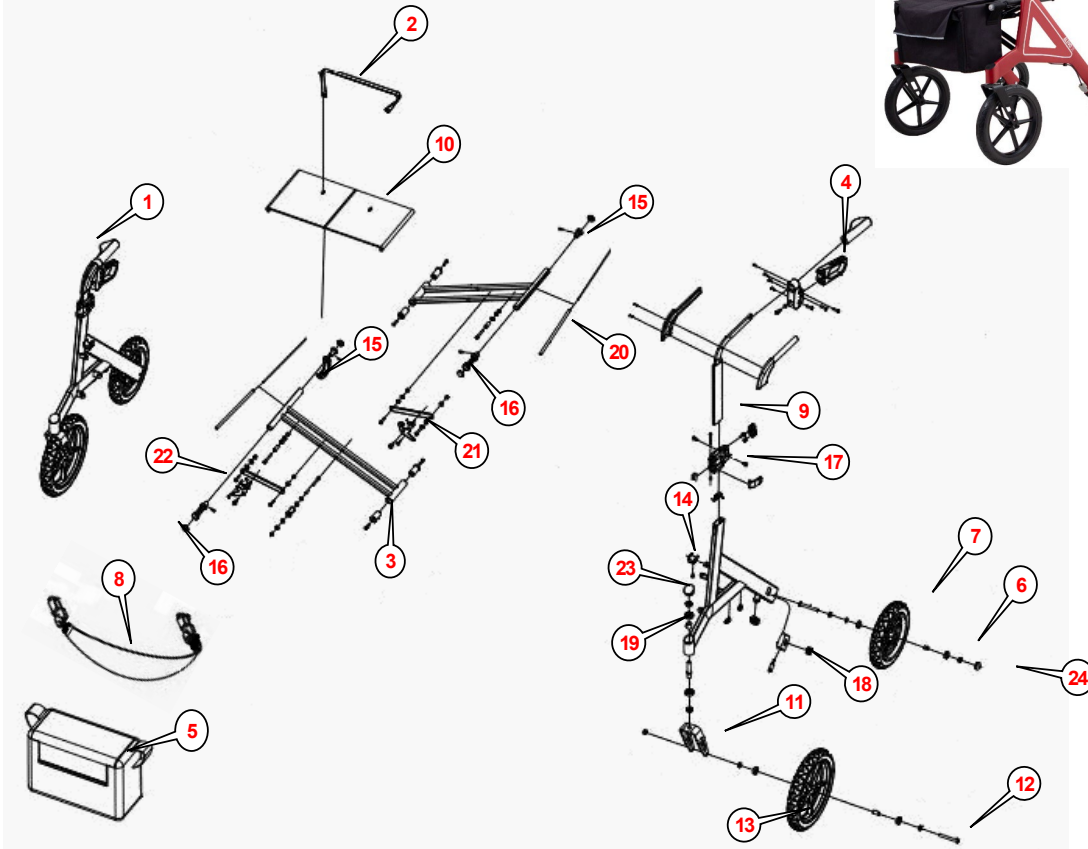

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Description
1	4057130000	Handgriff rechts	Handgrip right
	4057131000	Handgriff links	Handgrip left
2	4057121000	Band Kreuzstrebenentriegelung	Strap for crossbar unlocking
3	4057110000	Kreuzstrebe komplett	Crossbar complete
4	4057610000	Bremsgriff rechts komplett mit Bremszug	Brake grip right complete with brake cable
	4057611000	Bremsgriff links komplett mit Bremszug	Brake grip left complete with brake cable
5	4057115000	Tasche	Bag/pocket
6	4057505000	Achsschraube hinten komplett	Rear castor bolt complete
7	4057500000	Hinterrad links 235x37mm (9 1/4")	Rear wheel left 235x37mm (9 1/4")
	4057501000	Hinterrad rechts 235x37mm (9 1/4")	Rear wheel right 235x37mm (9 1/4")
8	4057900000	Rückengurt komplett	Backrest complete
9	4057100000	Schieberohr rechts	Push handle right
	4057101000	Schieberohr links	Push handle left
10	4057120000	Sitzbespannung	Seat upholstery
11	4057403000	Vorderradgabel	Front fork
12	4057405000	Achsschraube vorne komplett	Front caster bolt complete
13	4057400000	Vorderrad 285x37mm (11 1/4")	Front wheel 285x37mm (11 1/4")
14	4057112000	Auflageprofil Kreuzstrebe	Support profile crossbar
15	4022113000	Faltsicherung mit Reflektor rot R&L	Crossbar arrester with reflector red R&L
16	4057114000	Taschenhalter mit Reflektor weiß R&L	Bag holder with reflector white R&L
17	4057104000	Führungsprofil rechts Schieberohr	Guide profile right pushing tube
	4057105000	Führungsprofil links Schieberohr	Guide profile left pushing tube
18	4057600000	Bremse	Brake
19	4057407000	Lagersatz Lenkgabel komplett	Bearing set front fork complete
20	4057123000	Metall- und Kunststoffkeder für Sitzbespannung	Metal- and Plastic seat rail for seat upholstery
21	4057117000	Rastmechanismus links, komplett	Seat lock system left complete
22	4057118000	Rastmechanismus rechts, komplett	Seat lock system right complete
23	4057410000	Abdeckkappe für Castorbuchse	Plastic cap for castor
24	4057510000	Abdeckkappe für Hinterradachse	Plastic cover for rear wheel axle
o.Abb.	4040903000	Sterngriffschraube für Rückengurt	Star-grip screw for backrest
	4057180000	Ankipphilfe rechts	Anti-tipper right
	4057181000	Ankipphilfe links	Anti-tipper left

