




Enjoy mobility.

Beliva 4022/4023

Stand 27.03.2026

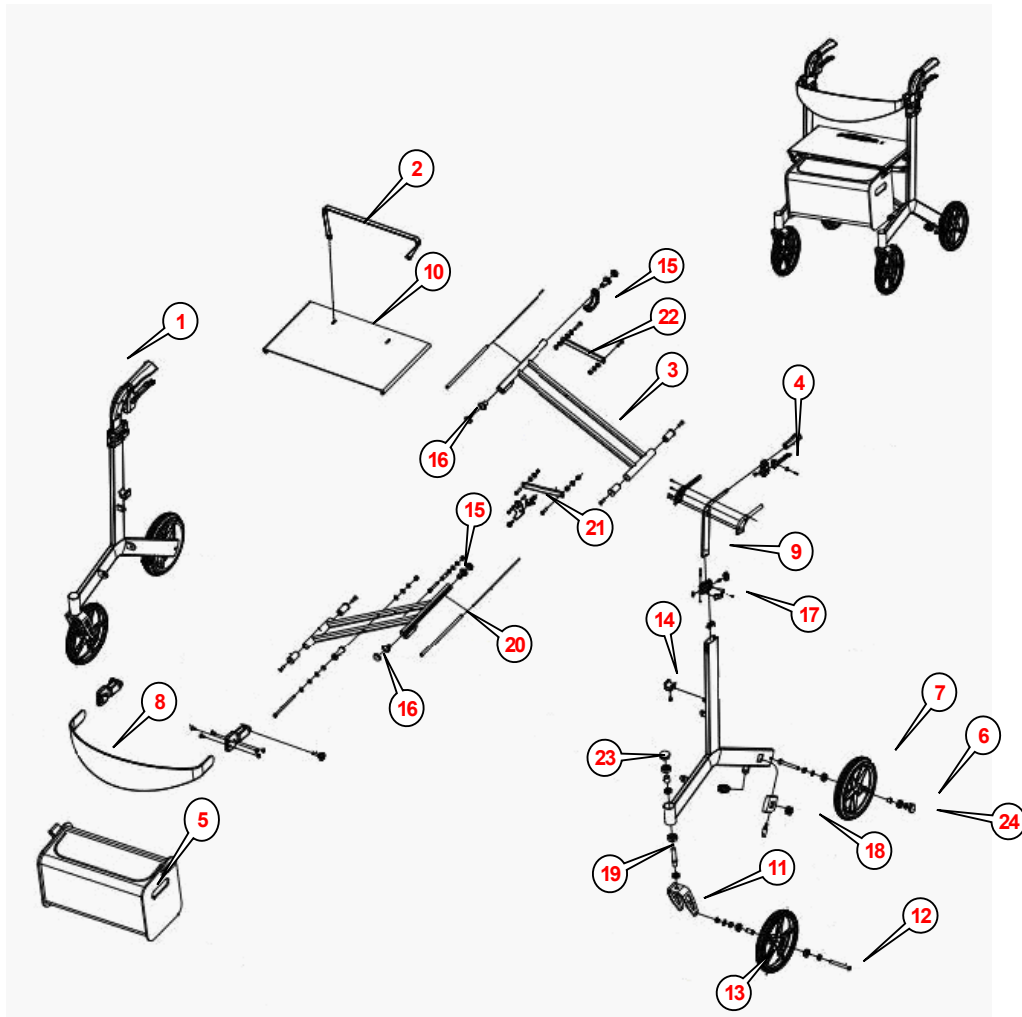

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Description
1	4022130000	Handgriff	Handgrip
2	4022121000	Band Kreuzstrebenentriegelung	Strap for crossbar unlocking
3	4022110000	Kreuzstrebe komplett	Crossbar complete
4	4022610000	Bremsgriff rechts komplett mit Bremszug	Brake grip right complete with cable
	4022611000	Bremsgriff links komplett mit Bremszug	Brake grip left complete with cable
5	4022115000	Tasche	Bag/pocket
6	4022505000	Achsschraube hinten komplett	Rear castor bolt complete
7	4022500000	Hinterrad 200x32mm (8")	Rear wheel 200x32mm (8")
8	4022900000	Rückengurt komplett	Backrest complete
9	4022100000	Schieberohr rechts	Push handle right
	4022101000	Schieberohr links	Push handle left
10	4022120000	Sitzbespannung	Seat upholstery
11	4022403000	Vorderradgabel mit Lager	Front fork with bearing
12	4022405000	Achsschraube vorne komplett	Front caster bolt complete
13	4022400000	Vorderrad 200x32mm (8")	Front wheel 200x32mm (8")
14	4022112000	Auflageprofil Kreuzstrebe	Support profile crossbar
15	4022113000	Faltsicherung mit Reflektor rot R&L	Crossbar arrester with reflector red R&L
16	4022114000	Kreuzstreben Reflektor weiß R&L	Crossbar reflector white R&L
17	4022104000	Führungsprofil rechts Schieberohr	Guide profile right pushing tube
	4022105000	Führungsprofil links Schieberohr	Guide profile left pushing tube
18	4022600000	Bremse	Brake
19	4022407000	Lagersatz Lenkgabel komplett	Bearing set front fork complete
20	4022123000	Metall- und Kunststoffkeder für Sitzbespannung	Metal- and Plastic seat rail for seat upholstery
21	4022117000	Rastmechanismus links, komplett	Seat lock system left complete
22	4022118000	Verbindungshebel rechts	Connecting lever right
23	4022410000	Abdeckkappe für Castorbuchse	Plastic cap for castor
24	4022510000	Abdeckkappe für Hinterradachse	Plastic cover for rear wheel axle
o. Abb.	4022180000	Ankipphilfe rechts	Tip-assist right
	4040805000	Stockhalter	Cane holder

