




Enjoy mobility.

Alevo

Stand 24.06.2026

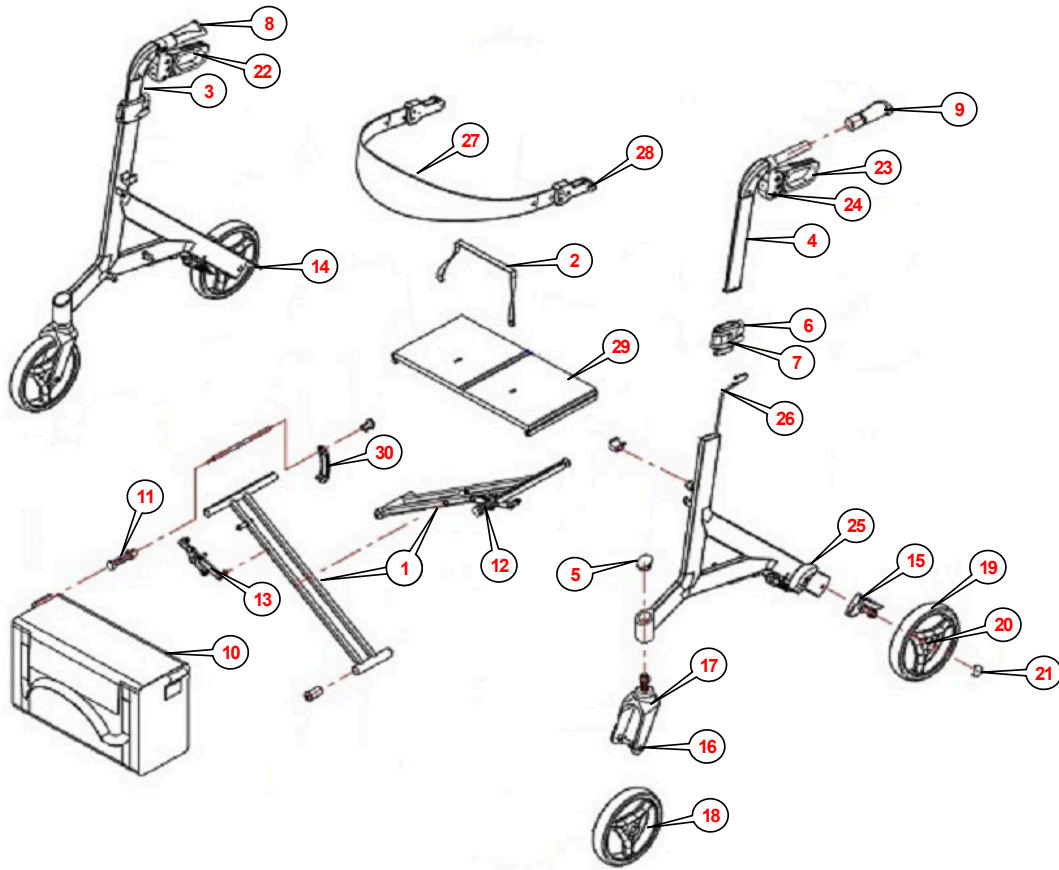



Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Description
1	4040108000	Kreuzstrebe komplett	Crossbar complete
2	4040109000	Band Kreuzstrebenentriegelung	Strap for crossbar unlocking
3	4040112000	Schieberohr rechts	Push handle right
4	4040113000	Schieberohr links	Push handle left
5	4040114000	Abdeckkappe für Castorbuchse	Plastic cap for castor
6	4040115000	Arretierstift für Schieberohr	Locking bolt with spring for pushing tube
7	4040118000	Schieberohrhalter	Pushing tube holder
8	4040130000	Handgriff rechts	Handgrip right
9	4040131000	Handgriff links	Handgrip left
10	4045146000	Tasche an Kreuzstrebe	Bag to crossbar
11	4057114000	Taschenhalter mit Reflektor weiß, R+L	Bag holder with reflector white, R+L
12	4040151000	Befestigungshebel Kreuzstrebe links, komplett	Crossbar lock system left complete
13	4040152000	Befestigungshebel Kreuzstrebe rechts, komplett	Crossbar lock system right complete
14	4040180000	Ankipphilfe rechts	Anti-tipper right
15	4040181000	Ankipphilfe links	Anti-tipper left
16	4040402000	Achsschraube vorne komplett	Front caster bolt complete
17	4040410000	Vorderradgabel incl. Lager komplett	Front fork complete
18	4040450000	Rad vorne 8" incl. Lager komplett	Front wheel 8" complete
19	4040500000	Rad hinten 8" incl. Lager komplett	Front wheel 8" complete
20	4040502000	Achsschraube hinten komplett	Rear castor bolt complete
21	4040505000	Abdeckkappe für Hinterradachse	Plastic cover for rear wheel axle
22	4040622000	Bremse rechts	Brake right
23	4040623000	Bremse links	Brake left
24	4040630000	Schraube für Bremshebel	Screw for brake lever
25	4040625000	Bremsblechgehäuse links komplett	Brake housing left complete
26	4040627000	Bowdenzug komplett	Brake cable complete
27	4040904000	Komfort Rückengurt komplett	Comfort backrest complete
28	4040903000	Sterngriffschraube für Rückengurt	Star-head screw for backrest
29	4040905000	Sitzbespannung komplett	Seat upholstery complete
30	4022113000	Faltsicherung mit Reflektor rot R+L	Crossbar arrester with reflector red R+L
ohne Abbildung / no image	4040146000	Tasche an Rahmen	Bag to frame
	4040148000	Taschenhalter an Rahmen	Bag holder to frame
	4040210000	Profilbereifung Vorderräder, Set	Profile front tires wheels, set
	4040220000	Profilbereifung Hinterräder, Set	Profile rear tires wheels, set
	4040401000	Distanzhülse 6mm für Profilbereifung	Spacer 6mm for profile wheels
	4040581000	Umbausatz für Profilbereifung	Refitting & assembling set for profile tires
	4040626000	Bremszubehör-Set	Brake part set
	4040628000	Bremsblechgehäuse rechts komplett	Brake housing right complete
	4048611000	Überwurfmutter Set	Union nut kid



Enjoy mobility.

Alevo Zubehör / Accessories

Stand 24.06.2026

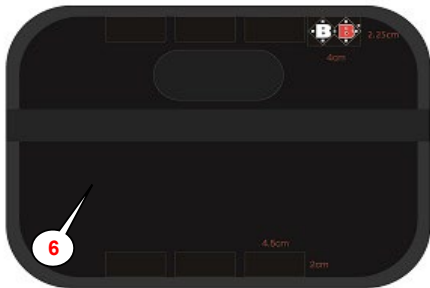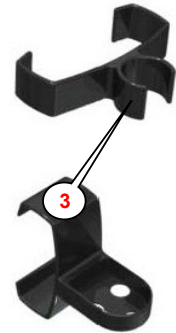

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Description
1	4040801000	Flaschenhalter	Bottle holder
2	4040803000	Sonnen- und Regenschirm	Sun- and Rain umbrella
3	4040805000	Stockhalter	Cane holder
4	4040155000	Rahmenklammer für Zubehör	Frame clamp for accessories
5	4040901000	Sitzkissen	Seat cushion
6	4040910000	Faltbox	Folding box
7			
8			

