


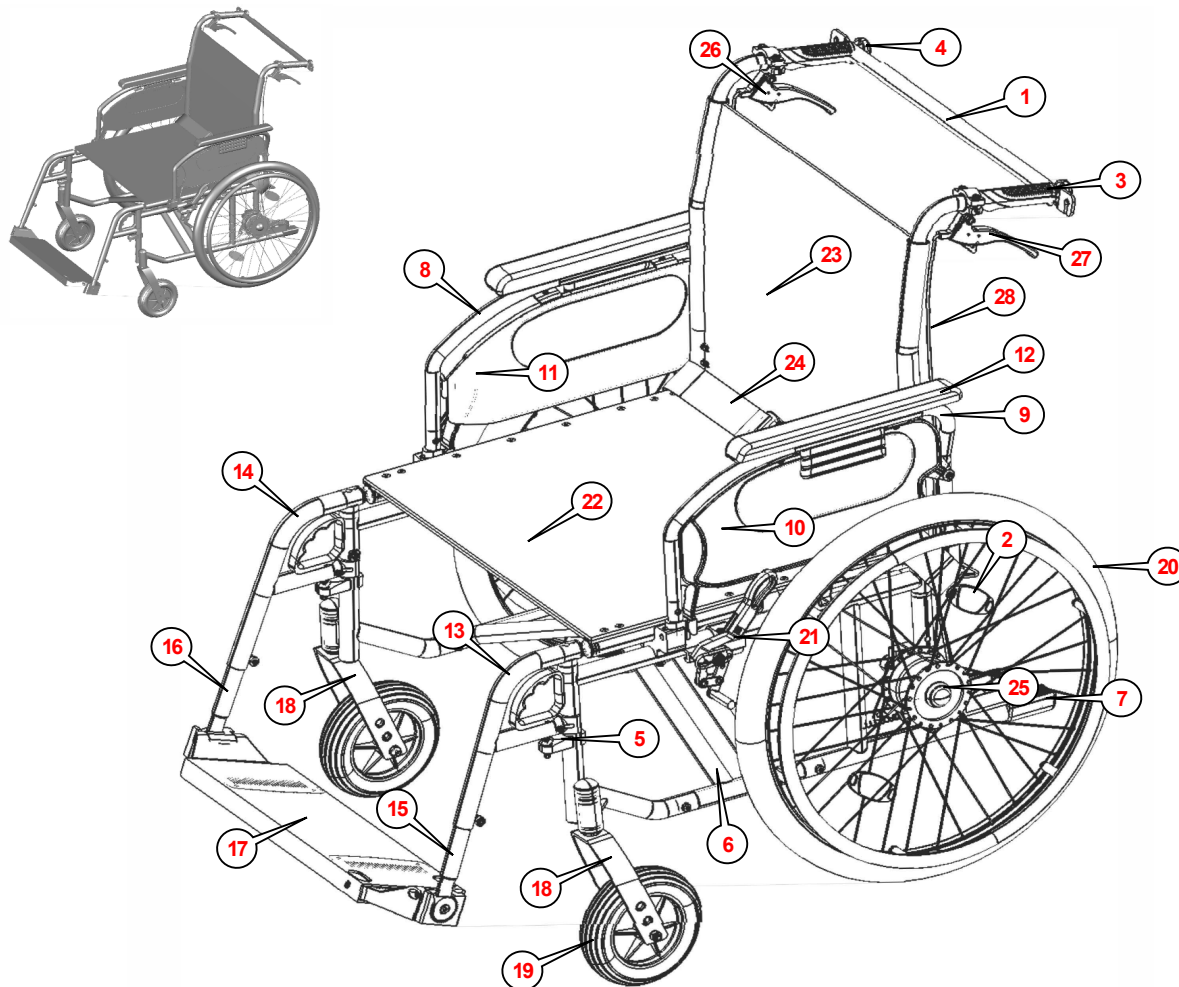

| Pos. | Artikelnummer | Bezeichnung                                   | Description                                 |
|------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1    | 1911100000    | Stabilisierung für Schieberohre SB 60cm       | Balance tube sw 60cm                        |
|      | 1911101000    | Stabilisierung für Schieberohre SB 65cm       | Balance tube sw 65cm                        |
|      | 1911102000    | Stabilisierung für Schieberohre SB 70cm       | Balance tube sw 70cm                        |
| 2    | 1911505000    | Reflektor gelb für Hinterrad                  | Reflector yellow for rear wheel             |
| 3    | 1270130000    | Schiebegriff                                  | Handle grip                                 |
| 4    | 1911103000    | Rändelschraube für Stabilisierung             | Knurled screw for balance tube              |
| 5    | 1352138000    | Arretierprofil für Beinstütze                 | Holder for legrest                          |
| 6    | 1911164000    | Kreuzstrebe komplett SB 60cm                  | Crossbar complete sw 60cm                   |
|      | 1911165000    | Kreuzstrebe komplett SB 65cm                  | Crossbar complete sw 65cm                   |
|      | 1911166000    | Kreuzstrebe komplett SB 70cm                  | Crossbar complete sw 70cm                   |
| 7    | 1200131000    | Ankipphilfe                                   | End plug                                    |
| 8    | 1911203000    | Seitenteil links, komplett                    | Armrest kit left complete                   |
| 9    | 1911202000    | Seitenteil rechts, komplett                   | Armrest kit right complete                  |
| 10   | 0009211000    | Kleiderschutz links                           | Sidepanel left                              |
| 11   | 0009212000    | Kleiderschutz rechts                          | Sidepanel right                             |
| 12   | 1352210000    | Armpolster                                    | Armrest pad                                 |
| 13   | 1911301000    | Beistützenoberteil links, komplett            | Legrest hanger left complete                |
| 14   | 1911302000    | Beistützenoberteil rechts, komplett           | Legrest hanger right complete               |
| 15   | 1911303000    | Beinstützenunterteil links, komplett          | Legrest tube with footplate left complete   |
| 16   | 1911304000    | Beinstützenunterteil rechts, komplett         | Legrest tube with footplate right complete  |
| 17   | 1911355000    | Fußbrett SB 60cm                              | Footboard sw 60cm                           |
|      | 1911356000    | Fußbrett SB 65cm                              | Footboard sw 65cm                           |
|      | 1911357000    | Fußbrett SB 70cm                              | Footboard sw 70cm                           |
| 18   | 1911401000    | Vorderradgabel links mit Lenkbolzen komplett  | Front fork left with bolt, complete         |
|      | 1911402000    | Vorderradgabel rechts mit Lenkbolzen komplett | Front fork right with bolt, complete        |
| 19   | 9500107000    | Vorderrad 7" mit Radachse komplett            | Front wheel 7" with axle complete           |
| 20   | 1911503000    | Hinterrad 24" mit Bremsstrommel komplett      | Rear wheel 24" with hub complete            |
| 21   | 1911601000    | Bremse links, komplett                        | Brake left complete                         |
|      | 1911602000    | Bremse rechts, komplett                       | Brake right complete                        |
| 22   | 1911901000    | Sitzbespannung komplett SB 60cm               | Seat upholstery complete sw 60cm            |
|      | 1911902000    | Sitzbespannung komplett SB 65cm               | Seat upholstery complete sw 65cm            |
|      | 1911903000    | Sitzbespannung komplett SB 70cm               | Seat upholstery complete sw 70cm            |
| 23   | 1911935000    | Anpassrücken SB 60cm                          | Adjustable backrest with upholstery sw 60cm |
|      | 1911936000    | Anpassrücken SB 65cm                          | Adjustable backrest with upholstery sw 65cm |



|        |            |                                           |                                                |                                                                                     |
|--------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 1911937000 | Anpassrücken SB 70cm                      | Adjustable backrest with upholstery sw 70cm    |    |
| 24     | 9800019000 | Sicherheitsgurt Press XXL                 | Safety belt Press XXL                          |   |
| 25     | 1911504000 | Abdeckkappe für Schraubenachse hinten     | Cover cap for rear screw axle                  |  |
| 26     | 1911520000 | Bremshebel rechts für Trommelbremse       | Brake lever right for hub brake                |  |
| 27     | 1911521000 | Bremshebel links für Trommelbremse        | Brake lever left for hub brake                 |  |
| 28     | 1911523000 | Brems- und Bowdenzug komplett             | Brake cable complete                           |  |
| o.Abb. | 1270845000 | Kippschutzrollen (Paar)                   | Anti Tipper (pair)                             |  |
|        | 1352350003 | Beinstütze waagerecht verstellbar, rechts | Adjustable legrest, right                      |  |
|        | 1352351003 | Beinstütze waagerecht verstellbar, links  | Adjustable legrest, left                       |  |
|        | 1352370001 | Amputationsbeinstütze, rechts             | Amputation legrest, right                      |  |
|        | 1352371001 | Amputationsbeinstütze, links              | Amputation legrest, left                       |  |
|        | 1911134000 | Adapterblock für Hinterrad                | Adapter for rear wheel                         |  |
|        | 1911189000 | Befestigungshebel für Kreuzstrebe SB 60cm | Lever with U holder for crossbar sw 60cm       |  |
|        | 1911190000 | Befestigungshebel für Kreuzstrebe SB 65cm | Lever with U holder for crossbar sw 65cm       |  |
|        | 1911191000 | Befestigungshebel für Kreuzstrebe SB 70cm | Lever with U holder for crossbar sw 70cm       |  |
|        | 1911344000 | Wadenband                                 | Calf strap                                     |  |
|        | 1911403000 | Lenklagersatz für Vorderradgabel komplett | Bearing set for front fork complete            |  |
|        | 1911501000 | Hinterrad 24" Standard komplett           | Rear wheel 24" standard complete               |  |
|        | 1911515000 | Schraubenachse 15x108mm                   | Screw axle 15x108mm                            |  |
|        | 1911524000 | Verdrehsicherungsprofil rechts für TB     | Torsion-resistant profile right for hube brake |  |
|        | 1911525000 | Verdrehsicherungsprofil links für TB      | Torsion-resistant profile left for hube brake  |  |
|        | 1911530000 | Trommelbremsträger rechts komplett        | Hub brake right complete                       |  |
|        | 1911531000 | Trommelbremsträger links komplett         | Hub brake left complete                        |  |
|        | 1911981000 | Sitzkissen mit Platte SB 60cm             | Seat cushion with plate sw 60cm                |  |
|        | 1911982000 | Sitzkissen mit Platte SB 65cm             | Seat cushion with plate sw 65cm                |  |
|        | 1911983000 | Sitzkissen mit Platte SB 70cm             | Seat cushion with plate sw 70cm                |  |
|        | 9800030002 | Stockhalter                               | Cane holder                                    |  |